

反対咬合用
オーラルシールド

ムーシールド



反対咬合用オーラルシールド
ムーシールド®

MuhTongue ムータン

ムーシールドに新しいサイズの

シリーズが加わりました




「ムーシールド・ムータン」は、従来のムーシールドよりも柔軟性のある素材を使用し、機能や効果はそのままに、従来のムーシールドにはないエクストラモール・ラージをご用意いたしました。



3歳児健康診断時の反対咬合・第一大臼歯萌出期以降の反対咬合に対応できる機能的顎矯正装置

ムーシールドシリーズとは？

- 被蓋の改善
- 舌圧と口唇圧のバランス
- 舌を高位に保つ機能

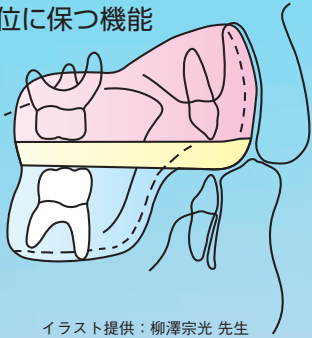

イラスト提供：柳澤宗光 先生

効 能

不正咬合治療を目的とした歯列矯正装置。
本品を装着することによって顎が正常に成長するように促すものである。

作用機序

上唇圧を排除し、口唇圧のバランスを整える。
低位舌を改善し、高位で機能させ、逆被蓋の改善を促す。

使用方法

〈試適〉

顎歯列、舌小帯などの適合をチェックする。

〈装着〉

装着は主に就寝中とする。
歯科医師の指示に従い、およそ1年間を目処に使用する。

本品を装着していない時はリテーナーケースに入れて保管してください。

「リテーナーシャイン」等のリテーナー洗浄剤での洗浄をお勧めします。

ムーシールドS&Mサイズ

材 質

ポリメタクリル酸メチル (PMMA)
※アルコールを使用して「ムーシールド」を洗浄・消毒しないでください。装置が破損する原因となります。

適 応

Sサイズは乳歯列期(3歳～5歳位)の反対咬合に使用する。(早期初期治療)

Mサイズは第一大臼歯萌出期以降(6歳～11歳位)の反対咬合に使用する。(第I期治療)

Small

Sサイズ(乳歯列期用)



Medium

Mサイズ(第一大臼歯萌出期以降用)



	包装	商品番号	
ムーシールドS	2	MSS	206850100
ムーシールドM	2	MSM	206850105

販売名：ムーシールド 一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器認証番号：21600BZY00593000
医療機器の分類：管理医療機器(クラスII) 製造販売：株式会社バイオデント 東京都荒川区西日暮里 2-33-19 YDM日暮里ビル

ムーシールド ムータン

材 質

熱可塑性ポリウレタン
(当社調べ：スマホのハードカバーの硬さ)

適 応

Extra Smallサイズは乳歯列期(3歳～4歳位)の反対咬合に使用する。(早期初期治療)

Largeサイズは第一大臼歯萌出期以降(7歳～11歳位)の反対咬合に使用する。(第I期治療)

Extra Small

Large

使用例

- ムーシールドSの導入装置として
- ムーシールドSが大きすぎるケース

XSサイズ



使用例

- ムーシールドMがサイズアウトしたケース
- 反対咬合治療の保定として

Lサイズ




	包装	商品番号	
ムーシールド・ムータン XS	1	MSMTXS	206850198
ムーシールド・ムータン L	1	MSMTL	206850199

販売名：ムーシールド ムータン 一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器認証番号：302AGBZX00079000
医療機器の分類：管理医療機器(クラスII) 製造販売：株式会社バイオデント 東京都荒川区西日暮里 2-33-19 YDM日暮里ビル

ムータンとムーシールドの違い


材質

ムーシールドはPMMA、
ムータンは熱可塑性ポリ
ウレタンでできています。
ムータンはより柔軟性に優
れており、咬耗に強い素材
です。

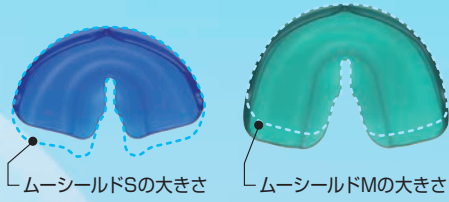


	XSサイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
高さ	30 mm	30 mm	34 mm	34 mm
舌レスト部の深さ	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
シールド部の高さ	21 mm	21 mm	23 mm	23 mm
幅	61 mm	62 mm	65 mm	68 mm
奥行き	34 mm	39 mm	42 mm	47 mm


ムーシールド ムータン XS MSMTXS

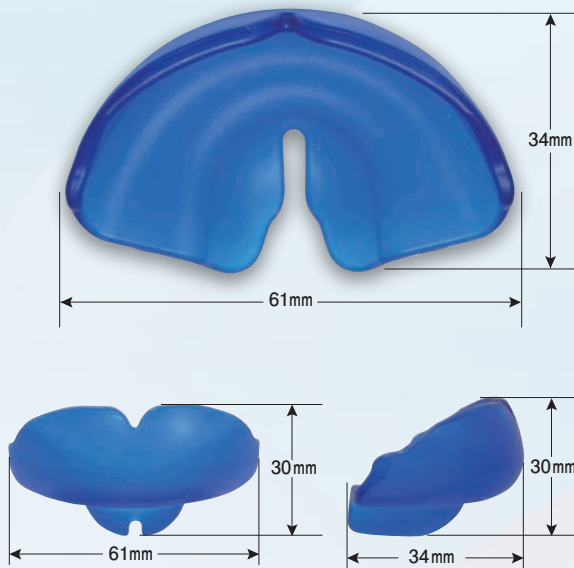


ムーシールド S MSS

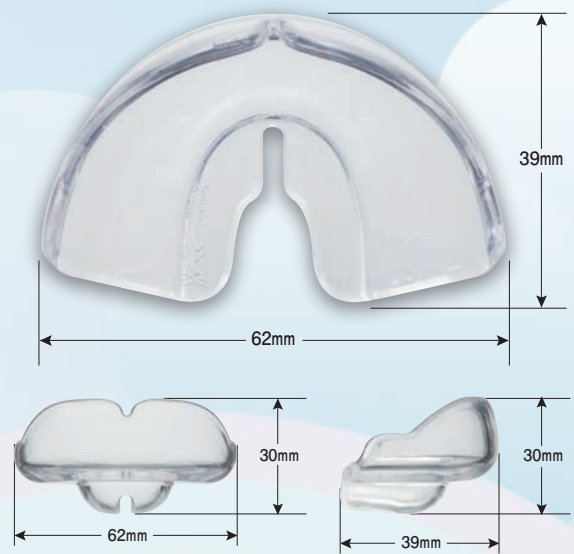

ムーシールド M MSM

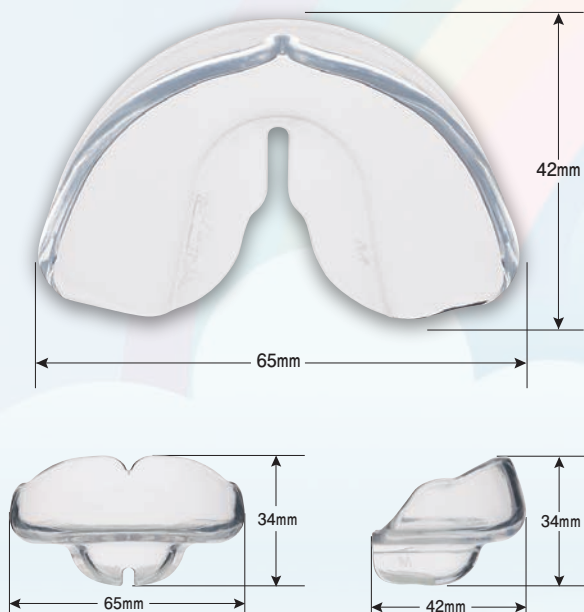

ムーシールド ムータン L MSMTL

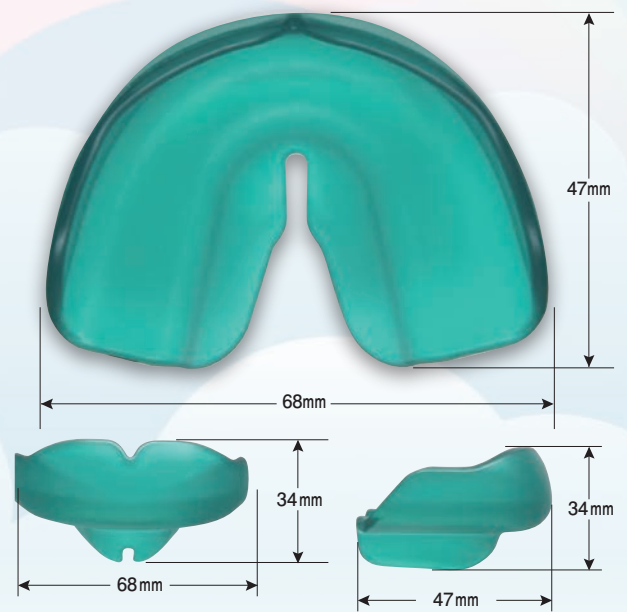

第 I 期治療


6歳5ヵ月

7歳2ヵ月



5歳9ヵ月

5歳12ヵ月

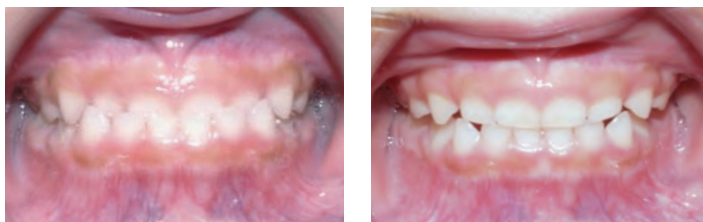

提供：柳澤宗光 先生・柳澤百子 先生

早期初期治療

3歳6ヵ月

4歳6ヵ月



〈ムーシールド, MUH Shield〉は、ムーカンパニーの登録商標です。

ムーシールドについてや治療法についてのQ&Aは、下記のWebサイトをご覧ください。

<https://muhshield.info>



(A4巻き三つ折)



(A4判)



ムーシールドボックス青 シール付	2	MSB2BL	206850107
ムーシールドボックス赤 シール付	2	MSB2RD	206850106
受け口ってなに? (患者さん向け) フレット	50	MSL2	206850108
月刊柳澤宗光	1	ZTASYA828	208990960

〈関連商品〉

お手入れ商品

リテーナーシャイン



矯正用リテーナー洗浄剤で、ムーシールド、ムータンTMの洗浄におすすめします。

ボトルキャップは別売りです。

内容量：150g (1回2.5g：60回分)

	包装	商品番号	
リテーナーシャイン 顆粒	24	RSK	
リテーナーシャイン ボトルキャップ	1	RSC	206850800

NASOMETER (ナゾメーター)



Dr. Carl F. Gugino が監修した、鼻呼吸の状態を確認できるミラーです。ミラーに鼻を近づけ、鼻からの呼気で曇った状態を見て、どれくらい鼻呼吸ができていないか、左右差がないかなどの確認ができます。年齢に関係なく使用が可能で、鼻呼吸の状態が可視化できるため、患者さんのモチベーション向上も期待できます。

〈評価内容〉

4段階で評価を行います。

- 0：完全な口呼吸
- 1～2：鼻呼吸が十分に行われていない状態
- 3：小児期では十分であるが、成人では十分な鼻呼吸が行われていない状態
- 4以上：十分に鼻呼吸が行われている状態

〈お手入れ方法〉

オートクレーブが可能です。

商品番号	
NASOMETER	206860538

【発売】 株式会社 JM Ortho

東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 〒101-0062 T:03-5281-4711 <https://www.jmortho.co.jp/>

*仕様・価格は2021年6月1日現在のものです。*消費税は含まれておりません。*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。