

シグネチャー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は、セラミック製の歯列矯正装置である。

2. 形状



3. 原材料

酸化アルミニウム

【使用目的又は効果】

歯列矯正用

【使用方法等】

歯面に接着し、矯正線の保持に用いる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・使用になる接着剤の指示に従って、歯面に接着すること。
- ・ボンディングベースが油分等で汚れていると、適切な接着力が得られません。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：CDB CORPORATION (アメリカ合衆国)