

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用チューブ (31759000)
チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症状がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は、歯科矯正用に使われるチューブであって形態は大別して「シングル」、「ダブル」、「トリプル」、「リングル」の4形態に分けられる。使用する矯正線の太さ又は治療法の差異により多種類ある。


2. 形状

標準形状は下図のとおり。

・シングル



・ダブル

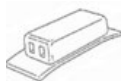

・トリプル



・リングル



3. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科矯正用

【使用方法等】

歯面に接着し、矯正線の保持に用いる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

ダイレクトボンディング品の場合

- ・使用になる接着剤の指示に従って、歯面に接着すること。
- ・ボンディングベースが油分等で汚れていると、適切な接着力が得られません。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理ください。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ合衆国)