

プライヤー

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

* 【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、様々な形状の先端部をもつ小型のペンチである。

* 【種類】

先端部の形状により、以下の種類（品番）がある。

678-	101	204	303	320	504
	101L	205	304	321	505
	102	210	305	322	709
	103	211	306	323	800
	104	212	307	324	801
	105	212M	307S	325	802
	106	216	308	326	803
	107	219	309	327	804
	107L	220L	310	328-20	805
	109	221	311	328-21	807
	110	221MC	312	340	808
	200	222	315	341	811
	201	225	316	342	
	201L	225M	317	500	
	202	301	318	501	
203	302	319	502		

末尾のLはロングタイプ、Sはスリムタイプ

【使用目的又は効果】

用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いる。

【使用方法等】

口腔内外において、アーチワイヤーなどの着脱、シンチバッグなどに用いる。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (4) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (5) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (6) *腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・*177℃以上に加熱しないこと。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）