


クイックフィット (300-104)

クイックフィットはストラップ調整、専用チューブ、専用フックなどをワンタッチで調整可能なスナップオンタイプのオールプラスチック製のバリアブルヘッドギアです。

特 徴

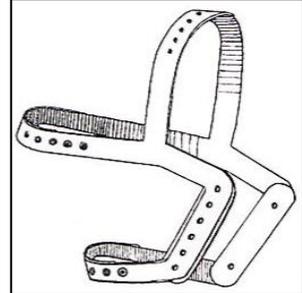

- ・“J”フックは#300-121、300-122、300-123をご利用ください。
- ・ステーブル(ホチキス止め)不要ですので、患者に合わせての調整が可能(樹脂製)です。
- ・スナップオンチューブ、フック(フェイスボウ、J-フック用)が付属されています。
- ・6つのスナップポジションが咬合平面に対し10～40度の角度での牽引を可能とします。



注意 ご使用の際は必ず下記の注意事項をよくご参照いただきますようお願い申し上げます。
J-フックもしくはフェイスボウをご使用の際はニッケルに対し過敏症のある患者様には使用しないでください。

ヘッドギアのサイズ調整

- ・ヘッドギアは左右のストラップを組み合わせてサイズの調整を行いますが、その際必ず適度に湾曲させながら作業を行ってください。(写真1)
- ・サイズ調整の際に組み合わせたストラップを外す場合は、丁寧に取り外してください。**力任せに引き剥がすとストラップがちぎれる場合があります。**

写真1



写真2




スナップオンフックの装着

- ・スナップオンフックを装着する時はピンセットのような薄い器具でフックとストラップを挟み込んで力を加え穴に凸をはめ込み、装着を行ってください。(写真3)
- ・フックを取り外す際は必ず後ろからフックベースを押し出すようにしてください。**フックを引っ張り外すとフックがちぎれる場合があります。**

写真3



写真4

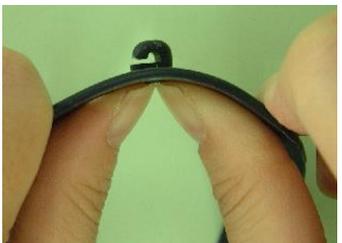

製造販売元 株式会社 JM Ortho

本 社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL: 03-5281-4711 FAX: 03-5281-4716

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 3F

TEL: 06-6338-9271 FAX: 06-6338-9380

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 6F

TEL: 092-432-5676 FAX: 092-432-5737