

056-050/ジョージゲージ（本体）の洗浄と滅菌について


※056-022（2019年9月以前販売品）はオートクレーブ不可です。

※ジョージゲージのバイトフォークはディスポーザブルです。繰り返しの使用はできません。

STEP1：手洗いによる事前洗浄

<事前準備>

1. 酵素系洗剤（55℃以下）または同様の洗浄液を準備します。
2. 水道水でメーカーが推奨する濃度に希釈してください。
3. 装置が完全に浸かる大きさの容器に洗浄液を入れてください。

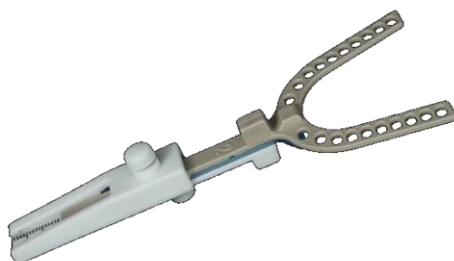

<つけ置き時間と磨き方>

1. 洗浄液を入れた容器で5分以上浸け置き洗いしてください。
2. 洗浄液に浸けた状態でナイロンなど柔らかい材質のブラシを使って、15秒以上装置を磨いてください。接続部分や可動部分は動かして、隠れているところも全て磨いてください。

<すすぎ方>

1. 洗浄液から装置を取り出し、1分以上流水ですすぎ、完全に洗浄液を洗い流してください。
2. 装置を完全に乾燥させます。
3. すすいだ後、装置に残留物が残っていないか確認してください。もし残っていた場合は上記の手順を繰り返してください。

STEP2：オートクレーブ滅菌—湿熱滅菌

1. 装置の部品を適切なサイズの滅菌パックに入れてください。
2. 滅菌パックに入れた装置をオートクレーブに全て入れ、121℃で30分滅菌します。
3. 30分間乾燥させます。

※変形の恐れがあるため、オートクレーブの乾燥工程などにおいて、作業温度が121℃を超える工程は行わないでください。

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716

株式会社 JM Ortho