

バイオスター チャンバー側部のねじ固定方法

チャンバー側部のねじが緩み、真鍮の半月板（ブラスラストピース）がカタつく場合、以下の方法で固定してください。

1. ねじを外す

プラスドライバーでねじを外します。



2. ねじのクリーニング

取り外したねじを、アルコール等を含ませたティッシュでクリーニングします。

しっかりと清掃をしておかないと、ねじを固定するねじ留め剤の効きが悪くなり、外れやすくなります。



3. ねじ穴のクリーニング

アルコールなどを含ませた子ども用綿棒を回転させながら挿入し、しっかりとクリーニングします。
その後、新しい(乾燥した)綿棒を回転させながら挿入し、汚れと水分が残らないようにします。



5. ねじ留め剤の塗布

ねじ穴とねじに、ねじ留め剤を塗布します。

！ご注意！

瞬間接着剤は使用しないでください。

ねじのヘッドの摩耗が進行した場合、ねじの交換が必要になりますが、瞬間接着剤は完全に接着されて取り外せなくなります。ねじ留め剤は、金属ねじ専用かつ取り外し可能なタイプ（中強度）をご用意ください。



6. ねじの固定

ねじ留め剤が硬化する前にねじを強く締めます。

この時、ヘッドの十字穴がなめてしまわないよう注意して固定してください。

ねじ留め剤の完全な硬化のため、1 日程お待ちください。（ご帰宅の前などに作業されることをお勧めします。）



7. シリコングリースの塗布

最後に付属のシリコングリースを塗布したら完了です。

付属のシリコングリースがない場合は、市販の物をご用意ください。



◆ねじや真鍮板が摩耗している場合

交換の際は、お出入りのお取扱店様に下記の商品をご注文ください。


- 商品番号：3110828
- 商品名：ブラススラストピース+スクリュー(各 1 個入)
※個別の販売はございません



◆ゴムパッキンが摩耗している場合

バイオスター購入時に予備として付属されていますが、お手元がない場合は下記の商品をご注文ください。

- 商品番号：3000856
- 商品名：プレッシャーチャンバー専用ゴムパッキン(3 個入)

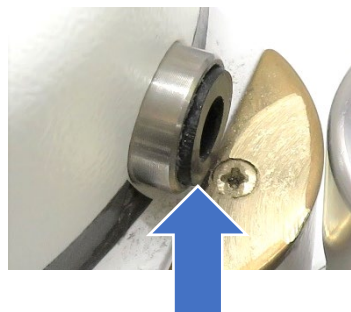

株式会社 JM Ortho

2021.11.10 作成