

バイオスター7型 SDカード交換・抜き差し方法

※SN : 70103 以降のシリアルナンバー

ディスプレイ画面がフリーズする / プレスした後にエアが抜けない / ボタンが押せない

赤文字のエラーが出る / アニメーションが出ない / 画面が真っ白になる

などの不具合発生時は、機体内部にあるSDカードの接触不良、またはデータ破損の可能性がありますので、以下の手順をお試しください。


1. ねじを外す

ディスプレイ左側にある2本のねじを外し、SDカードを露出させます。




2. SDカードを抜き差しする

① まずはSDカードを「カチッ」というまで押し込んで突出させます。

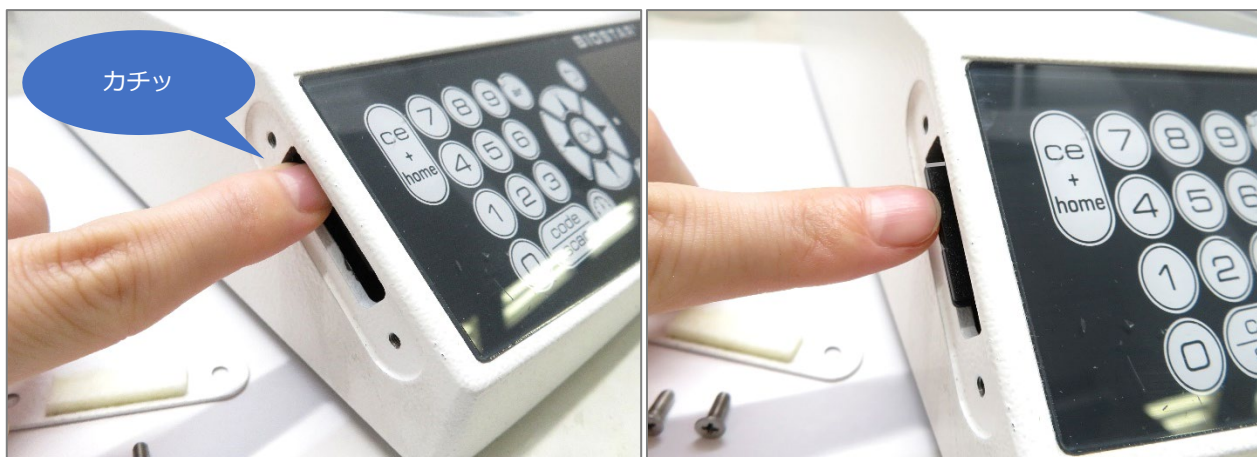


② もう一度「カチッ」というまで押し込んで元のポジションに戻します。

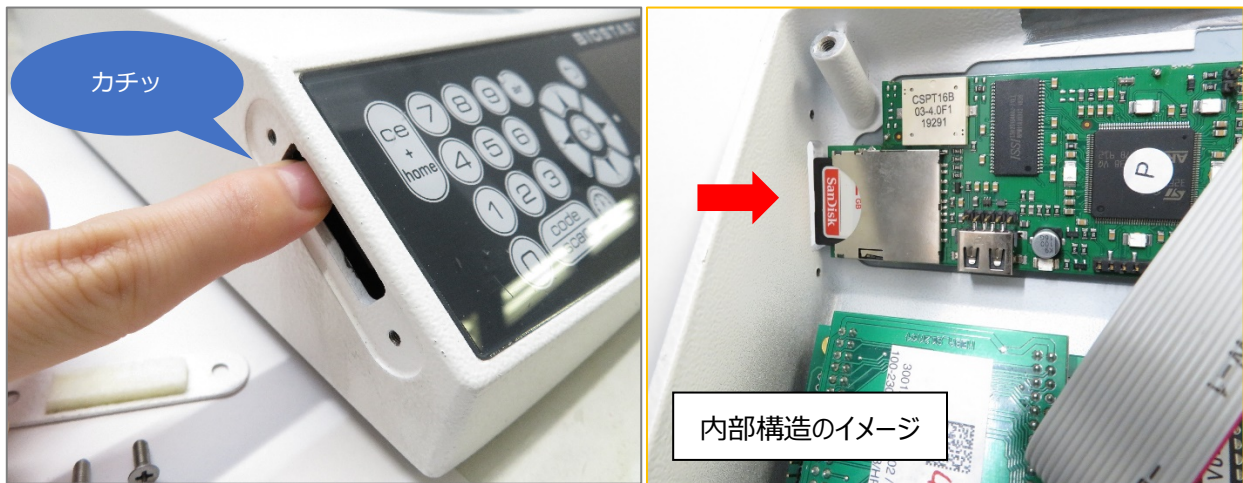

3. 動作確認

再度動作確認を行ってください。

ディスプレイの表示等に問題がないようでしたら、カバーを閉じて完了です。

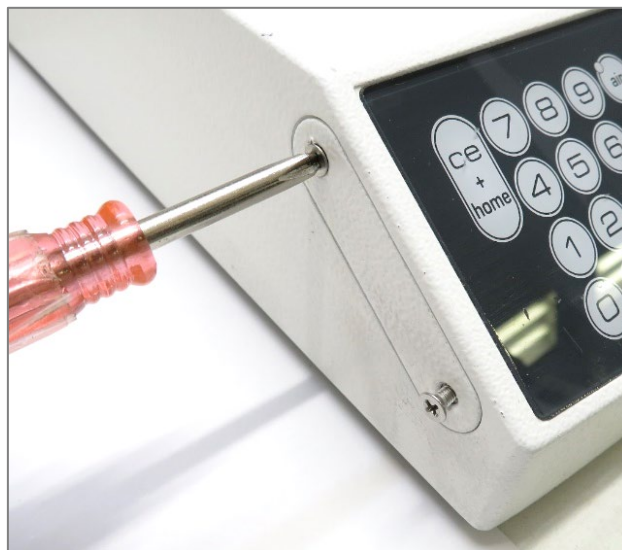

* SD カードを交換するよう指示があった場合は「 2 .」のステップで取り換えてください。

SD カードを機体内部に落とさないように注意してください。



【不具合が解消しなかったとき】

不具合が解消しなかった場合は、お出入りのお取扱店様へ修理をご依頼ください。

株式会社 JM Ortho

2021.11.18 作成