

## MPS100K マグネティックマウンティングプレートシステム スターターキット 取り付け方法



### 【MPS100K キット内容】

- |                   |       |                     |        |
|-------------------|-------|---------------------|--------|
| ● MPS マウンティングプレート | …20 枚 | ● イエローレンチ           | …1 個   |
| ● メタルプレート         | …20 枚 | ● マグネティックホールディングカップ | …2 セット |
| ● カップポジショナー       | …1 個  |                     |        |


### ①スクリュー式 マウンティングプレートを取り外す

スクリュー式のマウンティングシステムがセッティングされている場合、まずはマウンティングプレートを取り外します。



## ②スクリュー式 サムスクリューを外す

六角レンチ(2mm)を使用し、サムスクリュー内部にある留めネジを緩めます。

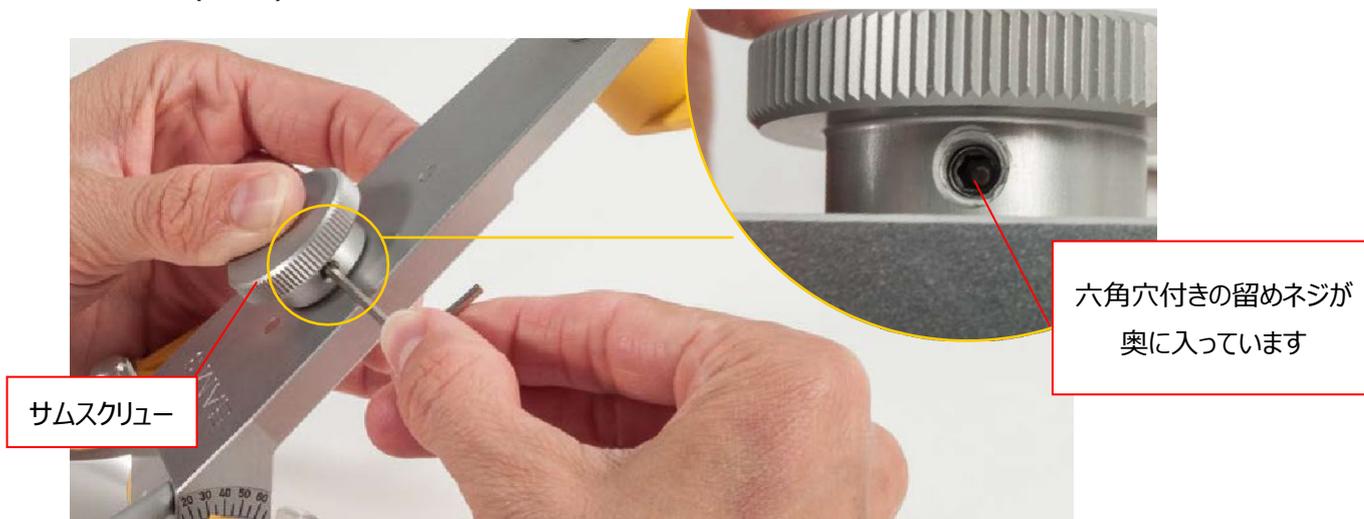

留めネジをしっかり緩め（または完全に抜き取ってください）、ポストを外します。

ポストが抜けない場合、留めネジが緩め切れていない場合がありますので無理に引っ張らず、もう一度六角レンチで緩めるようにしてください。



### ③ マグネティックホールディングカップの設置

マグネティックホールディングカップを、先ほどポストを外した穴に通します。




キャップナットを手で軽く締めます。



MPS マウンティングプレートをマグネティックホールディングカップに嵌まるようにセットします。



カップポジショナーを使用して、マグネティックホールディングカップの磁石が中央に来るよう微調整します。

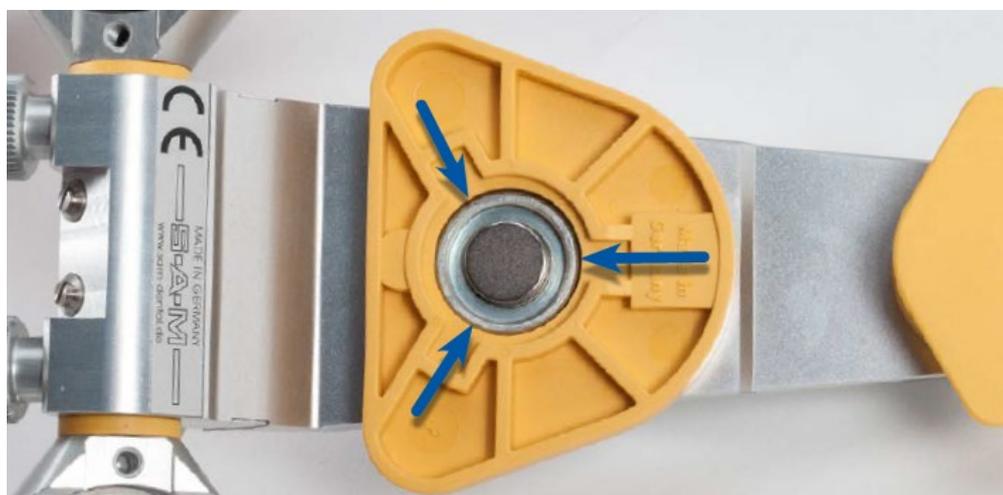


カップポジショナーでポジショニングした状態で、イエローレンチを用いてキャップナットをしっかりと締めます。

※注意※ 金属製の工具はキャップナットを損傷させる恐れがありますので、付属のイエローレンチを使用してください。



#### ④メタルプレートを設置する

メタルプレートを磁石の上に設置します。この時、メタルプレートの縁に丸みを帯びている方が咬合器側(磁石側)になるようにセットします。(下図参照)

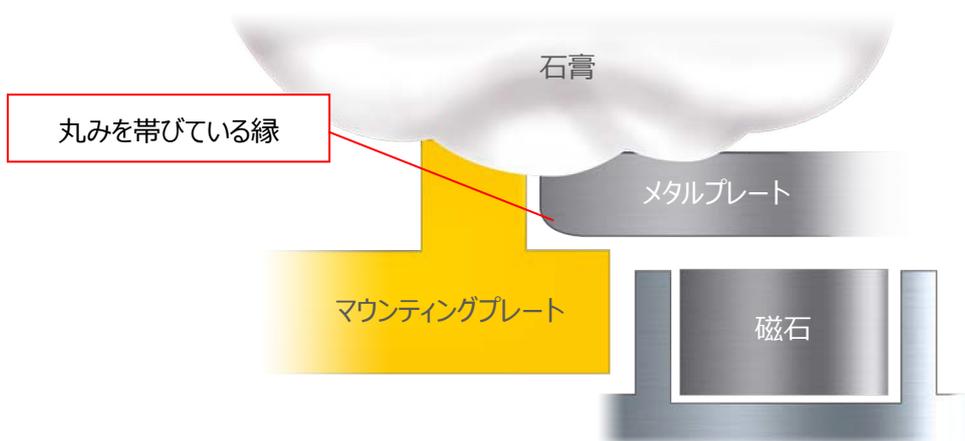

上下顎模型弓 両方とも交換ができましたら、取り付け完了です。

