

バイオスター ロッキングリングの爪 固定方法


ロッキングリングの爪（スプリングクリップ）を留めるねじが緩んでしまった場合、下記の方法で固定してください。

※過去にねじを緩めるよう指示があった機体については、以下の作業を実施しないでください。




1. ねじを外す

プラスドライバーでねじを外します。

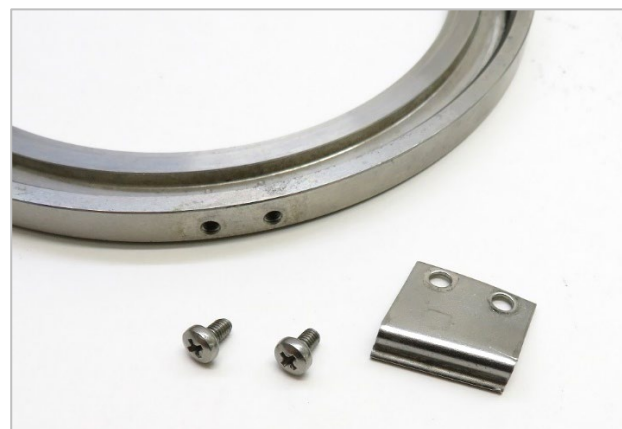

* ハンドル裏側のスプリングクリップが緩んだ時は、六角穴付きボルトを六角レンチ(2.5mm)で外してください。


以下の作業は、六角穴付きボルトに関しても同様に実施してください。

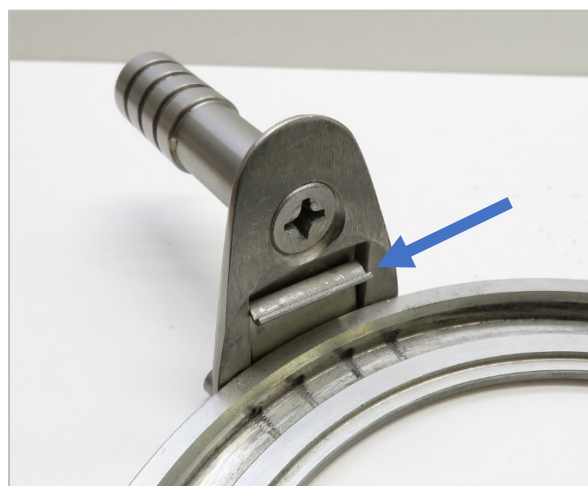

2. ねじのクリーニング

取り外したねじを、アルコール等を含ませたティッシュでクリーニングします。


しっかりと清掃をしておかないと、ねじを固定するねじ留め剤の効きが悪くなり、外れやすくなります。

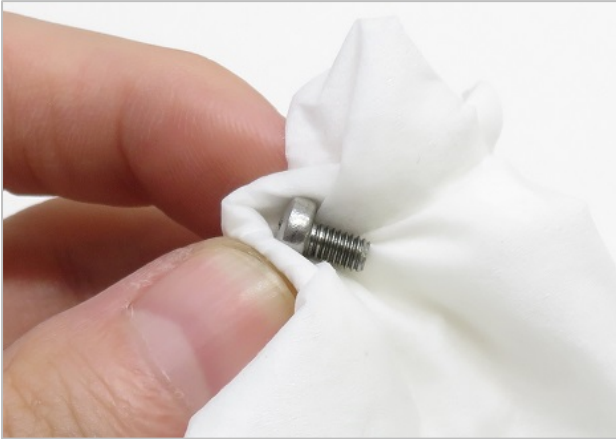

3. ねじ穴のクリーニング

アルコールなどを含ませた子ども用綿棒を回転させながらねじ穴に挿入し、しっかりとクリーニングします。

その後、新しい(乾燥した)綿棒を回転させながら挿入し、汚れと水分が残らないようにします。

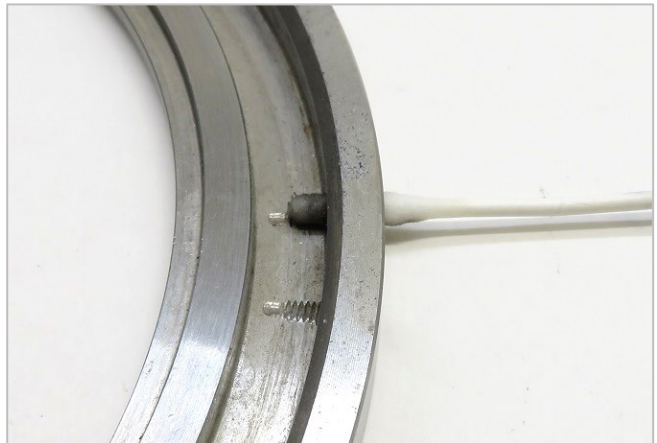

4. ねじ留め剤の塗布


ねじ穴とねじに、ねじ留め剤を塗布します。

！ご注意！

瞬間接着剤は使用しないでください。

スプリングクリップが破折した場合交換が必要になりますが、瞬間接着剤はねじが完全に接着されて取り外せなくなります。

ねじ留め剤は、金属ねじ専用かつ取り外し可能なタイプ（中強度）をご用意ください。

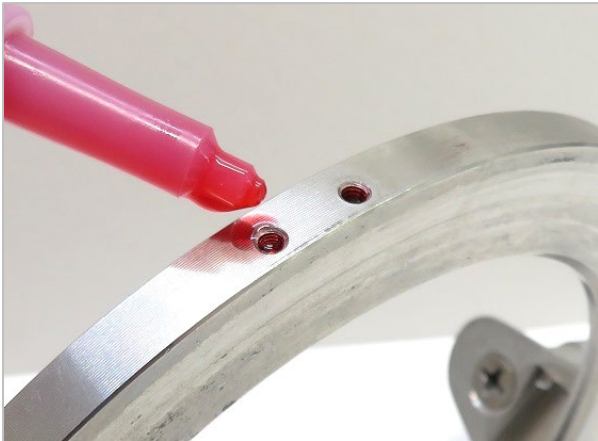


5. ねじの固定

ねじ留め剤が硬化する前にねじを強く締めます。

この時、ドライバーを強く回しすぎるとヘッドの十字穴がなめてしまいやすいので、注意して固定してください。

また、反対側からねじ留め剤が出ますので拭き取ってください。


ねじ留め剤の完全な硬化のため、1 日程お待ちください。（ご帰宅の前などに作業されることをお勧めします。）

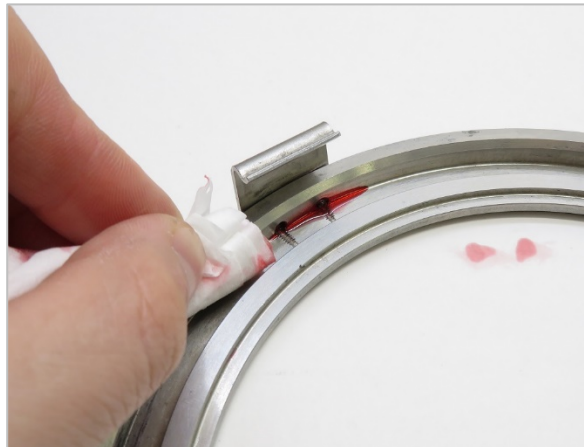

◆ スプリングクリップ

交換の際は、お出入りのお取扱店様に下記の商品をご注文ください。

- 商品番号：3125843
- 商品名：スプリングクリップ（ねじ 2 個入）
※各部品の個別販売はございません

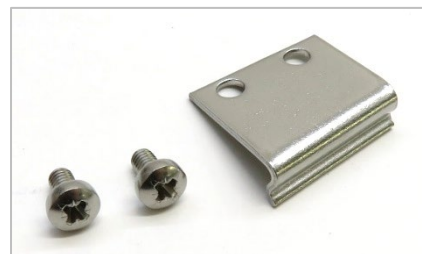

株式会社 JM Ortho

2021.11.1 作成