


# ワックスフォームのご使用方法

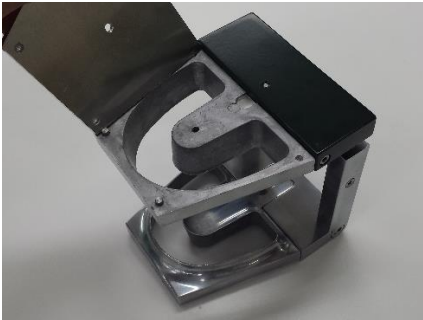


1

タイポドントのフタを上下とも外します



2

フォームを 37~40℃のお湯に約3分間漬けて温めます  
(※サーモバス等のご使用をお勧めします)

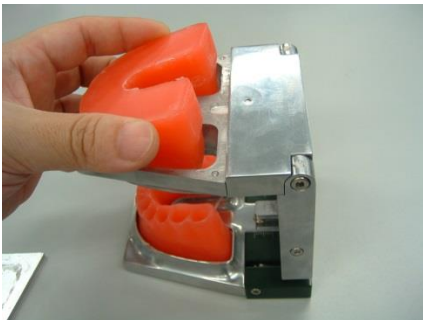

3

フォームを上下それぞれタイポドントに装着します  
写真のように、基底部分を持ち、前歯部側からゆっくり  
挿入していきます ※歯周側を持つと形態が崩れます  
※写真はすでに下顎分が装着された状態になっています



4

タイポドントのフタがしっかり閉まるように、スパチュラなどで  
基底部分を整えます  
その後、フタを閉めます



5

メタルティースを装着していきます  
ティースが入れづらい場合は、フォームを装着したタイポ  
ドントを、再びお湯に漬けてフォームを温めます