


タイポドント咬合器 〔モリタデンタルプロダクツ製〕





【構成部品】

- ・ポスト
- ・上下顎模型弓
- ・ベース板
- ・六角レンチ 2.5mm

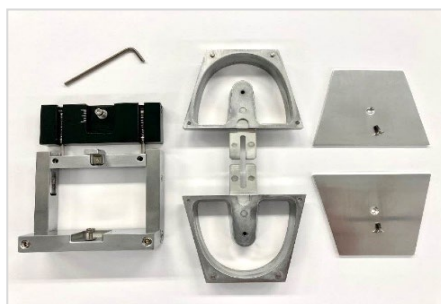


当品は可動域が広く、あらゆる角度から歯の動きを観察できます。
また、作業がしやすいよう全体を平らにすることが可能です。

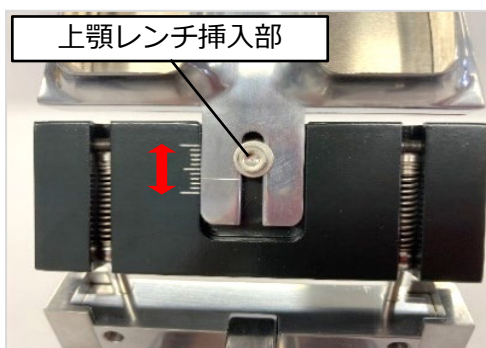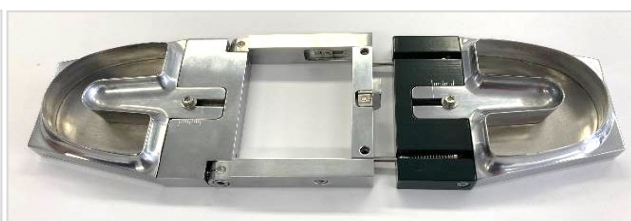

上顎と下顎の前後位置は、
付属のレンチで調整可能です。
※上下各10mmまで

上顎模型弓の高さは付属のレンチで調整
可能です。
※最大7mmまで

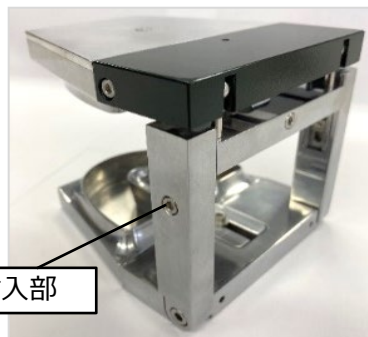

上顎模型弓にスプリングが内蔵
されており、前方運動、側方
運動を模擬することができます。
※角度は決められません