

代替器と修理品を入れ替える際のご注意

修理に不要な付属品

(ユーザー様のお手元に残していただきたいもの)



庫内下段ラック
(1個)



庫内網棚ラック
(1個)




ロート
(1個)




矯正用ブライヤー棚
(1個)



扉用カギ

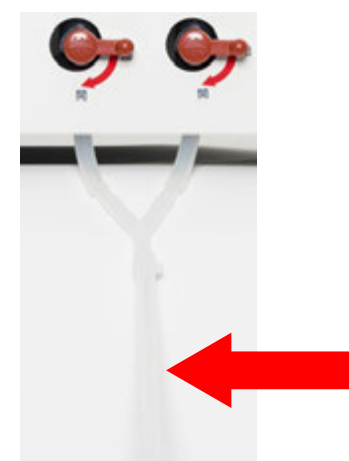

廃液ホース

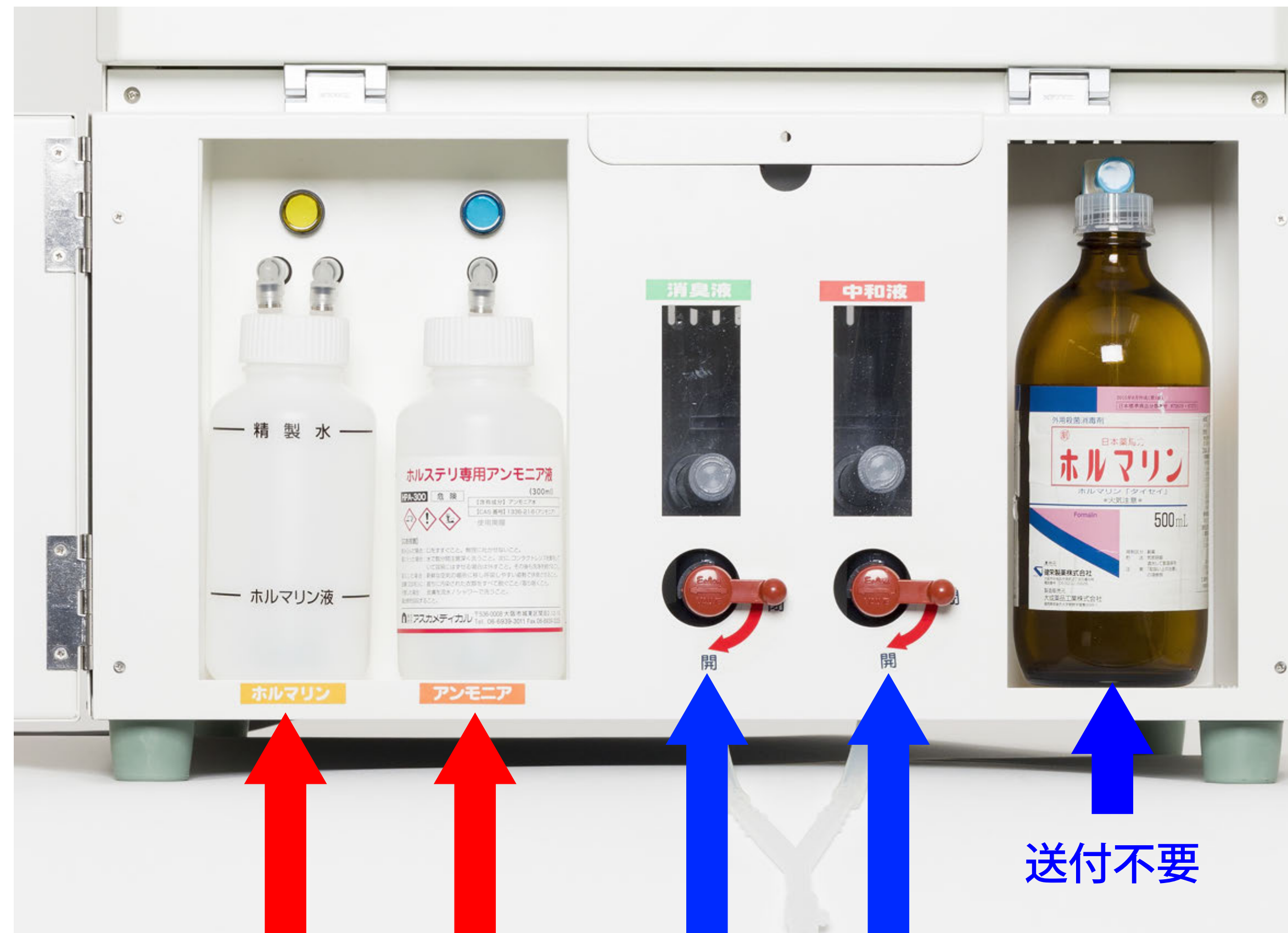

代替器付属のボトルと
入れ替えて修理品に
添えて送る

代替器付属のボトルキャップで
しっかりと締めて、修理品と一緒に
お送りください。

液漏れ防止のため、
必ず廃液してから
送付する

送付不要



バクテリアフィルター
修理品に取り付けたまま送る