

バイオスター ロッキングリングの爪 固定方法

ロッキングリングの爪（スプリングクリップ）を留めるねじが緩んでしまった場合、下記の方法で固定してください。


※過去にねじを緩めるよう指示があった機体については、以下の作業を実施しないでください。



1. ねじを外す



プラスドライバーでねじを外します。

※ねじを回しても外せない場合は、ねじをデンタルバーナー等で加熱すると、内部の接着剤が緩み外せる場合があります。

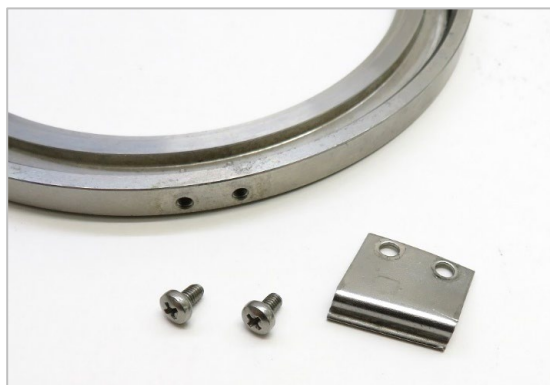

ハンドル裏側のスプリングクリップが緩んだ時は、六角穴付きボルトを六角レンチ(2.5mm)で外してください。

以下の作業は、六角穴付きボルトに関しても同様に実施してください。

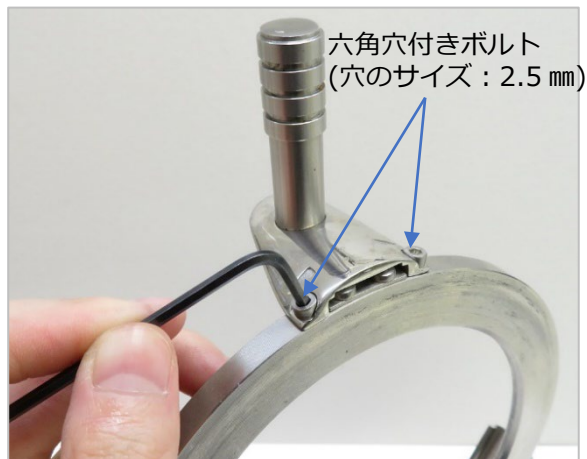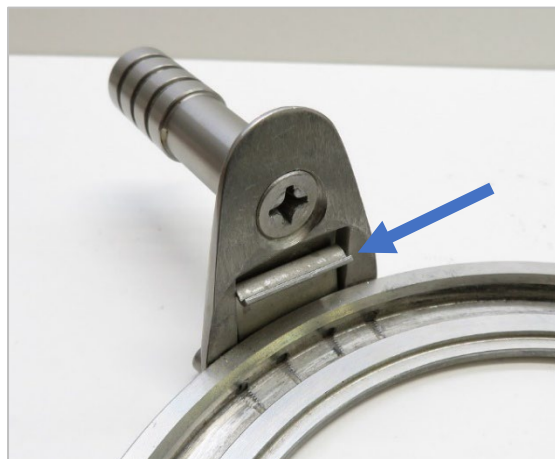

2. ねじのクリーニング

取り外したねじを、アルコール等を含ませたティッシュでクリーニングします。

しっかりと清掃をしておかないと、ねじを固定するねじ留め剤の効きが悪くなり、外れやすくなります。



3. ねじ穴のクリーニング

アルコールなどを含ませた子ども用綿棒を回転させながらねじ穴に挿入し、しっかりとクリーニングします。

その後、新しい(乾燥した)綿棒を回転させながら挿入し、汚れと水分が残らないようにします。



4. ねじ留め剤の塗布


ねじ穴とねじに、ねじ留め剤を塗布します。

！ご注意！

瞬間接着剤は使用しないでください。

スプリングクリップが破折した場合交換が必要になりますが、瞬間接着剤はねじが完全に接着されて取り外せなくなります。

ねじ留め剤は、金属ねじ専用かつ取り外し可能なタイプ（**低強度**）をご用意ください。

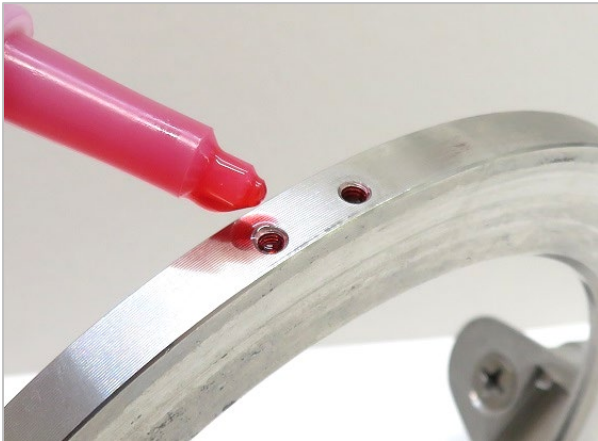


5. ねじの固定

ねじ留め剤が硬化する前にねじを強く締めます。

この時、ヘッドの十字穴がなめてしまわないよう注意して固定してください。

また、反対側からねじ留め剤が出ますので拭き取ってください。

ねじ留め剤の完全な硬化のため、1 日程お待ちください。（ご帰宅の前などに作業されることをお勧めします。）

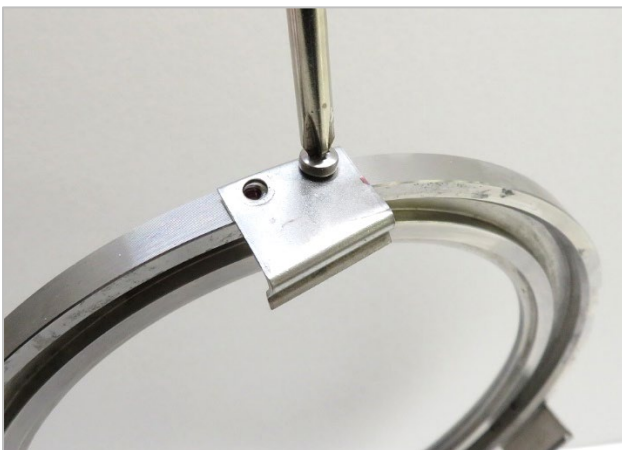

◆ スプリングクリップ

交換の際は、お出入りのお取扱店様に下記の商品をご注文ください。

- 商品番号：3125843
 - 商品名：スプリングクリップ（ねじ 2 個入）
- ※各部品の個別販売はございません



株式会社 JM Ortho

2024.8.26 作成