

マンディブラーポジションバリエーター

取扱説明書

X,Y(MPV550のみ),Z軸方向に顎位を微調整することができる装置で、精度の高いTMJスプリントを製作するのに便利です。



MPV500/ 500M

X軸(前後)、Z軸(上下)の調整




MPV550/ 550M

X軸(前後)、Y軸(左右)、Z軸(上下)の調整

※写真はMPV500M、MPV550になります

各部位名称 ※MPV550を例にしています

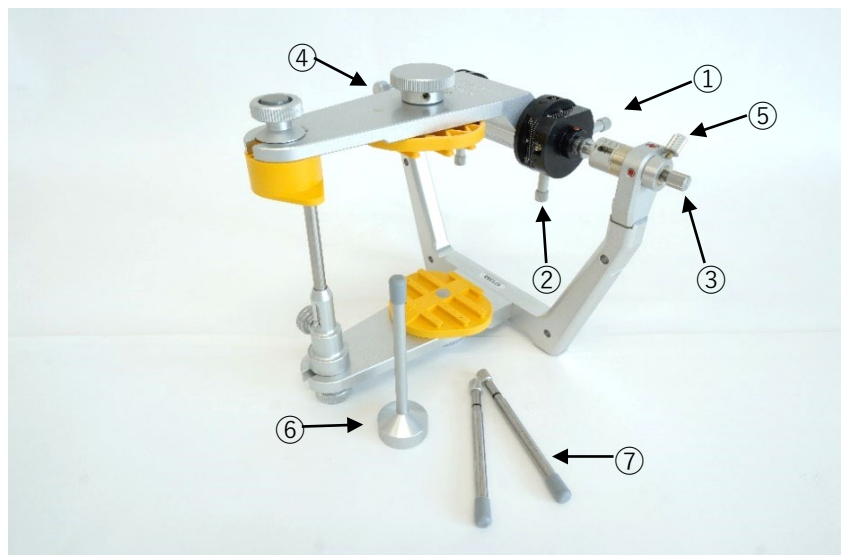

- ① X軸(前後)調整用サムスクリュー
- ② Z軸(上下)調整用サムスクリュー
- ③ Y軸(左右)調整用サムスクリュー※1
- ④ Y軸移動ロックングスクリュー※1
- ⑤ Y軸固定ネジ※1,2
- ⑥ バーティカルサポートロッド
- ⑦ チルトサポートロッド

※1 MPV500にはありません。

※2 軸を固定するためのパーツですので、通常は締めたままで使用します。



X軸(前後)方向の移動

X軸調整用サムスクリューで顎頭を前後に微調整できます。
目盛りの(+)が下顎前方位、(-)が後方位になります。
前後方とも10mm移動可能です。



Z軸(上下)方向の移動

Z軸調整用サムスクリューで顎頭を上下に微調整できます。
目盛りの(+)が下方、(-)が上方に下顎が移動できます。
上下の調整量は10mmです。



Y軸(左右)方向の移動(MPV550のみ)

Y軸調整用サムスクリューで顎頭を左右に微調整できます。
咬合器前方からみて、目盛りの(+)が右方向、(-)が左方向に
下顎が側方移動します。
側方(左右)それぞれで調整できる移動量は3mmです。



Y軸移動ロックングスクリューで側方移動をロックすることができます。



チルトサポートロッド使用例



バーティカルサポートロッド使用例

株式会社 JM Ortho

本 社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
TEL (03)5281-4711 FAX (03)5281-4716
大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル3F
TEL (06)6338-9271 FAX (06)6338-9380
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル6F
TEL (092)432-5676 FAX (092)432-5737

第3版

2024.9.10作成