

A-line®



Polycrystalline Ceramic Self Ligating Bracket

【製造販売】株式会社JM Ortho 【輸入元】BIOCETEC CO., Ltd.

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

TEL:03-5281-4711 FAX:03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp>

※仕様・価格は2024年2月1日現在のものです。

※価格に消費税は含まれておりません。


※デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合があります。



A-line、それは機能と審美性を兼ね備えたセルフライゲーティングブラケット。
コンパクトなデザインで、治療中も快適。毎日鏡を見つめたくなる笑顔へ。

高純度セラミック「AC800」を採用

精細なセラミック粒子を持つ、99.99%高純度セラミック「AC800」の採用により、高い強度と天然歯にマッチする透明度を実現。
矯正治療中によるワイヤーのトルクや咬合力、剥離応力におけるブラケットの破損が少なく、術者と患者さん双方のストレスを軽減します。

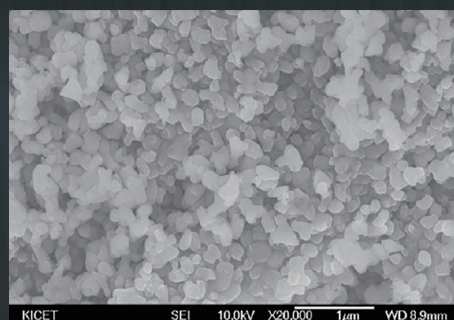

耐久性のある変形しにくいクリップ


ワイヤーなどからの力や、食べ物など口腔内環境でかかる負荷を考慮し、研究や試験を重ね、構造を最適化。変形しにくく、高い耐久性が期待できます。



製造元による「1000回開閉」動画はこちら！

審美性の高いクリップ

金属部分に2層の特殊なロジウムコーティングを採用。
耐摩耗性・耐変色性が高く、天然歯に馴染みやすい色合いで、審美性を長く保持します。

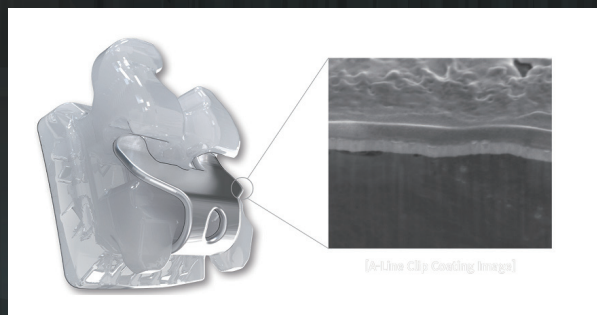



精度の高いスロット

製造時のセラミックの収縮を抑え、精度の高いスロットを実現。より予測しやすい治療に寄与します。



安定した接着強度を実現する ブラケットベースデザイン

2方向に25°カットを施したベース構造により、安定した接着強度とストレスの少ないディボンディングが期待できます。

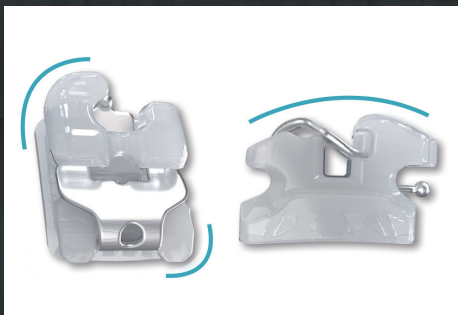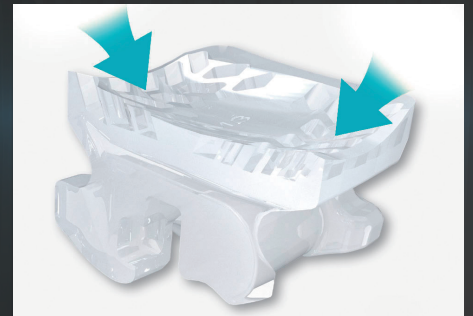

丸みがあり、スムーズなボディとウイング

ハイトが低く、丸みのあるボディで患者さんの不快感を軽減します。
また、NP表面処理*により滑らかな輪郭構造を実現しました。

*NP表面処理：ナノ粒子セラミック研磨表面処理

A-line専用オープニングツールとクリップ開閉方法

A-lineのクリップのスムーズな操作に寄与する専用オープニングツールです。片方の先端は細く、もう一方はやや厚みがあります。このツールを用い、下図の方法にてクリップを開きます。閉じる際は、指でクリップのカーブ部分をブラケット本体に押し込みます。



先端が細い側は、クリップに付与されているホール(穴)に引っかけて使用します。咬合面方向に操作することで、クリップが開きます。



先端がやや厚みのある側は、ウイングとベース面の間にあるクリップのボール部分を押し込んで開く時に使用します。クリップが歯石や残渣等で固着してしまった、あるいはクリップのホールに先端を挿し込みにくい時に有用です。ボールを押し込んで半分程度クリップを開いた後、通常どおり細い先端の方でホールに引っかけて完全に開いてください。

A-line ロスタイプ 単品										包装:10個
部位	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン(mm)	Right/Left	フック	.018スロット		.022スロット	
<u>1</u> <u>1</u>	12	5°	0°	3.6	R		AR18-1112	206350475UR1	AR22-1112	206350471UR1
					L		AR18-2112	206350475UL1	AR22-2112	206350471UL1
<u>2</u> <u>2</u>	8	8°	0°	3.4	R		AR18-1208	206350475UR2	AR22-1208	206350471UR2
					L		AR18-2208	206350475UL2	AR22-2208	206350471UL2
<u>3</u> <u>3</u>	2	13°	4°	3.5	R	フック付	AR18-1302H	206350475UR3H	AR22-1302H	206350471UR3H
					L	フック付	AR18-2302H	206350475UL3H	AR22-2302H	206350471UL3H
<u>54</u> <u>45</u>	-7	0°	0°	3.6	R	フック付	AR18-1407H	206350475UR45H	AR22-1407H	206350471UR45H
					L	フック付	AR18-2407H	206350475UL45H	AR22-2407H	206350471UL45H
<u>21</u> <u>12</u>	-1	0°	0°	3.2	R		AR18-4101	206350475LR12	AR22-4101	206350471LR12
					L		AR18-3101	206350475LL12	AR22-3101	206350471LL12
<u>3</u> <u>3</u>	-11	7°	2°	3.6	R	フック付	AR18-4311H	206350475LR3H	AR22-4311H	206350471LR3H
					L	フック付	AR18-3311H	206350475LL3H	AR22-3311H	206350471LL3H
<u>4</u> <u>4</u>	-17	0°	4°	3.6	R	フック付	AR18-4417H	206350475LR4H	AR22-4417H	206350471LR4H
					L	フック付	AR18-3417H	206350475LL4H	AR22-3417H	206350471LL4H
<u>5</u> <u>5</u>	-22	0°	4°	3.6	R	フック付	AR18-4522H	206350475LR5H	AR22-4522H	206350471LR5H
					L	フック付	AR18-3522H	206350475LL5H	AR22-3522H	206350471LL5H

A-line ロスタイプ 1 症例キット									
部 位	包 装	フック		.018スロット		.022スロット			
3～3	12個	犬歯のみフック		AR18-33H	206350476	AR22-33H	206350472		
5～5	20個	犬歯・小白歯フック		AR18-55H45	206350477	AR22-55H45	206350473		
上顎5～5/下顎3～3	16個	上顎犬歯・小白歯 / 下顎犬歯フック		AR18-53H45	206350478	AR22-53H45	206350474		

A-line MBTタイプ 単品										包装:10個
部位	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン(mm)	Right/Left	フック	.018スロット		.022スロット	
<u>1</u> <u>1</u>	17	4°	0°	3.6	R		—	—	AM22-1117	206350467UR1
					L		—	—	AM22-2117	206350467UL1
<u>2</u> <u>2</u>	10	8°	0°	3.4	R		—	—	AM22-1210	206350467UR2
					L		—	—	AM22-2210	206350467UL2
<u>3</u> <u>3</u>	0	8°	0°	3.6	R	フック付	—	—	AM22-1300H	206350467UR3H
					L	フック付	—	—	AM22-2300H	206350467UL3H
<u>54</u> <u>45</u>	-7	0°	0°	3.6	R	フック付	—	—	AM22-1407H	206350467UR45H
					L	フック付	—	—	AM22-2407H	206350467UL45H
<u>21</u> <u>12</u>	-6	0°	0°	3.2	R		—	—	AM22-4106	206350467LR12
					L		—	—	AM22-3106	206350467LL12
<u>3</u> <u>3</u>	0	3°	0°	3.6	R	フック付	—	—	AM22-4300H	206350467LR3H
					L	フック付	—	—	AM22-3300H	206350467LL3H
<u>4</u> <u>4</u>	-12	0°	0°	3.6	R	フック付	—	—	AM22-4412H	206350467LR4H
					L	フック付	—	—	AM22-3412H	206350467LL4H
<u>5</u> <u>5</u>	-17	0°	0°	3.5	R	フック付	—	—	AM22-4517H	206350467LR5H
					L	フック付	—	—	AM22-3517H	206350467LL5H

A-line MBTタイプ 1症例キット									
部 位	包 装	フック		.018スロット		.022スロット			
3～3	12個	犬歯のみフック		—		AM22-33H	206350468		
5～5	20個	犬歯・小白歯フック		—		AM22-55H45	206350469		
上顎5～5 / 下顎3～3	16個	上顎犬歯・小白歯 / 下顎犬歯フック		—		AM22-53H45	206350470		

販売名: BCTセラミックブラケット 一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号: 301AKBZX00035000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスⅡ)

A-line 専用オープニングツール									
商品番号									
A-line 専用オープニングツール					ALOT		206350479		

販売名: BCTオープニングツール 一般的名称: 歯科矯正用結さつ器 医療機器届出番号: 13B2X00107000045 医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスⅠ)