



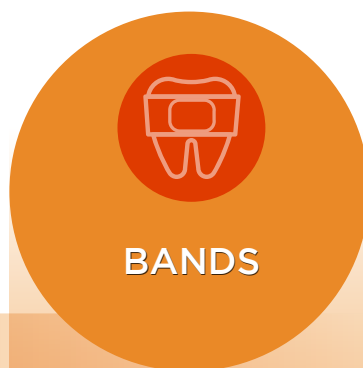

03


バンド

- バンドの選択とチューブの溶接位置 72
- ツルフォームバンド大臼歯 73
- ツルフォームバンド小臼歯／バンドケース 75
- 換算表 76

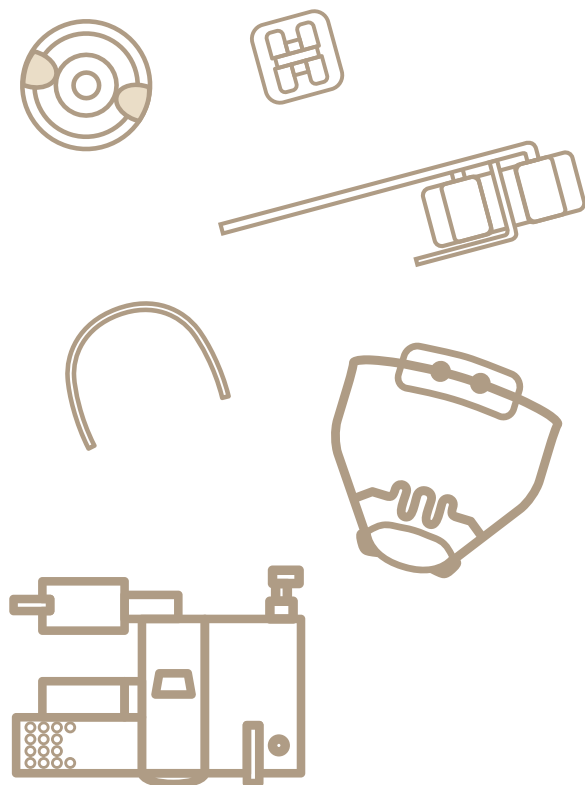

バンドの選択とチューブの溶接位置

ポイント：歯の大きさに相当するバンドをキットの中から3サイズピックアップして一番フィットするサイズを選択して下さい。

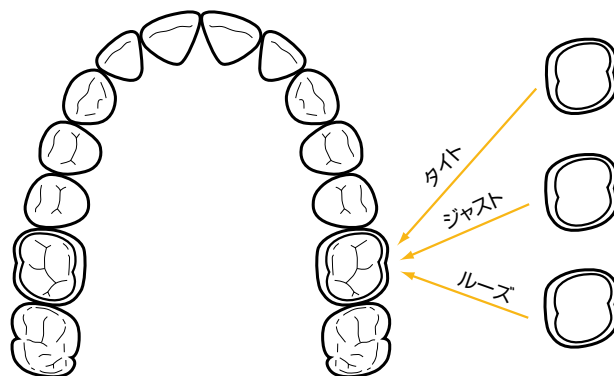

上顎大臼歯

	シングルバックルチューブ	ダブルコンバーティブルチューブ	ダブルコンバーティブルチューブ/ブラケット	トリプルバックルチューブ
バックルプレイズメント				
近遠心	チューブの近心側がバンドの近心とグループとの間にセンタリングされます。			
オクルーザル・ジンジバル	バンドの咬合面側辺縁より2mm のところにアーチスロットの位置がきます。			
リンガルプレイズメント	3D リンガルチューブ 	リンガルシース 	リンガルボタン 	ラグ/クリート
近遠心	センター	センター	センター	センター
オクルーザル・ジンジバル	歯頸部寄り	センター	センター	咬合面側にオフセット

下顎大臼歯

	シングルバックルチューブ	ツインチューブ	シングルバックルチューブ 第2大臼歯	シングルバックルチューブ ジンジバルセット
バックルプレイズメント				
近遠心	チューブの近心側がバンドの近心とグループとの間にセンタリングされます。			
オクルーザル・ジンジバル	チューブの咬合面側辺縁がバンドの咬合面側辺縁より2mm オフセットされます。			チューブの咬合面側辺縁がバンドの咬合面側辺縁とイーブンになるようセットされます。
リンガルプレイズメント	3D リンガルチューブ 	リンガルシース 	リンガルボタン 	ラグ/クリート
近遠心	センター	センター	メジアルカスプにセンタリング	ユニバーサルタイプはセンター R/L は遠心にオフセット
オクルーザル・ジンジバル	歯頸部寄り	センター	咬合面側にオフセット	咬合面側にオフセット

チューブは別売りです。詳しくは57ページ以降をご確認下さい。バンドブリウェルドサービスは行っておりません。



ツルフォームバンド大臼歯

RMO

適度な硬さ

操作性と機能性を高次元で融合させた適度な硬さは、外部からの力で変形することなく受け止め、バンド本来の性能を発揮します。

高い適合性

アノミカルデザインにより、個々の歯牙形態にフィットしやすく適合性に優れています。また、咬合面側のエッジが内側に傾斜しているため、セメントのあふれ出しを防止します。

操作性

装着に際して大変便利なシーティングラグが溶接されています。(大臼歯用バンドを除く)

パーマネントマーキング

サイズと部位が一目で確認できるパーマネントマーキングを採用(大臼歯用バンド)。エレクトロ・スクライプ処理された表示は、パーマネントマーキングになっており、オートクレーブでも表示が消えることはありません。マーキング位置につきましては弊社ウェブサイト(<https://www.jmortho.co.jp/>)をご参照ください。



※チューブは別売りです。詳しくは57ページ以降をご確認下さい。

<関連インスツルメント>

バンドシーター	TASK(シオダ)
60-800	206860028
医療機器届出番号 09B2X00010Y00058 一般	

耐熱温度: 132℃ / オートクレーブ滅菌可能
全長: 約129mm



エラストックセパレーティングブライヤー	TASK(シオダ)
60-701	206860018
医療機器届出番号 09B2X00010000139 一般	



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ダイヤモンドバンドブッシャー	TASK(シオダ)
CUTDBPHW	206850189
医療機器届出番号 09B2X00010R00009 一般	



先端部にダイヤモンドコーティングを施しているため、バンドの試適・装着時に滑りにくくなっています。

実用新案登録第3224194号



バンドリムーバー ショート	ヒューフレディ
678-208	206850013
交換チップ1/4" (6個入)	
678-014	206850773
交換チップ3/16" (6個入)	
678-036	206850776
医療機器届出番号 13B3X10195G12102 一般	

■付属
チップ1/4" 1
チップ3/16"..... 1



ツルフォームバンド大臼歯

RMO

ご案内

ツルフォームバンド大臼歯（左右共通用）は、2022年3月に販売を終了いたしました。
より解剖学的なデザインであるライト / レフトをご利用下さい。
サイズは左右共通用と互換しております。

例：B00612（左右共通用上顎大臼歯 サイズ20）はR00612（右側用）またはL00612（左側用）となります

パーマネントマーキング表示



6
上顎左側

6
上顎右側

6
下顎左側

6
下顎右側

- ※立体的な形状であり、採寸が困難なため、バンドの寸法はお答えできません。
- ※バンドサイズの表記はRMO 独自のものであり、他社との互換性はございません。
- ※1995年9月1日より、大臼歯バンドのサイズ表記が変更されております。
- ※バンドのサイズはサイズ番号に比例して大きくなります。

上顎大臼歯バンド 単品

包装：5個

サイズ	ライト	レフト
1	R00593 206350800593	L00593 206350780593
2	R00594 594	L00594 594
3	R00595 595	L00595 595
4	R00596 596	L00596 596
5	R00597 597	L00597 597
6	R00598 598	L00598 598
7	R00599 599	L00599 599
8	R00600 600	L00600 600
9	R00601 601	L00601 601
10	R00602 602	L00602 602
11	R00603 603	L00603 603
12	R00604 604	L00604 604
13	R00605 605	L00605 605
14	R00606 606	L00606 606
15	R00607 607	L00607 607
16	R00608 608	L00608 608
17	R00609 609	L00609 609
18	R00610 610	L00610 610
19	R00611 611	L00611 611
20	R00612 612	L00612 612
21	R00613 613	L00613 613
22	R00614 614	L00614 614
23	R00615 615	L00615 615
24	R00616 616	L00616 616
25	R00617 617	L00617 617
26	R00618 618	L00618 618
27	R00619 619	L00619 619
28	R00620 620	L00620 620
29	R00621 621	L00621 621
30	R00622 622	L00622 622
31	R00623 623	L00623 623
32	R00624 624	L00624 624
33	R00710 206350802710	L00710 206350782710
34	R00711 711	L00711 711
35	R00712 712	L00712 712
36	R00713 713	L00713 713



下顎大臼歯バンド 単品

包装：5個

サイズ	ライト	レフト
1	R00625 206350800625	L00625 206350780625
2	R00626 626	L00626 626
3	R00627 627	L00627 627
4	R00628 628	L00628 628
5	R00629 629	L00629 629
6	R00630 630	L00630 630
7	R00631 631	L00631 631
8	R00632 632	L00632 632
9	R00633 633	L00633 633
10	R00634 634	L00634 634
11	R00635 635	L00635 635
12	R00636 636	L00636 636
13	R00637 637	L00637 637
14	R00638 638	L00638 638
15	R00639 639	L00639 639
16	R00640 640	L00640 640
17	R00641 641	L00641 641
18	R00642 642	L00642 642
19	R00643 643	L00643 643
20	R00644 644	L00644 644
21	R00645 645	L00645 645
22	R00646 646	L00646 646
23	R00647 647	L00647 647
24	R00648 648	L00648 648
25	R00649 649	L00649 649
26	R00650 650	L00650 650
27	R00651 651	L00651 651
28	R00652 652	L00652 652
29	R00653 653	L00653 653
30	R00654 654	L00654 654
31	R00655 655	L00655 655
32	R00656 656	L00656 656
33	R00714 206350802714	L00714 206350782714
34	R00715 715	L00715 715
35	R00716 716	L00716 716
36	R00717 717	L00717 717





ツルフォームバンド小臼歯／バンドケース

RMO

ご案内 下顎第2小臼歯バンド(単品ならびにキット)は、2022年2月に販売を終了いたしました。

※立体的な形状であり、採寸が困難なため、バンドの寸法はお答えできかねます。
 ※バンドサイズの表記は RMO 独自のものであり、他社との互換性はございません。
 ※バンドサイズはアルファベット順に比例して大きくなります。

小臼歯バンド (シーティングラグ付)

ミニキット

商品番号	包装		G	G+	H	H+	I	I+	J	J+	K	K+	L	L+	M	M+	N	N+	(上顎)
上顎第1小臼歯	KS02029	16個	206850714	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

商品番号	包装		F	F+	G	G+	H	H+	I	I+	J	J+	K	K+	L	L+	M	M+	(下顎)
下顎第1小臼歯	KS02030	16個	206850715	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

販売終了



小臼歯バンド単品 (シーティングラグ付)


包装：5個

上顎第1小臼歯バンド単品

サイズ	左右共通	
G	B00319	206350364319
G+	B00320	320
H	B00926	206350386926
H+	B00927	927
I	B00546	206350368546
I+	B00547	547
J	B00277	206350360277
J+	B00278	278
K	B00279	279
K+	B00280	280
L	B00281	281
L+	B00282	282
M	B00283	283
M+	B00284	284
N	B00285	285
N+	B00286	286

下顎第1小臼歯バンド単品

サイズ	左右共通	
F	B00720	206350376720
F+	B00721	721
G	B00722	722
G+	B00723	723
H	B00724	724
H+	B00725	725
I	B00726	726
I+	B00727	727
J	B00728	728
J+	B00729	729
K	B00776	206350378776
K+	B00777	777
L	B00551	206350370551
L+	B00552	552
M	B00553	553
M+	B00554	554

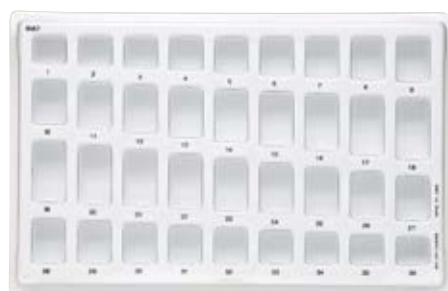

バンドケース

包装：1個

	商品番号	
大臼歯 上下顎左右共通 ^{※1}	J00750	206850769
小臼歯 上顎／下顎第1小臼歯 ^{※2}	J00770	206850975770

※1 大臼歯用バンドケースは1つのケースで36サイズ分のバンドを収納するスペースがあります。
 ツルフォームバンドは上下顎ならびに左右の別があるため、例えば上下顎両側のバンドを
 収納するためには、4個必要です。

※2 小臼歯用バンドケースは片顎につき、1個必要です。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器承認番号 15500BZY01991000 管理

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY
TREATMENT

INTRAORAL
EXTRAORAL

EXPANSION
SCREWS

I-station α

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR
SYSTEM

LABORATORY
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM
SYSTEM

COA
SOFTWARE

BOOKS

CONVERSION TABLE

換算表

長さ	
1 インチ = 25.40 ミリ	inch = .03937 × mm
1 ミリ = .03937 インチ	mm = 25.40 × inch

	ミリ	インチ
1/64"	0.04	.015625
1/32"	0.79	.03125
1/16"	1.59	.0625
1/8"	3.18	.125
1/4"	6.35	.250
3/8"	9.52	.375
1/2"	12.70	.5
5/8"	15.88	.625
3/4"	19.05	.75
7/8"	22.22	.875
1"	25.40	1.0

重さ
1 ポンド = 0.4536 キログラム
= 16 オンス
1 キログラム = 2.2046 ポンド
1 オンス = 28.35 グラム

インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ
.001	0.025	.026	0.660	.051	1.295	.076	1.930
.002	0.051	.027	0.686	.052	1.321	.077	1.956
.003	0.076	.028	0.711	.053	1.346	.078	1.981
.004	0.102	.029	0.737	.054	1.372	.079	2.007
.005	0.127	.030	0.762	.055	1.397	.080	2.032
.006	0.152	.031	0.787	.056	1.422	.081	2.057
.007	0.178	.032	0.813	.057	1.448	.082	2.083
.008	0.203	.033	0.838	.058	1.473	.083	2.108
.009	0.229	.034	0.864	.059	1.499	.084	2.134
.010	0.254	.035	0.889	.060	1.524	.085	2.159
.011	0.279	.036	0.914	.061	1.549	.086	2.184
.012	0.305	.037	0.940	.062	1.575	.087	2.210
.013	0.330	.038	0.965	.063	1.600	.088	2.235
.014	0.356	.039	0.991	.064	1.626	.089	2.261
.015	0.381	.040	1.016	.065	1.651	.090	2.286
.016	0.406	.041	1.041	.066	1.676	.091	2.311
.017	0.432	.042	1.067	.067	1.702	.092	2.337
.018	0.457	.043	1.092	.068	1.727	.093	2.362
.019	0.483	.044	1.118	.069	1.753	.094	2.388
.020	0.508	.045	1.143	.070	1.778	.095	2.413
.021	0.533	.046	1.168	.071	1.803	.096	2.438
.022	0.559	.047	1.194	.072	1.829	.097	2.464
.023	0.584	.048	1.219	.073	1.854	.098	2.489
.024	0.610	.049	1.245	.074	1.880	.099	2.515
.025	0.635	.050	1.270	.075	1.905	.100	2.540