

歯科用 矯正用リテーナー・マウスピース洗浄剤

JM ORTHO

RETAINER SHINE

リテーナーシャイン

Renewal!!

矯正用リテーナー洗浄剤「リテーナーシャイン 顆粒」が
装いも新たにリニューアルします！

2024/

12/2 MON 新発売！



商品番号	包装
RSKN	24 個入

内容量
150g
(1回 2.5g)

従来品からの変更点

1

パッケージが変わります！

デザインが変わり、ボトルごとにシュリンク包装が施されます。
シュリンク包装は汚れなどから商品を保護し、容器の開封・改ざんを防止します。
包装状態から新品（未開封）であることを確認いただけます。



従来品からの変更点

2

使い方が変わります！

従来品は水の後に洗浄剤を入れる方法でしたが、リニューアルした
リテーナーシャインは洗浄剤の後に水を入れる方法に変更します。
水を入れる時に発生する攪拌力により、
さらに素早く顆粒を溶かすことができます。

従来品



リニューアル品





従来品からの変更点

3

洗浄力アップ！

金属へのやさしさはそのままに、洗浄力がアップしました！
ステンやタバコのヤニを用いた試験において、従来品以上の洗浄力を
発揮いたしました。また、口内炎や口臭の原因菌に対しても 99.9%
の除菌力を確認いたしました。

データ提供：製造元による調査結果

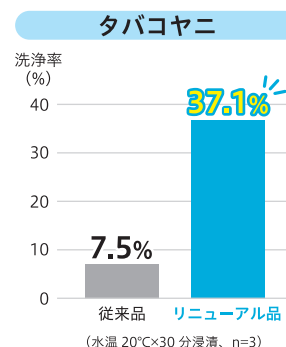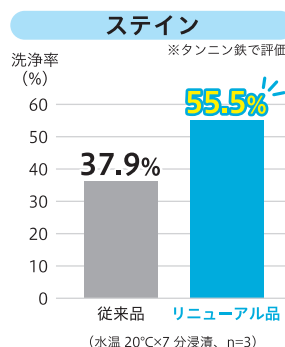

リテーナーシャインのココが良い！

早く溶け、 洗浄力発揮

リテーナーシャインは顆粒タイプですので、
水に溶けるのが早く、すぐに十分な洗浄力を発揮します。

優れた 除菌・洗浄力

活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワー！

義歯性口内炎原因菌、口臭原因菌、デンチャープラーク構成菌を
99.9%除菌します。

金属に やさしい

リテーナーシャインは従来品に引き続き、装置の金属部、特にロウ着部
に対し悪影響を及ぼすことが少なく、安心してご使用いただけます。

リテーナーシャインの使い方

1

コップに付属のスプーンで、
一杯(約2.5g)を入れた後、
水またはぬるま湯(約150ml 40℃)
を入れます。



2

水の色がブルーになりますので、
装置を入れてください。



3

水の色が薄くなってきたら(約30
分)、洗浄終了です。



4

コップから装置を取り出し流水で
よく洗った後、口腔内に装着する
か、よく乾かしてリテーナーケース
などで保管してください。
※使用後はボトルのフタを必ず閉めてください。



使い方の動画はこちら

別売 リテーナーシャイン 専用ボトルキャップ

リテーナーシャインの計量には専用のボトルキャップがおすすめです。

使い方

- 1 回さかさに傾けると 1 回分の量が出てたまります。
※最初の 1 回は計量のみで中身は出てきません
- 2 1 回分を出す度につぎの分量が計量キャップ部にたまります。



キャップ装着時本体

商品番号	包装
RSC 206850800	1 個入