


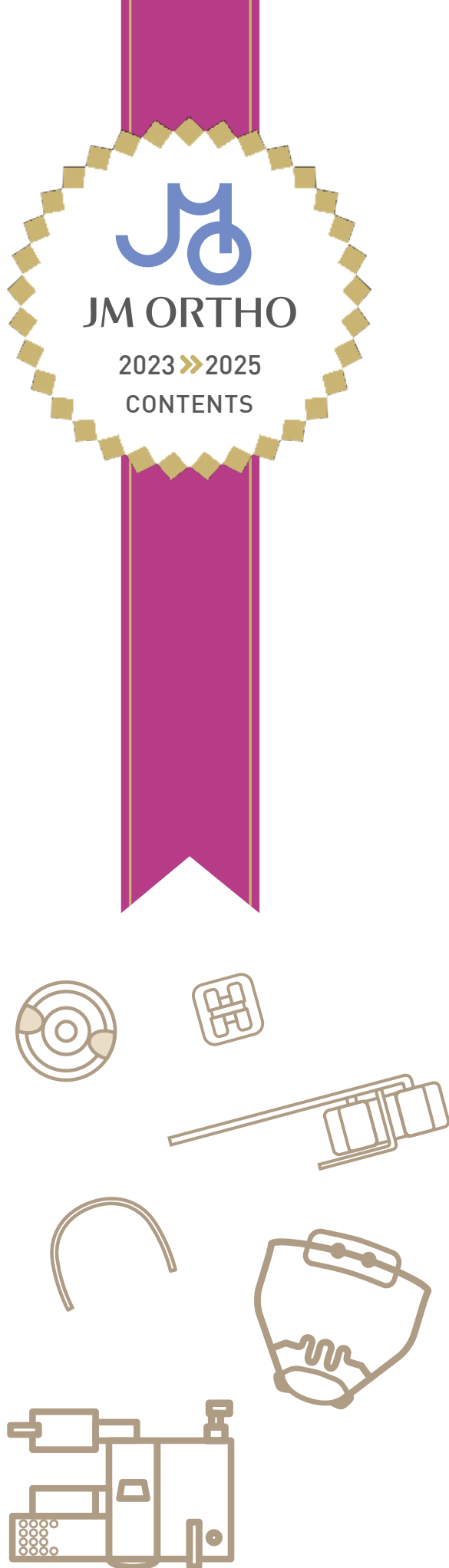

10

インスツルメント

- ケア & メンテナンス 176
- インスツルメントの主な種類と使用目的 177
- カuttingプライヤー 178
- アライナー矯正用プライヤー 181
- ユーティリティプライヤー 183
- ベンディングプライヤー 184
- ボンディングインスツルメント 187
- リガッティングインスツルメント 189
- リガッティングインスツルメント／
シンチバックインスツルメント 191
- シンチバックプライヤー／フッククリンピングプライヤー／
キャップリムービングインスツルメント 192
- バンディングインスツルメント／
オリジナルインスツルメント 193
- リムービングプライヤー／
ディボンディングプライヤー 194
- アーチターレット／コントラアングルドライバー／
金冠バサミ／メンテナンス用品 195
- ストリッピングインスツルメント／プライヤースタンド 196

〈お知らせ〉

本章掲載製品の薬事関連情報は章末にまとめて掲載しております。



ケア&メンテナンス

インスツルメントのお手入れ

ステンレススティール

ステンレススティールは耐腐食性に優れている鋼材のひとつですが、化学物質の種類、酸性濃度などの条件により変色や腐食の原因となることがあります。

超硬付インスツルメント（インサート付）

超硬部分はカーボンが多く含まれているため耐腐食性はステンレススティールと比較するとなんて低くなっています。したがって、洗浄・乾燥・滅菌等の処理を行う場合には必ずステンレススティールと分けて実施して下さい。また滅菌前には防錆剤を使用して下さい。

ジョイント付インスツルメント

洗浄・滅菌過程においてジョイント部の油膜がなくなると、金属同士の摩擦抵抗が増したり錆によりスムーズな動きを損なう恐れがあります。洗浄・乾燥・滅菌の過程では必ずジョイントを広げた状態で行い、**IMS潤滑剤**や**スムーサー**を施して下さい。

インスツルメントの洗浄と滅菌について

洗浄

流水下で洗浄して下さい。その際に、インスツルメントの突起部、刃先など鋭利な部分でケガをしないよう十分注意して行って下さい。洗浄剤を使用する場合には、低発泡性中性洗剤を使用して下さい。その際、各洗浄液の『使用上の注意』を必ずよくお読み下さい。また、ケガを防止する手段として、効率良く汚れを落とすことができる超音波洗浄をお勧めします。薬液で洗浄・消毒を行った場合には、流水で薬液を除去して下さい。

乾燥

汚れが除去できたことを確認し、器具同士が重ならないよう配慮し、乾燥させて下さい。水分が残っている場合、錆の原因になります。

滅菌

滅菌は、すべての微生物を死滅させるための工程です。代表的な熱による滅菌方法は次の通りです。

熱による滅菌方法	標準滅菌時間と温度*	利点	注意点・欠点
オートクレーブ滅菌	121℃/20分 132℃/10分	短時間で完了 蒸気の浸透性が良い	コンテナが使用できない プラスチックやシリコーンは破損しやすい ステンレス以外の器具は錆びやすい 硬水の場合、付着物が残留する
乾熱滅菌	160℃/60～120分	腐蝕性がない 滅菌後の乾燥不要 コンテナが使用できる	時間がかかる 液体自体の滅菌不可 プラスチックやシリコーンは破損しやすい 事前乾燥が必要

*滅菌時間と温度に、滅菌器のウォームアップタイプ時間は含まれていません。滅菌前にIMS潤滑スプレーやスムーサーを施して下さい。
また滅菌する器具のボリュームや特性によっても異なります。
各歯科医院内において、日常の細菌試験結果により滅菌方法を設定してください。

JM Orthoでは矯正用ホルマリンガス消毒器（ホルステリ20RM）によるインスツルメントの消毒を推奨しています。詳しくは本カタログの224ページをご参照ください。ホルステリの場合は消毒後にIMS潤滑剤スプレーを施して下さい。

その他

薬液消毒を使用する場合、条件によりステンレススティールに対して腐食の原因となる成分*が含まれている場合がありますのでご注意ください。

*次亜塩素酸ナトリウム・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・グルコン酸クロロヘキシジン・ヨードチンキ・ヨードホルム

超酸性水などの機能水による殺菌は、器具の素材を腐食させる原因となります。

水道水には、不純物が含まれている場合がありますので、滅菌・消毒には精製水を使用して下さい。

シャープニング、アライメントについて

シャープニング、アライメントの必要がある場合は、販売店にご相談下さい。



インスツルメントの主な種類と使用目的

本章掲載インスツルメントの主な種類と使用目的についてのご紹介です。

カテゴリー	主な名称	特長や使用目的	掲載ページ
カッピングブライヤー	ピンカッター マイクロカッター リガチャーカッター	先端が細く、比較的細い結紮線(リガチャーワイヤー)やエラストックなどを切断できるブライヤーです。ヘッドがコンバクトなもの、用途に合わせた角度がついているもの、パネツキのものなどもございます。	178
	ディスタルエンドカッター	ワイヤーの最遠心部を切断するために使用するブライヤーです。リンガル矯正でも使用しやすいよう長い持ち手と角度がついたタイプや、下記のような機能がついたものもございます。 ・セーフティーホールド 切断後の短いワイヤーが口腔内に飛びにくく設計されています。 ・フラッシュカット 切断時、バックルチューブの遠心側とほぼ同一面で切断できるよう設計されています。	179~180
アライナー矯正用ブライヤー	CAブライヤーシリーズ クリアコレクションシリーズ アライナーブライヤーシリーズ など	矯正用アライナーにアクチベーションを付与したり、切れ込みをいれたり、矯正用アライナーに多彩な可能性を与えるブライヤーです。目的に合わせてお選びいただけます。	180~182
ユーティリティーブライヤー	ウィンガルト(ウィンガルト) ホー(ホウ、ハウ)	その名の通り、様々な目的で使えるブライヤーで、アーチワイヤーやニューSTロック、3Dシステムなどの着脱や、ワイヤーベンディング時のワイヤーの把持など、様々な場面でご使用いただけます。	183
ベンディングブライヤー	ループフォーミング ツイードアーチ バードビーク ホローチョップ スリージョー ライトワイヤー GEAWブライヤー GMトルキングブライヤー	ワイヤーベンディングに用いるブライヤーです。アーチワイヤーに様々なループやトルクを付与するもの、アーチの形態を整えるものがあります。 その他に技工物の製作に用いるブライヤーもございます。	184~186
ボンディングインスツルメント	ブラケットプレーサー ピンセット ブーンゲージ	ブラケットやチューブを接着する際に便利なインスツルメントです。 ブラケットの接着位置を決定するゲージや、ブラケットやチューブの把持を得意とするインスツルメントなどを掲載しています。	187~188
リガッティングインスツルメント	ツイスター タイニングブライヤー モスキート 持針器 リガチャーディレクター リガチャータッカー	結紮線(リガチャーワイヤー)や結紮用Oリングなどのリガチャーモジュールを装着するときに便利なインスツルメントです。結紮線の切れ端を頬粘膜にあたらないように調整する(ディレクト)機能をもったブライヤーもございます。	189~191
シンチバックインスツルメント	シンチバックブライヤー ハンマーヘッド	アーチワイヤーがチューブから抜けてしまったり、頬粘膜に当たらないように屈曲する(シンチバック)ために使用するブライヤーです。	191~192
バンディングインスツルメント	バンドプッシャー バンドシーター カンタリングブライヤー	バンドの調整や装着に使用するブライヤーです。	193
リムービングインスツルメント	リムービングブライヤー ディボンディングブライヤー	ブラケット・チューブ・バンドの除去、そして歯面に残った接着材を除去するためのインスツルメントです。目的に合わせた形状になっており、様々な工夫が施されています。	194

その他、矯正治療中の様々な用途に合わせたインスツルメントを多数掲載しております。

カッティングプライヤー

マイクロミニピン&リガチャーカッター
ヒューフレディ



切断許容径：.012"/0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-107 206850009

ロングハンドルタイプ

679-107L 206850777107L

ミニピン&リガチャーカッター
ヒューフレディ



切断許容径：.012"/0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-106 206850008

ピン&リガチャーカッター
ヒューフレディ

比較的大きいサイズの
リガチャーワイヤーを
カットできるピン&リ
ガチャーカッターです。



切断許容径：.015"/0.38mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-105 206850007

ピン&リガチャーカッター
TASK (シオダ)



切断許容径：.016"/0.41mm

TS-15 206860021

リガチャーカッターミニチュア

YDM

丸みを帯びたヘッドデザイン

在庫限りで販売終了

全長：120mm

切断許容径：～.012"
※HARD STEEL加工

CUT001M

206860330

ピン&リガチャーカッター
TASK (シオダ)

バネ付



切断許容径：.016"/0.41mm

30-604WK 206860248

ピン&リガチャーカッター(ミニチュア)
TASK (シオダ)

バネ付



切断許容径：.016"/0.41mm

30-605WK 206860249

リガチャーカッタークラシック

TASK (シオダ)



切断許容径：～.016"

CUT001TC

206860132

リガチャーカッター15° アングルショート

TASK (シオダ)

※超硬付




全長：114mm

CUT001AT

206850191

コンパクトなアングルヘッド (15°)
とショートハンドルのデザインにより、
操作性にすぐれています。
バネ機構の採用により、
作業効率が向上します。

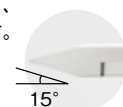

リガチャーカッターミニチュア アングル

YDM

在庫限りで販売終了

全長：125mm

切断許容径：～.012"
※HARD STEEL加工

CUT001MA

206850186

スリムマイクロカッター

ヒューフレディ

スレンダーチップにより結紮
線・エラスティック除去がよ
り容易になりました。
従来品に比べ先端の大きさを
縮小したことで、より広い
視野をとることが可能です。

オフセット15°



切断許容径：.008"～.012"/0.20mm～0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-500 206850124

マイクロカッター

ヒューフレディ

ハンドルが小さくデ
ザインされているた
め、特に手の小さい
方にお勧めします。

オフセット15°



切断許容径：.012"/0.30mm
(ソフトリガチャーワイヤー)

678-110 206850777110



カッティングプライヤー



丸みを帯びたヘッドデザイン
※先端をより鋭角に加工



全長：123mm



※先端をより鋭角に加工

CUT002S

CUT002SL

ディスタルエンドカッター スリムヘッド	YDM
CUT002S	206860331
ディスタルエンドカッター スリムヘッドロングハンドル	YDM
CUT002SL	206860332

切断許容径：ラウンド .012" ~ .020" レクト .016" x .016" ~ .021" x .025"
※スリムヘッド・スリムタイプ

全長：141mm
(ロングハンドル)

在庫限りで販売終了

ディスタルエンドカッター ヒューフレディ

セーフティーホールド機能付きでカットしたワイヤーが飛ぶことなく安全です。



切断許容径：.012" ~ .021" x .025" / 0.30mm ~ 0.53mm x 0.64mm

678-101 206850003

ロングハンドルタイプ

678-101L 206850004

ディスタルエンドカッターF&Hスリム ヒューフレディ

チューブの最遠心でワイヤーをカットできるフラッシュカットタイプで、カットしたワイヤーが飛ぶ事の無いセーフティーホールド機能付きです。

頭部が小さいので
カットポイントが見やすく
操作性に優れています。



■付属
シリコン
インサート...3

切断許容径：.012" ~ .021" x .025" / 0.30mm ~ 0.53mm x 0.64mm

678-113 206850057

交換用シリコンインサート (3個入)

678-013 206850058

ディスタルエンドセーフティーカッター TASK (シオダ)



横から見た図

切断許容径：角ワイヤー ~ .022" x .028" / 丸ワイヤー ~ .020" / ツイストワイヤー ~ .016"

30-551US 206860251

ディスタルエンドセーフティーカッター フラッシュカット TASK (シオダ)



■付属
ホールド
リング...3

切断許容径：角ワイヤー ~ .022" x .028" / ~0.56mm x 0.71mm / 丸ワイヤー ~ .020" / ~0.51mm / ツイストワイヤー ~ .021" x .025" / ~0.53mm x 0.64mm

30-550SF 206860550

ディスタルエンドセーフティーカッター・フラッシュカットタイプ(ロングハンドル) TASK (シオダ)



超硬付き

切断許容径：角ワイヤー ~ .022" x .028" / ~0.56mm x 0.71mm / 丸ワイヤー ~ .020" / ~0.51mm / ツイストワイヤー ~ .021" x .025" / ~0.53mm x 0.64mm

30-550FL 206850136

ディスタルエンドセーフティーカッター・スリム(ロングハンドルストレート) TASK (シオダ)



超硬付き

切断許容径：角ワイヤー ~ .022" x .028" / ~0.56mm x 0.71mm / 丸ワイヤー ~ .020" / ~0.51mm / ツイストワイヤー ~ .016" / ~0.41mm

30-550SLS 206860252

ディスタルエンドセーフティーカッター・スリム(ロングハンドル) TASK (シオダ)




超硬付き

切断許容径：角ワイヤー ~ .022" x .028" / ~0.56mm x 0.71mm / 丸ワイヤー ~ .020" / ~0.51mm / ツイストワイヤー ~ .016" / ~0.41mm

30-550SL 206850137

交換用ホールドリング (10個入) TASK (シオダ) 30-950 206860611

(30-550SF / 30-550FL 共用)

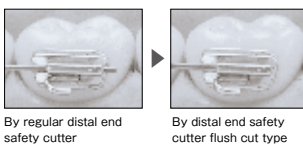

By regular distal end safety cutter

By distal end safety cutter flush cut type

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

カッティングプライヤー

ディスタルエンドセーフティカッター ノーリング TASK (シオダ)



フラッシュカットタイプ
ホールドリングの交換不要

切断許容範囲：丸ワイヤー .010"~.020" / 角ワイヤー ~ .022" x .028"

30-553

206860035

ディスタルエンドフラッシュカッターノンホールド TASK (シオダ)

*ノンホールドタイプなので
カットしたワイヤーは把持
できません。



切断許容径：ラウンド ~.020"
レクト ~.022" x .028"

CUT002TN

206860391

ディスタルエンドセーフティカッター ノーリング ロングハンドル TASK (シオダ)

30-553のロングハンドルタイプ
ハンドルに10°の角度がついています



30-554

206860388

パワーカッター TASK (シオダ)



切断許容径：1.5mm

60-004

206860007

フラットカッター TASK (シオダ)



先端部
(φ0.6~1.0mm)、
側面部
(φ1.0~1.2mm)

切断面の比較



フラットカッター

ワイヤーニッパー

- バリがなく、平ら（フラット）な断面が得られることによって、研磨処理を軽減でき、寸法調整を手早く終えることができます。
- 2箇所の切り口（先端・側面）を使い分けることで、φ1.0mmまであるいはφ1.2mmまでのフラットカットができます。
- 手が小さな方でも扱いやすいよう、ハンドル最大開口幅を狭めに設計しています。

45-020

206850138

CA®-プライヤー（熱処理不要）

ジョイデンタル

TIP1

歯間乳頭部に凹みをつけるためのプライヤーで、クリアライナー(CA)の口腔内での維持を向上させます。



5281

206360186

TIP2

トルクやローテーションのコントロールの調整時に、クリアライナー(CA)上の矯正力を与えたい部分に凹みをつけるためのプライヤーです。



5291

206360187

TIP3

楕円形の凹みをクリアライナー(CA)の切端寄りに付与し、歯間にトルクを与えます。ハンドル部のスクリューによってアクチベーション量の調節が可能です。



5292

206360194

TIP4

U字形の凹みをクリアライナー(CA)の歯頸部寄りに付与し、歯根にトルクを与えます。ハンドル部のスクリューによってアクチベーション量の調節が可能です。



5295

206360195

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



アライナー矯正用プライヤー

Clear Collection™ Instruments

クリアコレクション (Clear Collection™) シリーズは、バイオメカニクスの特徴を用いた「目立ちにくい」アライナー矯正治療を個々の患者さんに合わせ、熱処理を必要とすることなく、最適化できるよう設計された革新的なインスツルメントです。

クリアコレクション ホールパンチプライヤー ヒューフレディ

アライナーの辺縁に半月状のスペースを作り、リンガルボタンやブラケットなどを併用する際の装着位置を確保します。

先端幅
約8mm
直径6mm




678-803

206850176

クリアコレクション ペティートパンチプライヤー ヒューフレディ

アライナー辺縁で起こり得る歯間乳頭などへの干渉や刺激を緩和するトリミングにも使用することができます。

先端幅
約6.5mm
直径4.5mm

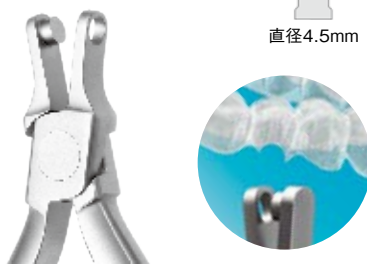

678-805

206850225

アライナープライヤー TASK (シオダ)



60-731

206860625

クリアコレクション ティアドロッププライヤー ヒューフレディ

アライナー装着中、エラスティックを牽引するための切り込みを付与します。この切り込みがあることで、患者さん自身でエラスティックを交換することが容易になります。


先端幅
約3.2mm



678-800

206850173

アライナープライヤー TASK (シオダ)

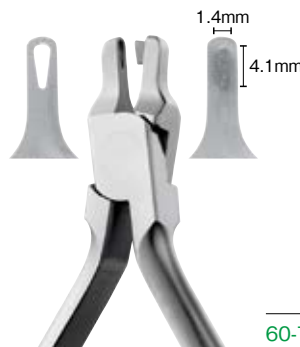

●アライナー歯頸部辺縁にエラスティックを取付ける際の涙滴状の穴を開けることができます。

60-734

206860628

アライナーアジャスターアングル (スリム) YDM



CUTAAA

206860324

アライナーアジャスター水平 (スリム) YDM



CUTAAH

206860325

アライナー類の歯牙近心や遠心側の垂直方向にアクチベーション（くぼみ）を入れることで、ローテーションコントロールを促進します。また歯頸側に水平方向のアクチベーションを入れることでルートトルクの促進も可能です。



受け側を薄くデザインしたことで、アライナー類の歯牙のより先端部に水平的アクチベーション（くぼみ）を入れることが可能になりました。歯頸側にもアクチベーションを入れることができ、トルクコントロールを促進します。



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

アライナー矯正用プライヤー

クリアコレクション パーティカル プライヤー ヒューフレディ


パーティカルプライヤーは、特定の歯牙の頬側面や舌側面、近心または遠心隅角にくぼみを作成することにより、ローテーションのオーバークレクションを調整します。また、アタッチメントのすぐ傍にくぼみを作ることによりアライナーをアタッチメントとより良くフィットさせるために使用することもできます。



678-801

206850174

アライナープライヤー TASK (シオダ)

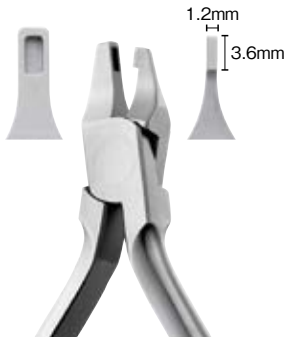

60-733

206860627

クリアコレクション ホリゾンタル プライヤー ヒューフレディ

ホリゾンタルプライヤーは、くぼみを付与して個々のルートトルクを調整します。また、アライナーを接着されたアタッチメントにしっかりと接着させるために、歯牙のアンダーカットに対して、もしくはアタッチメントの下にくぼみを作成することにより、アライナーやリテーナーの保持力を高めます。



678-802

206850175

アライナープライヤー TASK (シオダ)




60-732

206860626

クリアコレクション クロックワイズウェッジプライヤー ヒューフレディ

クロックワイズウェッジプライヤーは、特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。時計回りに回転させる際に使用されます。

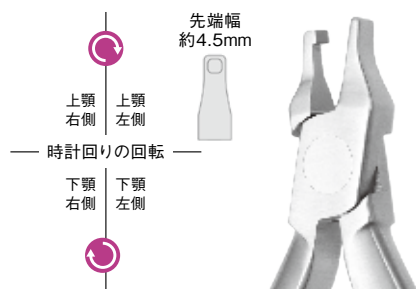


678-808

206850227

使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)

クリアコレクション カンタークロックワイズウェッジプライヤー ヒューフレディ

カンタークロックワイズウェッジプライヤーは、特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。反時計回りに回転させる際に使用されます。

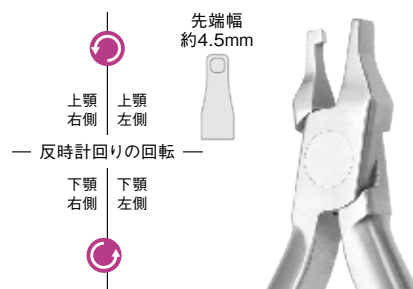


678-807

206850226

使用方法是こちらから
ご覧いただけます。
(英語)

クリアコレクション スポットプライヤー ヒューフレディ

スポットプライヤーは、小さな個々の歯牙の移動やアライナーの保持力を高める点接触を作成するために、ごく小さな丸いくぼみを付与します。一般に、わずかに「押し出す」ことのみを必要とする歯牙の移動を促進するために使用します。スポットプライヤーの小さな陥凹を歯肉鼓形空隙の近くに付与することにより、アライナーやリテーナーの保持力を高めることもできます。

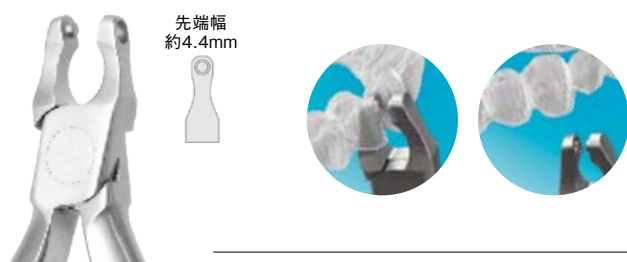


678-804

206850224

クリアコレクション イレイサープライヤー ヒューフレディ

イレイサープライヤーは、クリアコレクション(Clear Collection™)シリーズのその他のインスツルメントにより作成された不要なくぼみを元に戻す、または取り除くために設計されています。イレイサープライヤーは、意図せず陥凹が付与してしまった場合やアクセントが必要でなくなった箇所をブラッシュアップを平らにするために設計されています。

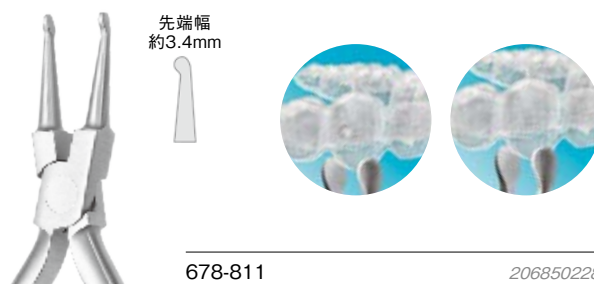

678-811

206850228

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ユーティリティープライヤー


ワインガルトユーティリティープライヤー
スリムハンドル TASK (シオダ)



CUT003T

206850188

ワインガルトユーティリティープライヤー
(ノーマル) YDM

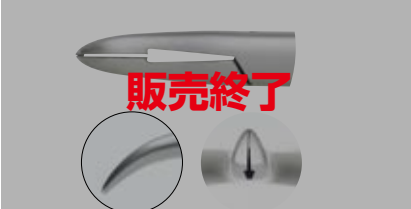

CUT003N

206860333

ユーティリティープライヤークラシック
TASK (シオダ)


ニューSTロックの適合や着脱などに
適した丈夫な形状です。



CUT003TC

206860133

ウインガートユーティリティープライヤー TASK (シオダ)

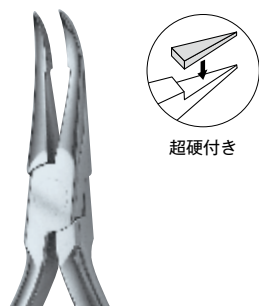


超硬付き

60-501T

206860017

ウインガートユーティリティープライヤー・スモール TASK (シオダ)

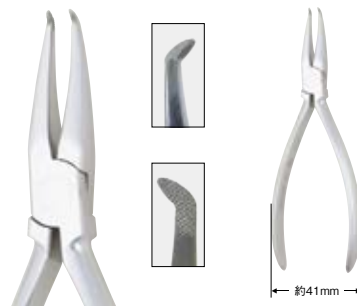

約41mm

60-504

206860257

リンガルユーティリティープライヤー(ロングハンドル) TASK (シオダ)



P-300

206860255

スリムワインガルトプライヤー
ヒューフレディ

20° アングル付



ワイヤー使用許容径：.030" / 0.76mm

678-202

206850010

ホウプライヤー TASK (シオダ)



60-306

206860253

ホープライヤー ストレート
ヒューフレディ



ワイヤー使用許容径：.030" / 0.76mm

678-203

206850011

ホープライヤー オフセット付
ヒューフレディ

舌側や届きにくい部分の作業に適した 40°
アングル付き。




ワイヤー使用許容径：.030" / 0.76mm

678-204

206850023204

ホープライヤーアングル YDM

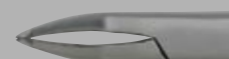

販売終了




CUT005A

206860334

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ベンディングプライヤー

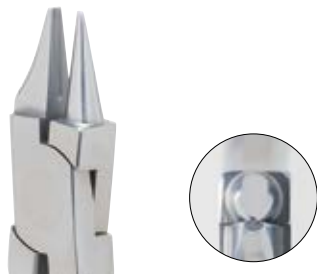ループフォーミングプライヤー(ツイード)
TASK (シオダ)


CUT007TPT

206860178

ツイードループフォーミングプライヤー
YDM※ギザなし
屈曲許容径：～.025"

CUT007

206860336

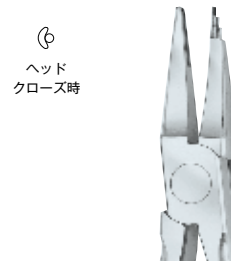ツイードループフォーミングプライヤー
TASK (シオダ)ヘッド
クローズ時

屈曲許容径：.022"/0.56mm

60-304


206860260

ループフォーミングプライヤー
TASK (シオダ)

屈曲許容径：.022"/0.56mm

60-305

206850141

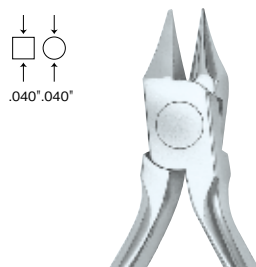バードビークプライヤー
TASK (シオダ)

.040" .040"

屈曲許容径：.032"/0.81mm

30-314T

206850134

バードビークプライヤー
ヒューフレディラウンドワイヤーのループ
成形プライヤーです。
リテーナーやクラスプ線の
屈曲に便利です。

屈曲許容径：.030"/0.76mm

678-304


206850015

バードビークプライヤー
ヒューフレディテーパータイプで、
多様なループを成形できます。

屈曲許容径：.022"×.025"/0.56mm×0.64mm

678-326

206850023326

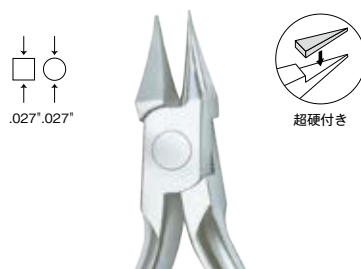ライトワイヤープライヤー
TASK (シオダ)

.027" .027"

屈曲許容径：.020"/0.50mm


30-316T

206860003

超硬付き

ライトワイヤープライヤー(カッター付き)
YDM

丸みを帯びたヘッドデザイン

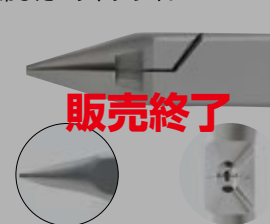

販売終了

※HARD STEEL加工
屈曲許容径：～.025"

CUT008C


206860337

ヤングプライヤー
TASK (シオダ)

屈曲許容径：.040"/1.02mm

60-074


206860008

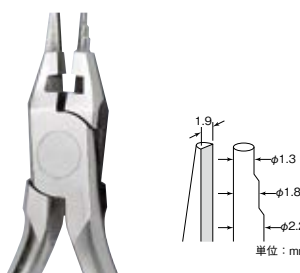キムプライヤー カッター付き
TASK (シオダ)

屈曲許容径：角ワイヤー.016"×.022"/0.41mm×0.56mm

60-430CK

206850144

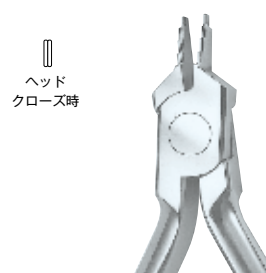ナンスクロージングループプライヤー
TASK (シオダ)ヘッド
クローズ時

屈曲許容径：.022"/0.56mm

60-302

206860011


※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ベンディングプライヤー

パーティカルループ&ステップバンドプライヤー(GEAWプライヤー) TASK (シオダ)

パーティカルループ&ステップバンドプライヤーはGEAW systemを達成させるために考案されたGUMMETALワイヤー専用の屈曲プライヤーです。それぞれのプライヤーでShort FormとRegular Formの高さが違うので、組み合わせることで1mm～3mm刻みでステップの差をつけることができます。

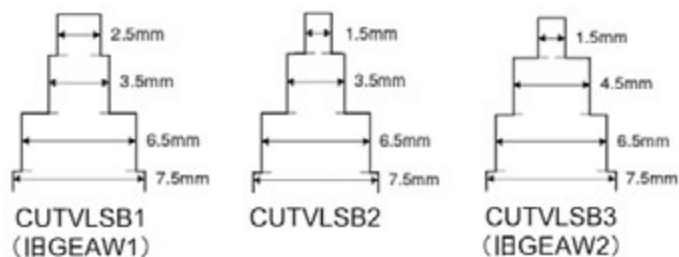

CUTVLSB1



CUTVLSB2




CUTVLSB3

※写真は実寸大ではありません。

CUTVLSB1	206860126
CUTVLSB2	206860690
CUTVLSB3	206860411



Short FormとRegular Formの形態 (例: CUTVLSB1)
一段目で屈曲されるパーティカルループをShort Form (2.5mm)、二段目で屈曲されるパーティカルループをRegular Form (3.5mm) と呼ぶ。

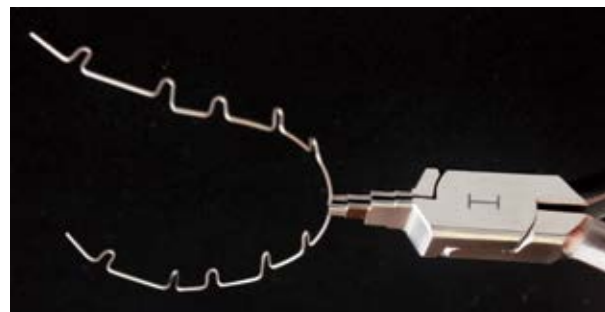

機能的咬合構築を目指す 不正咬合の矯正治療



著者 佐藤貞雄 白数明義
出版社 株式会社第一歯科出版
出版年 2014年
サイズ/ページ A4判変型 240ページ
商品番号 DSP001 208660000



GMトルキングプライヤー

TASK (シオダ)

GMTP2

206850814

ツイードのアーチベンディング
プライヤーを横に倒した形で目
安となる20度の口角が使いや
すさを演出します。

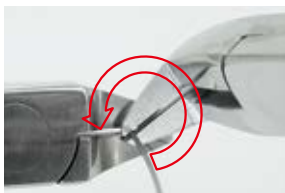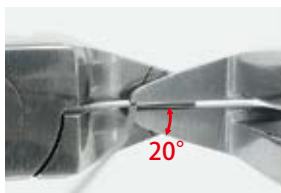

GUMMETALベンダー

TASK (シオダ)

CUTGMB

206850653



溝の部分にゴムメタルフロッシュやゴムメ
タルストレート(巻線)に沿わせ、微調整を
することができます。
刃のエッジに丸みがあるため、ゴムメタル
を傷つけにくくなっています。

ベンディングプライヤー

トルクインディケートアーチベンダー TASK(シオダ)

ブレード厚み
1.2mm

20°~60°



アーチベンディング
プライヤーと併用



屈曲許容径：~.025"

CUT006T

206860144

ツイードアーチベンディングプライヤー TASK(シオダ)



屈曲許容径：.022"×.028"/0.56mm×0.71mm

60-303

206860012

ホローチョッププライヤー TASK(シオダ)

7.0mm



屈曲許容径：.022"/0.56mm

60-006

206850139

Vストッププライヤー

ヒューフレディ

アーチワイヤーにVバンドを付与するためのプライヤーです。




屈曲許容径：.022"×.025"/0.56mm×0.64mm

678-321

206850023321

ストッププライヤー(Vバンド) TASK(シオダ)

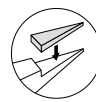

超硬付き




60-224T

206860039


ステッププライヤー

TASK(シオダ)

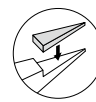

超硬付き

- ハンマーヘッドタイプ
- ステップ幅は1.0mm

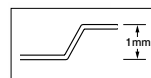

屈曲許容径：.022"×.028"

60-228

206860038

NiTiベンダー

ヒューフレディ

NiTiワイヤーがまるでステンレスワイヤーのようにベンディングできます。通常NiTiワイヤーはNiTiワイヤー特有の復元力で元に戻ろうとする力が働きますが、NiTiベンダーを使用すれば120度以上の角度のベンディングが可能になります。(注：ワイヤーサイズによって角度は異なります。)



屈曲許容径：.020"/0.51mm

678-322

206850023322

スリージョープライヤー

TASK(シオダ)

ヘッド
クローズ時



屈曲許容径：.028"/0.71mm

60-313

206860016

ヘビースリージョープライヤー

TASK(シオダ)



屈曲許容径：.036"/0.9mm

60-313L

206850142

アングルドスリージョープライヤー 右 TASK(シオダ)



屈曲許容径：.036"/0.9mm

60-201R

206860024

アングルドスリージョープライヤー 左 TASK(シオダ)




屈曲許容径：.036"/0.9mm

60-201L

206860025

ヘッドギアプライヤー TASK(シオダ)

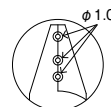

屈曲許容径：.051"/1.3mm

60-009

206850140

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



ボンディングインスツルメント

ブーンブラケットポジショニング ゲージ TASK(シオダ)



ポジショニングハイト：
3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm
60-830 206860019

HASEGAWAゲージ



近遠心の辺縁隆線を結んだラインから一定の高さにスロットの位置を決め、ブラケットポジショニングを行います。近遠心の辺縁隆線に対して平行にポジショニングするため、アンギュレーションが自動的に決まります。


HBPG

フジデンタル

小白歯用



大白歯用

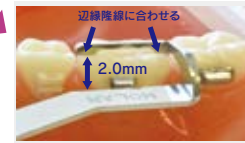

※板の厚さは1.0mmです

臼歯部において辺縁隆線の近遠心を基準に最適なブラケットポジションを測定するためのインスツルメントです。

ブラケットプレーサー TASK(シオダ)

BP1 206860407



ユーティリティツイザー Type II

CUTUT2 206850190

TASK(シオダ)



ブラケットをポジショニングする時やセルフライゲータリングブラケット(特にリンガル)開閉時のワイヤーディレクトに便利です。



ワイヤーをしっかりと把持しトルクを効かせます。



ネジの調整で様々なブラケット幅に対応します。

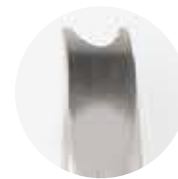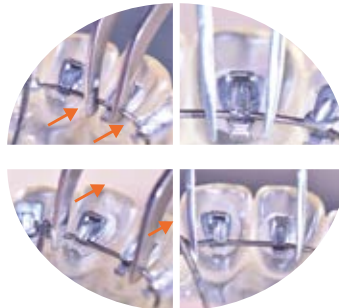

セルフライゲータリングブラケットの蓋のオープナーとして使用できます。



ブラケットプレーシングツイザー TASK(シオダ)

TASK(シオダ)

先端が細い設計になっています。



60-824

206860036

スリムダイレクトボンドブラケットツイザー ヒューフレディ

ヒューフレディ



678-504



678-504

206850128

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ボンディングインスツルメント

ブラケットポジショニングツイザー

TASK (シオダ)



全長：189mm

GMP7

206850579

時計など精密機械用として使用されている#7 ピンセットの形をそのままに、歯科用に柄を長くして持ちやすく、使いやすくなりました。



先端が細くブラケットのウィングを把持したり、チューブの穴に差し込んで使用することができます。

ダイヤモンドピンセット

TASK(シオダ)



08275

206850133

ユーティリティードレッシングブライヤー

ヒューフレディ



DPU17

206850783

ブラケット セッティング ツイザー

TASK(シオダ)



60-890

206850146

WAKEYAMAツイザー

TASK (シオダ)

CUT000T

206850187



後端を上げるとき

後端を下げるとき



タングステンコーティングヘッド 滑りにくく、しっかり押しつける事が可能です。チューブのポジショニングに最適です。



角度は20°

ブレード

ブラケット
ポジショニングも
有です。

厚さは.014"



プレジジョンチューブツイザー TC付

TASK (シオダ)

CUTPTT2

206860436



先端の片側を .018"×.025" スロットに挿入できます

全長：127mm

スリムバカルチューブボンダーツイザー

ヒューフレディ

678-505

206850129



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。




リガッティングインスツルメント

リガチャーツイスター	カンノ
LT	206850796




リガッティング&ディレクター	TASK (シオダ)
----------------	------------

ピンあり 60-817	206860029
ピン無し 60-817N	206860143

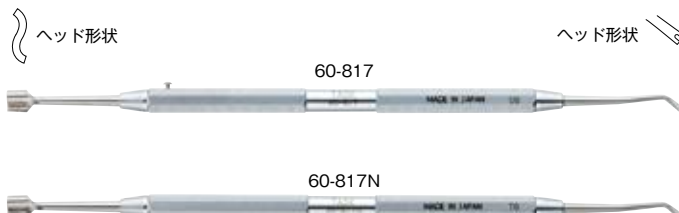

リガチャータイニングプライヤー	TASK (シオダ)
-----------------	------------

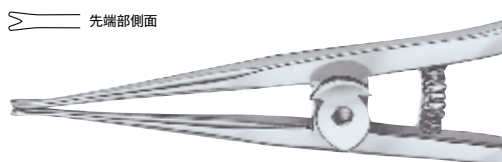

60-102	206860273
--------	-----------

リガチャータイニングプライヤー	ヒューフレディ
クーンタイプ、リガチャーワイヤー結紮用です。	



ワイヤー使用許容径：.015"/0.38mm	
678-211	206850024

クイックリガチャープレーサー	JM Ortho
----------------	----------




NK1	206350747
-----	-----------

結紮用O-リングをブラケットに装着するための専用インスツルメントです。反対側のV字カットの入った先端は、結紮の微調整やO-リングの除去などにお使いください。




エラスティックブレーシングプライヤー・フック付き	TASK (シオダ)
--------------------------	------------

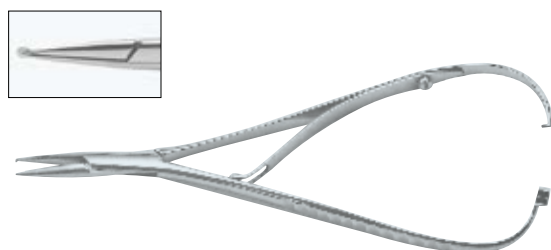

60-216	206850153
--------	-----------

エラスティックブレーシングプライヤー	TASK (シオダ)
--------------------	------------

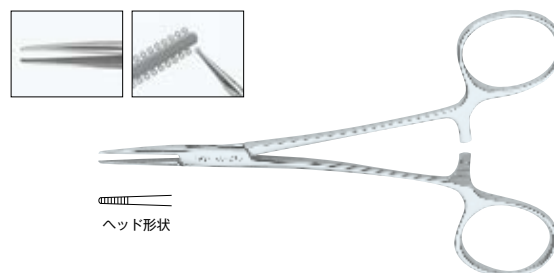

60-218	206850154
--------	-----------

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

リガティングインスツルメント

モスキートスリムストレート

フジデンタル

先端をスリムに加工




CUTMSS

206850908

モスキートスリムアングル

フジデンタル

先端をスリムに加工

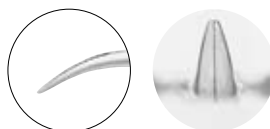

CUTMSA

206850183

スマハスリムストレート

YDM

エラスティックリガチャーの結紮が容易

先端をスリムに加工



ハンドルの開閉がスムーズです

CUTSSS

206850909

スマハスリムアングル

YDM

リングルでの使用に推奨

先端をスリムに加工



ハンドルの開閉がスムーズです

CUTSSA

206850184

在庫限りで販売終了

モスキート ヘモスタット

ヒューフレディ

(Marcotte)



H4

206850025

マチュータイプ

TASK(シオダ)



ヘッド形状

N-215

206860274

SHダイヤモンドディレクター

フジデンタル



SHDD (ポイントS1個入)

206850897

交換用ポイントS (3本入)

206850898

SHDDPS

交換用ポイントM (3本入)

206850906

SHDDPM



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



リガティングインスツルメント／シンチバックインスツルメント

リガチャーディレクター

ヒューフレディ



LDG2

206850785LDG2

使用許容径：～.015"/0.38mm

リンガル リガチャー ディレクター

ヒューフレディ



678-706

206850171

ワイヤー使用許容径：.021"×.025"/0.53×0.64mm

NOMURA リンガルディレクター 018/025

YDM

CUTNLD018

CUTNLD025

CUTNLD018 (桜)

206860000

CUTNLD025 (唐草)

206860340

販売終了

.018"

.025"

先端は角を落として口腔内に優しい仕上げに加工

.025"

.018"

舌側面からのディレクト

咬合面からのディレクト

シンチバック

ブラケットオープナー

TASK(シオダ)

60-827

206850196

- 両先端部には滑り止め加工を施しており、リガチャーワイヤーをしっかりと押し込むことができます。
- 探針形状の先端は、セルフライゲーションブラケットの開閉にもお使いいただけます。



60-827

全長 約 162 mm



ディスタルシンチバックハンドインスツルメント

ヒューフレディ



屈曲許容径：.021"×.025"/0.53mm×0.64mm

678-506

206850130

スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー

ヒューフレディ

NiTiワイヤーを熱処理せずに曲げることができます。



屈曲許容径：.025"/0.64mm

678-502

206850126

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

シンチバックプライヤー／フッククリンピングプライヤー／キャップリムービングインスツルメント



シンチバックプライヤー For Ni-Ti

TASK (シオダ)

屈曲許容径：～.016" ×.022"

NiTiワイヤー専用

※イメージ

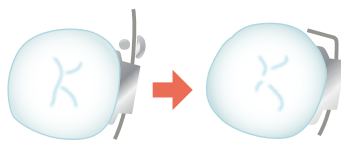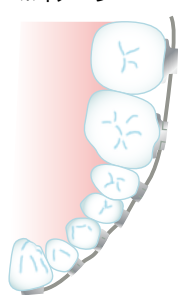

ギザギザ加工



スリムに加工



ハンマーヘッドタイプ



使用方法是こちから
ご覧いただけます。

CUTNTCBDN

206860406

- 左右のヘッドとハンドルの握り方を
変えれば、上下顎、左右側でも歯頸、
舌側方向にシンチバックできます。

マルチクリンピングプライヤー

TASK (シオダ)

先端にある4つのピークでフックをワイヤーに圧接します。

この上下4つのピークで圧接する構造が、ワイヤーの変形や歪みを軽減します。

従来品は、設計上、一定方向からの圧接しかできませんが、本商品は上下を気にすることなく、圧接することが可能です。



Ni-Ti, GUMMETAL 用




* ステンレス、コバルトクロム
ワイヤーには使用できません

CUTMCDN


206860131

フッククリンピングプライヤー

TASK (シオダ)

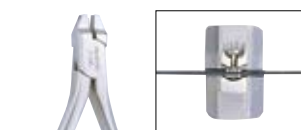

圧接機構 (正面)

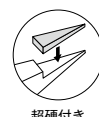

超硬付き

P-220

206860270

コンバーチブルキャップリムービングプライヤー

TASK (シオダ)



交換用チップ



交換用レンチ



刃先をバックルチューブ近心
のスロットに挿入。



そのままの状態ではンドルを
ゆっくりと握ると刃先がスロ
ット方向にスライドし、キャ
ップが容易に剥がれて撤去で
きます。

60-105 本体 206860622

60-960 交換チップ (5枚入り) 206860629

60-961 チップ交換用レンチ1.3mm (1本入) 206860630

※本体 (60-105) には交換チップ1枚と交換用レンチ1本が付属
しています。

キャップリムーバブルインスツルメント

RMO

i00557 本体・交換ブレード 206350623

i00559 交換ブレード (5枚入) 206350624




■付属
ブレード……………10枚

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



バンディングインスツルメント／オリジナルインスツルメント

エラスティックセパレーティングブライヤー TASK (シオダ)

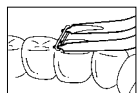

60-701

206860018

モジュールセパレーティングブライヤー ヒューフレディ

歯間分離用モジュール
装着用です。



678-210

206850014

バンドコンタリングブライヤー TASK (シオダ)



60-208

206860010

バンドシーター

TASK(シオダ)

60-800

206860028

耐熱温度：132℃／オートクレーブ滅菌可能
全長：約129mm



ダイヤモンドバンドブッシャー

TASK(シオダ)

CUTDBPHW

206850189



コーティング
なし



ダイヤモンド
コーティングあり

先端部にダイヤモンドコーティング
を施しているため、バンドの試適・
装着時に滑りにくなっています。



実用新案登録第3224194号

バンドブッシャー TASK(シオダ)

60-810

206850155



バンドブッシャー・三角ハンドル TASK(シオダ)

60-811

206850157



バンドブッシャー・シリコンハンドル TASK(シオダ)

60-810A

206850156



バンドブッシャー／スケーラー ヒューフレディ

BPS2

206850782



3Dシステム専用インスツルメント 3Dリムーバー

YDM

3DRP

206860239

使用方法是こちら



3Dリングアーチや3Dクッドヘ
リックスなど、このインスツルメント
“1本”で撤去可能です。
先端部の厚みや滑りにくいラバーハン
ドルなど術者にやさしいデザインです。

3Dアジャスタブルブライヤー TASK (シオダ)



3DP

206850734

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

リムービングプライヤー／ディボンディングプライヤー

ブラケットリムービング プライヤー

TASK(シオダ)



206860031



●刃先がブラケットベース下部と接着歯面の間に入り込む設計です。刃先は、ブラケット側面への接触ではなく、ブラケットの角2点への接触ですから、抵抗が少なく容易にコントロールできます。

P-200

ブラケットリムーバー

ヒューフレディ

メタル、プラスチック、セラミック等すべての素材のブラケットのディボンディングに適しています。




678-219

206850023219

ダイレクトボンドアタッチメントリムービング
プライヤーアングル

TASK(シオダ)

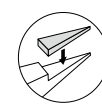

超硬付き

TS-26

206860277

ブラケットリムーバーアングル付
ヒューフレディ

アングル付きで特に臼歯部のブラケットのディボンディングに適しています。



678-220L

206850023220L

リンガル ディボンディング プライヤー

ヒューフレディ

舌側矯正用のブラケットの取り外しに適しています。独特なデザインにより、患者さんの快適性を損なうことなく、矯正装置を素早くディボンディングできます。



もう一方のくさび型アームをブラケットの歯面の接着境界に差し込むようにしながら、タイウィングの下にアームのフックをひっかけます。プライヤーを握ると、くさび型アームが歯牙の舌側面に挿入され、ブラケットを剥離します。

ディボンディングプライヤーの一方のフック型アームが舌側のブラケット下部に届くようにあてます。

678-709

206860413

アドヒーズリムービングプライヤー
ヒューフレディ

ブラケットディボンディング後の歯面に残った接着材除去用プライヤーです。



■付属
ブレード 1
チップ1/4" 1
交換用
ヘックスレンチ 1

678-206

206850012

交換ブレード、ヘックスレンチ (各1本入)

678-001

2068500772

交換チップ1/4" (6個入)


678-014A

2068500775

交換用ブレード、交換チップと交換用のヘックスレンチは678-206に付属しています。

ボンドリムービングプライヤー

TASK(シオダ)

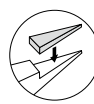

超硬付き

P-210

206860282

交換用ピークチップ (3個入)

60-983

206860279

交換用超硬チップ (1個入)

P-211

206860283

チップ交換用六角レンチ (1個入)

60-971

206860284

リンガルボンドリムービングプライヤー
TASK(シオダ)

超硬付き

■付属
ピークチップ 1
臼歯用チップ 1
交換用六角レンチ 1

(KommonBase™) 臼歯用

P-700

206860285

交換用ピークチップ (3個入)

60-983

206860279

(KommonBase™) 臼歯用 交換用チップ (1個入)

P-701

206860286

チップ交換用六角レンチ (1個入)

60-971

206860284

臼歯用バンドリムービングプライヤー
TASK(シオダ)

■付属
アルミチップ...1

60-104

206860009

交換用アルミチップ (3個入)

60-986

206860020

バンドリムーバー ショート
ヒューフレディ

臼歯バンド撤去用です。



■付属
チップ1/4" 1
チップ3/16" 1

678-208

206850013

交換チップ1/4" (6個入)

678-014

2068500773

交換チップ3/16" (6個入)

678-036

2068500776

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



アーチャーレット／コントラアングルドライバー／金冠バサミ／メンテナンス用品

ゴムメタルアーチャーレット

TASK(シオダ)

ゴムメタルワイヤーのターレットとしてだけでなく、10°、20°の溝を設けているので、ゴムメタルワイヤーにトルクを付与するツールとしてもお使いいただけます。



CUTGMAT

206860695

ゴムメタルアーチャーレットZERO TASK(シオダ)

ゴムメタルのアーチフォーミングに使用するターレットで、トルクは全て0°です。



(スロットサイズ)
.016"×.022"/.017"×.022"/.017"×.025"/.018"×.022"
/.018"×.025"/.019"×.025"/.021"×.025"

CUTGMATZ

206860180

スタンダードアーチャーレット TASK(シオダ)



CUTPTAT

206860179

トルクコントロール(手動式コントラアングルドライバー)

クロスフィールド



トルク設定の変更は
後端のダイヤルを回すだけです。

一体型で7種類の締め付けトルク

7種類のトルク値 10/15/20/25/30/32/35N・cmが
1本で可能

軽量=135g 小径ヘッド(高さ=11.35mm/径=9.2mm)

●機能

トルクコントロールは10~35N・cmの間で設定されたトルク値を超えると、クラッチが空回りしてスクリューに力が伝わらなくなります。

●操作性

100°のヘッドはスクリューへの到達を容易にします。
135℃オートクレーブが可能、メンテナンスも簡単です。

※滅菌の際は必ず滅菌バッグを使用してください。

※消毒液に浸漬しないでください。

ISTTC01

スムーサー(防錆・潤滑・シャープニングオイル) TASK(シオダ)



IMS潤滑スプレー

ヒューフレディ



IMS潤滑スプレー

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

スロットサイズ	トルク	代表的な使用例
.017"×.022"	0°	アーチフォームの屈曲
.018"×.022"	0°	アーチフォームの屈曲
.017"×.022"	10°	前歯部トルクの屈曲
.018"×.022"	10°	前歯部トルクの屈曲
.019"×.025"	10°	前歯部トルクの屈曲
.017"×.025"	20°	前歯部トルクの屈曲
.018"×.025"	20°	前歯部トルクの屈曲
.019"×.025"	20°	前歯部トルクの屈曲

注意事項:

1. ゴムメタルワイヤー以外のワイヤーには使用しないで下さい。
2. ゴムメタルワイヤーは、他のワイヤーと異なり超弾性的性質を有するため、各スロットに表示しているトルク角は各ワイヤーサイズにおける100%のトルク角の屈曲が得にくいことがあります。本来のワイヤーサイズよりも大きいサイズのスロットを選択し、スロット内のがたつきを利用して、強めのトルクを屈曲することも可能です。

アーチャーレット TASK(シオダ)



.016"/.017"/.018"/.019"/.021"/.022"/

60-841

206860268

リンガルアーチャーレット TASK(シオダ)



60-850

206860269



●芯棒にもワイヤーサイズとトルクが刻印されています。

・サイドバーを付与し、従来品より曲げやすくなりました。

・ステンレス製の芯棒にワイヤーサイズとトルクを刻印し目で分かりやすくなりました。

金冠バサミ 直・曲 TASK(シオダ)

直

曲



直 S-210

206860290

曲 S-211

206860291

金冠バサミ 曲 TASK(シオダ)



S-611

206860292

内容量	商品番号
スムーサー 40mL	19100

206860646


シャープニングやインスツルメントの防錆、潤滑にご使用いただけます。ジョイント部を有するプライヤー(鉗子)、持針器、ハサミなどにはオートクレーブ滅菌前に少量塗布してください。錆の発生を抑制するだけでなく、動きも軽くなり、器具の寿命が向上します。

内容量	商品番号
IMS潤滑スプレー 236mL	ILS

206850158

IMS潤滑スプレー(ILS)はヒンジ部の動きをスムーズにします。IMS潤滑スプレーにはシリコンは含まれていません。

ストリッピングインスツルメント／プライヤースタンド

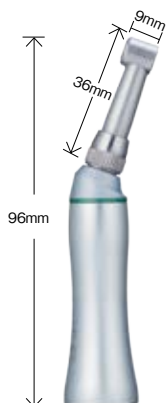

ストリッピング コントラアングル(TASK STR-50VT)

TASK(シオダ)

●ストリッピング専用のコントラアングルハンドピース

●信頼の日本国内生産・低振動・低ノイズ

※ストリッピングバーは別売りとなっております。

〈製品特長〉

・上下運動タイプ（減速4：1）

・ストローク幅：約1.3mm

・各メーカーのEVAシステム用ストリッピングツール対応

・オートクレープ滅菌（135℃）対応

・JIS T5904：1933（ISO3964：1982）形式モーターに接続対応しております。

ヘッド直径8.0mm

74920

206860635

医療機器認証番号 225ALBZX00008000 管理/特管



オートストリッピングバー

TASK(シオダ)

- ・ブレード両面にダイヤモンド粒子をコーティングしてあります。
- ・付与されたホイールは、目詰まりや発熱を抑制する効果があります。
- ・ブレードが脱落しないように、留め金は堅牢設計になっております。

両面

ダイヤモンド粒子
ブレード厚15 μm
0.08mm25 μm
0.12mm40 μm
0.15mm60 μm
0.19mm90 μm
0.29mm

単品

ダイヤモンド粒子	包装	商品番号	
15 μm	3	74931	206860637
25 μm	3	74932	206860638
40 μm	3	74933	206860639
60 μm	3	74934	206860640
90 μm	3	74935	206860641



片面L

片面R

		包装	商品番号	
片面Lセット	各種1枚(計5枚)		74981	206860434
単品	厚さ(mm)	包装	商品番号	
15μm	0.06	3	74961	206860448
25μm	0.08	3	74962	206860449
40μm	0.10	3	74963	206860450
60μm	0.14	3	74964	206860451
90μm	0.17	3	74965	206860452

包装		商品番号	
片面Rセット	各種1枚(計5枚)	74982	206860435

単品	厚さ (mm)	包装	商品番号	
15 μm	0.06	3	74971	206860453
25 μm	0.08	3	74972	206860454
40 μm	0.10	3	74973	206860455
60 μm	0.14	3	74974	206860456
90 μm	0.17	3	74975	206860457

オートストリッピングバースタンド(15本立) TASK(シオダ)



縦50mm×横50mm×高さ45mm

74912

206860464

オートストリッピングプッシュボタン TASK(シオダ)



74913

206860465

オートストリッピングゲージ TASK(シオダ)



(0.1mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm)

74911

206860463

プライヤースタンド TASK(シオダ)

プライヤーを6～8本掛けることができます。

※プライヤーのサイズにより、掛けられる本数は異なります。



19741

206860293

プライヤースタンド Aタイプ RMO Europe



寸法：250×95×110mm

ECM0822

206850575

プライヤースタンド Bタイプ RMO Europe



寸法：120×105mm

ECJ0450

206850572

プライヤースタンド Cタイプ RMO Europe



寸法：120×105mm

ECJ0451

206850573

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

インスツルメント章 薬事番号一覧

本章で掲載しておりますインスツルメントのうち、医療機器として医療機器認証 / 届出番号を取得している商品の薬事情報を、商品番号順にて一覧にしております。
電子添文等につきましては、弊社ウェブサイトまたは PMDA の電子添文検索にてご確認ください。
製造販売業者の所在地につきましては、本カタログ7ページに記載しております。

商品番号	販売名	一般の名称	医療機器承認 / 認証 / 届出番号	医療機器分類	製造販売業者名
08275	ダイヤモンドピンセット	歯科治療用ピンセット	09B2X00010000005	一般医療機器	株式会社シノダ
30-314T	バードビークブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000122	一般医療機器	株式会社シノダ
30-316T	ライトワイヤーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000123	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550FL	ディスタルエンドセーフティカッター(フラッシュカットタイプ ロングハンドル)	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000331	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550SF	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550SL	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-550SLS	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-551US	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-553	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-554	ディスタルエンドセーフティカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000094	一般医療機器	株式会社シノダ
30-604WK	ピン&リガチャーカー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シノダ
30-605WK	ピン&リガチャーカー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シノダ
3DP	3D アジャスタブルブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00003	一般医療機器	株式会社シノダ
3DRP	スリーディーリムバー 3DRP	歯科矯正用結さつ器	11B1X1000658D215	一般医療機器	株式会社 YDM
45020	フラットカッター	歯科技工用鉗子	09B2X00010000102	一般医療機器	株式会社シノダ
5281	CA ブライヤー	歯科技工用鉗子	13B2X00107000A29	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
5291	CA ブライヤー	歯科技工用鉗子	13B2X00107000A29	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
5292	CA ブライヤー	歯科技工用鉗子	13B2X00107000A29	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
5295	CA ブライヤー	歯科技工用鉗子	13B2X00107000A29	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
60-004	パワーカッター	歯科技工用鉗子	09B2X00010000100	一般医療機器	株式会社シノダ
60-006	ホローチョップブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000133	一般医療機器	株式会社シノダ
60-009	ヘッドギアブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000125	一般医療機器	株式会社シノダ
60-074	ヤングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000114	一般医療機器	株式会社シノダ
60-102	リガチャータイニングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000142	一般医療機器	株式会社シノダ
60-104	臼歯用バンドリムーピングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000135	一般医療機器	株式会社シノダ
60-105	コンバーチブルキャップリムーピングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000363	一般医療機器	株式会社シノダ
60-201R、L	アングルドスリージョーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000131	一般医療機器	株式会社シノダ
60-208	バンドコンタリングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000136	一般医療機器	株式会社シノダ
60-216	エラストックプレッシングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000144	一般医療機器	株式会社シノダ
60-218	エラストックプレッシングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000144	一般医療機器	株式会社シノダ
60-224T	ストップブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000128	一般医療機器	株式会社シノダ
60-228	ステップブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000361	一般医療機器	株式会社シノダ
60-302	ナンスクロージングループブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000120	一般医療機器	株式会社シノダ
60-303	ツイードアーチベンディングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000121	一般医療機器	株式会社シノダ
60-304	ツイードループフォーミングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000117	一般医療機器	株式会社シノダ
60-305	ループフォーミングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000116	一般医療機器	株式会社シノダ
60-306	ホウブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000112	一般医療機器	株式会社シノダ
60-313	スリージョーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000126	一般医療機器	株式会社シノダ
60-313L	スリージョーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000126	一般医療機器	株式会社シノダ
60-430CK	キムブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000119	一般医療機器	株式会社シノダ
60-501T	ウイングートユーティリティブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000544	一般医療機器	株式会社シノダ
60-504	ウイングートユーティリティブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000544	一般医療機器	株式会社シノダ
60-701	エラストックセパレーティングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000139	一般医療機器	株式会社シノダ
60-731	アライナーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-732	アライナーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-733	アライナーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-734	アライナーブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000362	一般医療機器	株式会社シノダ
60-800	バンドジューター	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010Y00058	一般医療機器	株式会社シノダ
60-810	バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010000211	一般医療機器	株式会社シノダ
60-810A	バンドブッシャー シリコンハンドル 60 - 810A	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010000788	一般医療機器	株式会社シノダ
60-811	バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010000211	一般医療機器	株式会社シノダ
60-817、817N	リガティング&ディレクター	歯科矯正用結さつ器	09B2X00010000148	一般医療機器	株式会社シノダ
60-824	ブラケットプレッシングツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000140	一般医療機器	株式会社シノダ
60-827	ブラケットオープナー	歯科矯正用結さつ器	09B2X00010000375	一般医療機器	株式会社シノダ
60-830	ブーンブラケットポジショニングゲージ	歯列矯正用位置測定器具	09B2X00010000141	一般医療機器	株式会社シノダ
60-890	ブラケットセッティングツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000075	一般医療機器	株式会社シノダ
678-101	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-101L	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-105	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-106	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-107	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-107L	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-110	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-113	ブライヤー (緩衝材付)	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12102	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-202	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-203	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-204	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-206	ブライヤー (緩衝材付)	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12102	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-208	ブライヤー (緩衝材付)	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12102	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-210	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-211	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-219	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-220L	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY TREATMENT

INTRAPAL
EXTRAORAL

EXPANSION
SCREWS

I-station α

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR
SYSTEM

LABORATORY
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM
SYSTEM

COA
SOFTWARE

BOOKS

商品番号	販売名	一般の名称	医療機器承認 / 認証 / 届出番号	医療機器分類	製造販売業者名
678-304	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-321	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-322	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-326	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-500	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-502	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-504	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-505	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-506	ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10195G35101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-706	ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10195G35101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-709	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-800	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-801	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-802	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-803	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-804	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-805	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-807	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-808	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
678-811	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
74-920	ストリップングコントラアングル	ストレート・ギアードアングルハンドピース	225ALBZX00008000	管理医療機器 / 特管	中村デンタル株式会社
74-930 ～ 935	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
74-961 ～ 965	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
74-971 ～ 975	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
74-981 ～ 982	オートストリップングバー	歯科研削用ストリップ	09B2X00010000365	一般医療機器	株式会社シオダ
BP1	BP-1ブラケットブレーサー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00006	一般医療機器	株式会社シオダ
BPS2	バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	13B3X10195G29101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
CUT000T	WAKEYAMA ツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00007	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT001AT	リガチャーカッター 15°アングルショート	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00011	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT001M	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT001MA	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT001TC	リガチャーカッタークラシック	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00015	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT002S	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT002SL	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT002TN	ディスタルエンドカッターフラッシュカットノンホールド	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00018	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT003N	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT003T	ワインガルトユーティリティブライヤー (スリムヘッド)	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00008	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT003TC	ユーティリティブライヤークラシック	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00016	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT005A	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT006T	トルクインディケートアーチベンダー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00020	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT007	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUT007TPT	ループフォーミングブライヤー (ツイードオリジナルシェイプ)	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00019	一般医療機器	株式会社シオダ
CUT008C	矯正ブライヤー CUTE	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D150	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTAA	アライナーアジャスター	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D145	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTA	アライナーアジャスター	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D145	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTDBPHW	ダイヤモンドバンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	09B2X00010R00009	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTGMB	GUMMETAL ベンダー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00013	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTMCDN	マルチクリンピングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00017	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTMSA	モスキート	鉗子	13B3X10059000350	一般医療機器	フジデンタル株式会社
CUTMSS	モスキート	鉗子	13B3X10059000350	一般医療機器	フジデンタル株式会社
CUTNLD018, 025	NOMURA LINGUAL ディレクター	歯科矯正用結さつ器	11B1X1000658D214	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTNTCBND	シンチバックブライヤー for NiTi	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000368	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTPTT2	プレジジョンチューブツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000358	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTSSA	スマハ スリム アングル	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D136	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTSSS	スマハ スリム ストレート	歯科矯正用ブライヤ	11B1X1000639D142	一般医療機器	株式会社 YDM
CUTUT2	ユーティリティ ツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00005	一般医療機器	株式会社シオダ
CUTVLSB1 ～ 3	パーティカルループ&ステップバンドブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000370	一般医療機器	株式会社シオダ
DPU17	ピンセット	ピンセット	13B3X10195G34102	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
GMP7	ブラケットポジショニングツイザー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000345	一般医療機器	株式会社シオダ
GMTP2	GMトルキングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010R00012	一般医療機器	株式会社シオダ
H4	止血鉗子	鉗子	13B3X10195G43103	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
HBPG	長谷川ゲージ	歯列矯正用位置測定器具	13B3X10059000351	一般医療機器	フジデンタル株式会社
i00557	ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B2X00107000A01	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
IST-TC01	トルクコントロール	歯科用インプラント手術器具	13B1X00133Z00028	一般医療機器	株式会社吉田製作所
LDG2	ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10195G35101	一般医療機器	ヒューフレディ・ジャパン合同会社
LT	ツイスター-L	歯科矯正用結さつ器	12B2X00015000003	一般医療機器	株式会社カンノ
N-215	マチュータイプ	持針器	09B2X00010000073	一般医療機器	株式会社シオダ
NK-1	クイックリガチャーブレーサー	歯科矯正用結さつ器	13B2X00107000A02	一般医療機器	株式会社 JM Ortho
P-200	ブラケットリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000149	一般医療機器	株式会社シオダ
P-210	ボンドリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000153	一般医療機器	株式会社シオダ
P-220	フッククリンピングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000154	一般医療機器	株式会社シオダ
P-300	リングルユーティリティブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000323	一般医療機器	株式会社シオダ
P-700	リングルボンドリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000337	一般医療機器	株式会社シオダ
S-210	金冠バサミ	歯科用金冠はさみ	09B2X00010000025	一般医療機器	株式会社シオダ
S-211	金冠バサミ	歯科用金冠はさみ	09B2X00010000025	一般医療機器	株式会社シオダ
S-611	金冠バサミ	歯科用金冠はさみ	09B2X00010000025	一般医療機器	株式会社シオダ
SHDD, SHDDPPM-S	P 式 SH ディレクター	歯列矯正用結さつ器	13B3X10059000352	一般医療機器	フジデンタル株式会社
TS-15	ピン&リガチャーカッター	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000543	一般医療機器	株式会社シオダ
TS-26	ダイレクトバンドアタッチメントリムービングブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	09B2X00010000150	一般医療機器	株式会社シオダ