

# IMPRIMO® Model Separator

IMPRIMO® モデルセパレーター

## 3D プリンター用水性レジン分離材

3D プリンターで作られたレジン模型を用いて、リテーナーなどの可撤式矯正装置を製作するための水性レジン分離材です。

付属のブラシで薄く塗布し、室温もしくは模型乾燥器などでしっかり乾燥させてから、即時重合レジンを築盛してください。

※フィラメントプリンターで作られたレジン模型には使用できません。

(フィラメント造形は、ピッチが粗いことや即時重合レジンの重合熱の影響を受ける可能性があるため)

ボトルとブラシ専用スタンドの STL データもご用意しております！



SCHEU-DENTAL の web サイトより  
ダウンロードいただけます！▶▶



内容量：100ml

商品番号

6551

206860466

### 使用方法

適量の IMPRIMO® モデルセパレーターを模型上に吐出し、付属のブラシで全体に伸ばします。

塗布後は分離材を乾燥させる必要があります。基本的には室温で45分程度放置することで乾燥できますが、時間短縮のために模型乾燥器に入れるなどの方法が効果的です。

※ピッチが粗いなどにより剥がれにくいと感じた際は、分離材を2～3回塗りなおしてお試しください。

使用方法の説明動画は  
こちら！▶▶



### <使用イメージ>



【発売】 株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

TEL:03-5281-4711 FAX:03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

\*仕様・価格は2025年7月22日発売時点のものです。\*消費税は含まれておりません。\*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

【輸入元】 SCHEU-DENTAL GmbH