


フェイスクリブ（前方牽引用） 取扱説明書

軽量ステンレススティール使用でフィット感がよく、
ヘッドストラップを使用する必要がありません！

フェイスクリブ

フェイスクリブはテクニシャンたちによって、もともとⅢ級症例のためにデザインされましたが、その後多くの臨床家たちが前方牽引（Ⅱ級症例及びスペーススクローリング）にも応用できることを見出したことから、さらなる改良が加えられました。
安定性と装着時の快適性を向上させるために「チンカップ」が付け加えられ、装着中の「ズレ」を防ぐようフレームが改良されて、睡眠中も継続的に治療ができるようになりました。また、マウスボーも再設計され、操作性と安全性がさらに改善されました。

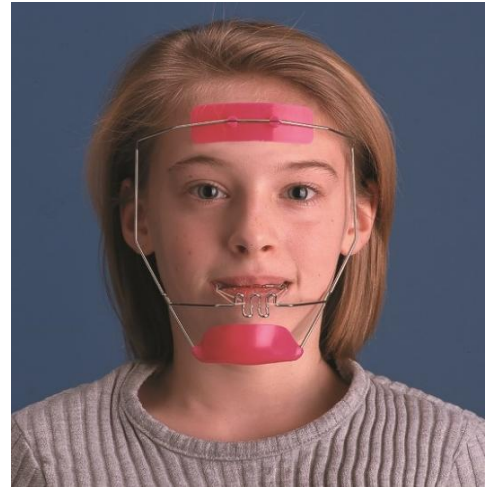

機 能

- Ⅲ級症例：上顎歯列弓の前方牽引
- Ⅱ級症例：下顎歯列弓の前方牽引
- * 歯列の部分的な前方牽引も可能です

マウスボー

- ・.075インチワイヤー採用で丈夫
- ・安全性が増し、牽引能力が向上
- ・口腔内固定装置との併用も可能

レストパッド

- ・装着時の快適性向上のため、大きめにデザイン
- ・簡単に取り外せて、交換が容易
- ・丈夫な軽量プラスチック採用
- ・洗浄可能なゲルライナー

チンカップ

- ・カップをフレームに固定することにより、カップの回転やズレを防止
- ・大きめなデザインで、快適性が向上
- ・丈夫な軽量プラスチック採用
- ・洗浄可能なゲルライナー

完全な視界の確保

- ・視界を妨げないようにデザイン
- ・メガネをかけた状態での装着が可能

顔のかたちにあわせた調整

- ・簡単な調整を施すことによって、様々な顔のかたちにフィットさせることが可能（調整方法は裏面に記載）

ウォッシュابلゲルライナーについて

ゲルライナーは、ウォッシュابل素材とゲル状クッションを組み合わせたハイブリッドなライナーで、快適性が向上します。

＜ゲルライナー洗浄方法＞ ゲルライナーは必ず下記の方法で洗浄してください。

- 1) ゲルライナーは**必ずプラスチックのレストパッドから外さずに**、洗顔用石鹸を泡立ててから、青いライナーの表面を撫でるようにやさしく洗浄してください。
- 2) めるま湯で丁寧にすすぎ、タオルにはさんで少し押さえるようにして水気を切ってください。
- 3) 陰干しの後、完全に乾燥していることを確認して再使用してください。
- 4) 洗浄後、あるいは装着中にライナーが剥離した場合は、ゲルライナーを交換してください。



＜ゲルライナーに関する注意点＞

- ・本品には、天然ゴム系の素材は含有されていませんが、長時間にわたり化学繊維を皮膚に密着させることにより、患者さんによってはまれにかぶれることがあります。その場合は、ガーゼや綿布などをライナーと皮膚の間に挟むことにより緩和される可能性があります。
- ・ゲルライナーは使用の度に洗浄し、ダメージの状態などにかかわらず1～3ヶ月を目安に交換してください。消耗品ですので、皮脂や汗などで徐々に汚れていき、洗浄しても完全には汚れを取り除けない可能性があります。

フェイスクリブ 各部の調整方法


A B

調整と適合

睡眠中も装着した装置の安全が保たれるように、フェイスクリブを額と頬の輪郭になるべく沿った形で調整します。

C

「C」の部分を調整し、顔の長さに適応させます。

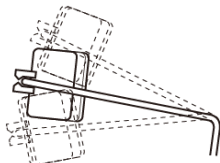


レストパッドが眉毛の上でぴったりと位置するように調整し、フェイスクリブを外さなくても会話できるようにします。

D




「D」の部分を調整し、頬骨に当たらないように注意します。

E

「E」の部分を調整し、マウスボークリブを歯牙と一直線上で、マウスラインのやや上のあたりにくるようにします。

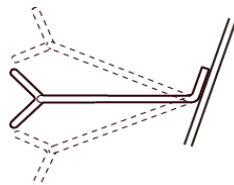

このやや上方にかかる圧力によって、フェイスクリブが定位置に安定します。

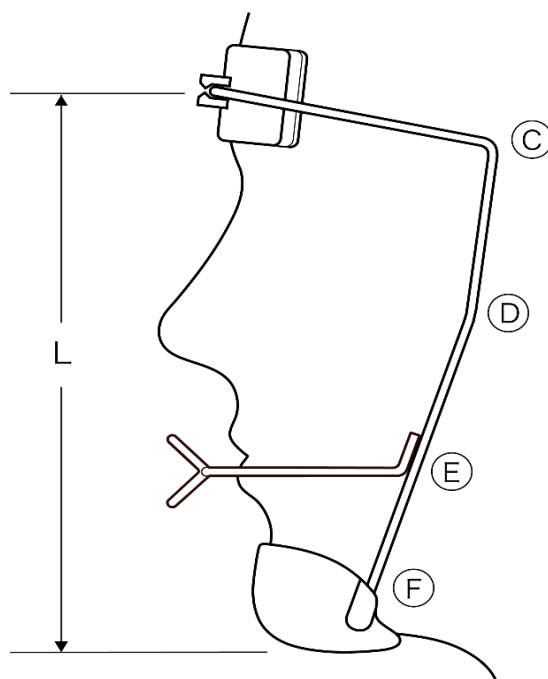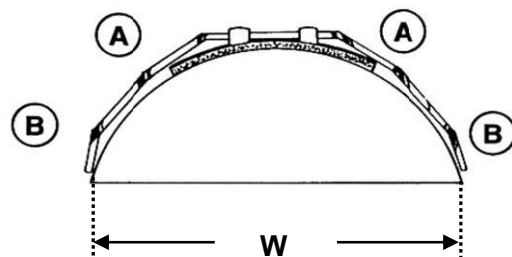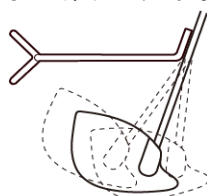

仕様

重量	24~25g			
目安寸法 (mm)	幅 (W)	138.93		
	長さ (L)	サイ	L	約168
		イ	M	約135
		ズ	S	約117

※長さは実測値です。製造上個体差が見られる場合があります。

＜消耗品＞

- ・交換用レストパッド (各色)
- ・交換用ゲルライナー
- レストパッド+チンカップ 1組セット
- レストパッド用 2枚
- チンカップ用 2枚



調整時の注意点

フェイスボアの調整をする際は、マウスボアとフレームの溶接部に過度な力がかからないよう、プライヤーで把持して屈曲してください。


正しい使用例



誤使用例



・遠くを持たないこと
溶接部以外を把持しない

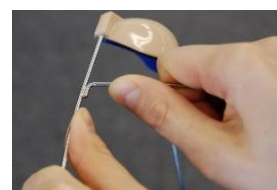

・指で曲げないこと

販売名：フェイスクリブ

一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア

医療機器届出番号 13B2X00107000A07

医療機器の分類：一般医療機器(クラスⅠ)

【製造販売元】

株式会社 JM Ortho

<https://www.jmortho.co.jp>

【輸入元】

Great Lakes Dental
Technologies, LTD.

本 社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL: 03-5281-4711 FAX: 03-5281-4716

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル3F

TEL: 06-6338-9271 FAX: 06-6338-9380

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル6F

TEL: 092-432-5676 FAX: 092-432-5737