



## SUPPLIES

# 09

## サプライ

- スーパーボンド ..... 158
- エムシーピーボンド／ドライフィールド ..... 160
- LC オルソマイト ..... 161
- アングルワイダー／オーラルワイダー／  
各種口角鉤 ..... 162
- リケッツテンプレート／オーソトレース／その他 ... 163
- タイボドント模型／スタディーモデル ..... 164
- タイボドント咬合器／ワックスフォーム（ニッシン）／  
メタルティース（ニッシン） ..... 165
- ワックスフォーム（モリタデンタルプロダクツ）／  
タイボドント／メタルティース ..... 166
- リテーナーシャイン／オーソフロス／オラプラ .... 167
- リテーナーケース／チューイングブラシ／  
IPR 用ダイヤバー／その他 ..... 168

## スーパーボンド

サンメディカル



*Super-Bond* 矯正用接着材

# ORTHOMITE

## オルソマイト

「スーパーボンド オルソマイトセット」は矯正用アタッチメント（ブラケット、チューブなど）を直接歯面に接着させるダイレクトボンディングシステム用に開発された歯科用接着材です。フィラーを含まないのでディボンディングが容易です。ブラッシュオンテクニックだけでなくプレプライムドアタッチメントを使用することでプレプライムドテクニックにも対応しています。

## スーパーボンド オルソマイトセット

- ①ティースプライマーで 20 秒表面処理
- ②筆積法で接着 硬化時間 5～6 分 37℃
- ③ワイヤーの装着はブラケット圧接から 10 分以上経過



| 接着歯数 | クイックモノマー液 | カタリスト V |
|------|-----------|---------|
| 1～2  | 4 滴       | 1 滴     |
| 3～5  | 8 滴       | 2 滴     |

※従来のボトル入り表面処理材レッドは 160 ページに記載しています。

※セットのエッチング材はティースプライマーになります。

## 表面処理材 ティースプライマー



表 引張接着強さ

| 適用部位  | 前処理材          | 接着強さ (MPa) |
|-------|---------------|------------|
| エナメル質 | ティースプライマー     | 13         |
|       | 表面処理材 高粘度レッド  | 13         |
| 象牙質   | ティースプライマー     | 13         |
|       | 表面処理材 高粘度グリーン | 14         |

出典：サンメディカル株式会社測定データ

| 内容量 / 入数                          | 商品番号   |            |
|-----------------------------------|--------|------------|
| スーパーボンド オルソマイトセット<br>(キット内容 / 単品) | SBOSET | 206350304  |
| スーパーボンド カタリスト V                   | SBCV   | 204610580  |
| スーパーボンド クイックモノマー液                 | SBQM   | 204610399  |
| スーパーボンド ポリマー粉末筆積 F3               | SBPF3  | 204610411  |
| ティースプライマー                         | SBTP   | 204610705  |
| スポンジ (L・S)                        | SBS    | 204610218  |
| ダッペンスタンド (3 穴)                    | SBDS   | 204610569  |
| ディスボダッペンカップ                       | SBDSC  | 204610568  |
| ディスボ用筆柄 (曲)                       | SBDSC  | 204610463C |
| ディスボチップ筆積 L (ピンク)                 | SBDTL  | 204610572  |
| ディスボチップ筆積 S (緑)                   | SBDTS  | 204610571  |




医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理

エナメル質・象牙質兼用のセルフエッチングプライマーです。20 秒の塗布後、エアブローのみで水洗が不要になりました。接着性能は従来の「表面処理材レッド」「表面処理材 高粘度レッド」(いずれも 160 ページ)と同等です。

| 内容量       | 包装  | 商品番号   |
|-----------|-----|--------|
| ティースプライマー | 3mL | 1 SBTP |

204610705

医療機器認証番号 222AFBZX00100000 管理

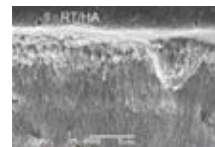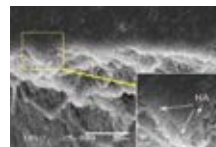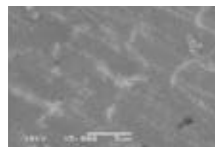

人歯エナメル質のエッチング処理面(左)とティースプライマー処理面(右)エッチングは表面処理材 高粘度レッド使用。ティースプライマーのエッチング効果はマイルドで非処理面と変わらない。

接着した人歯エナメル質の一部を酸で溶解すると、どちらの接着界面近傍にも耐酸性のレジタタグ (RT) とアパタイト (HA) が残る。

## 液材 クイックモノマー液

主成分に MMA/4-META を使用した接着材の液材です。4-META は拡散促進モノマーで歯質に高い接着性を示します。従来の「モノマー液」と操作時間は同等ですが、硬化時間が短縮します。



## 重合触媒 カタリスト V

「TBB」を主成分とした重合開始剤です。化学重合タイプですので照射光が届きにくいブラケットのアンダーカット部も硬化不良になることはありません。完全乾燥の困難な口腔内でも安定した接着性能を示します。



| 内容量                    | 包装 | 商品番号 |
|------------------------|----|------|
| スーパーボンド クイックモノマー液 10mL | 1  | SBQM |

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理

| 内容量                   | 包装 | 商品番号 |
|-----------------------|----|------|
| スーパーボンド カタリスト V 0.7mL | 1  | SBCV |

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理



# スーパーボンド

サンメディカル

## 粉材 ポリマー粉末筆積F3

矯正ブラケットの接着に適したポリマー粉末です。  
フッ素を配合した筆積用ポリマー粉末で、適用面周辺の脱灰抑制を期待できます。




使用期限

## フッ素徐放による耐酸性評価〈エナメル質〉

- ・被験者：10～15歳の矯正治療患者 15名
- ・金属バンドをフッ素配合スーパーボンドとスーパーボンドで頬側面以外を装着して4週間後に抜歯し、スーパーボンド周辺部（頬側面）の脱灰の程度を測定した。

フッ素配合スーパーボンド適用面周辺

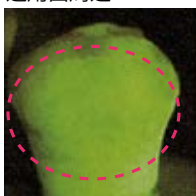

スーパーボンド適用面周辺



脱灰された部分が赤色で表示される。  
フッ素配合スーパーボンド適用面周辺はスーパーボンド適用面周辺よりも脱灰されている面積が小さい。

## QLF 法による分析結果

スーパーボンドと比較して、フッ素配合スーパーボンド塗布面周辺部は脱灰される程度が低かった。このことからフッ素配合スーパーボンドはエナメル質の脱灰を抑制できると考えられる。

\* QLF法（初期むし歯画像診断システム）視診や触診では発見できないようなごく初期のう蝕を、特殊な青い光で歯を照らすことによって簡単に見つけだす方法。

\* スウェーデン・イェテボリ大学 フッ素を含有したスーパーボンド試作品研究より

P.LINGSTRÖM, P.PENNY, S.TRAN/EUS, H.K.JELLBERG, D.BIRKHED: A NEW Fluoride-Containing Bonding Material for Orthodontic Brackets in Vivo; #0157, AADR/CADR Meeting, March 8-11, 2006

|                     | 内容量 | 包装 | 商品番号  |           |
|---------------------|-----|----|-------|-----------|
| スーパーボンド ポリマー粉末筆積 F3 | 3g  | 1  | SBPF3 | 204610411 |

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理

## 液材 モノマー液



使用期限

## 筆積法による硬化時間比較

|  | 5～6分 | モノマー液 | 7～8分 |
|--|------|-------|------|
|--|------|-------|------|

|               | 内容量  | 包装 | 商品番号 |           |
|---------------|------|----|------|-----------|
| スーパーボンド モノマー液 | 10mL | 1  | SBM  | 204610401 |

医療機器認証番号 221AABZX00115000 管理

## スーパーボンド PZプライマー



使用期限

「スーパーボンド PZプライマー」は、ポーセレン、ジルコニア、コンポジットレジンに対応した表面処理材です。メタルボンドやオールセラミックス、硬質レジン前装冠など化学的な結合を求める場合に使用します。 ※ブラケット被着面はアンダーカットがあるため必ずしも塗布する必要はありません。

|                      | 内容量 | 包装 | 商品番号   |           |
|----------------------|-----|----|--------|-----------|
| スーパーボンド PZ プライマー セット |     |    | SBPZP  | 204610407 |
| 〈キット内容 / 単品〉         |     |    |        |           |
| スーパーボンド PZ プライマー A 液 | 5mL | 1  | SBPZPA | 204610408 |
| スーパーボンド PZ プライマー B 液 | 5mL | 1  | SBPZPB | 204610409 |

医療機器認証番号 224AFBZX00102000 管理

- ①陶材面の清掃、表面処理材レッド 30 秒、水洗乾燥 ②調整、A 液 B 液混和 ③陶材面に塗布→接着操作

## V-プライマー

スーパーボンドの貴金属類に対する接着性を向上させる接着前処理材です。口腔内で使用できますので補綴物装着中の患者さんの矯正が可能になります。



使用期限

## スーパーボンド 筆洗い液Ⅱ

スーパーボンド使用後の筆クリーナーです。



|         | 内容量 | 商品番号   |           |
|---------|-----|--------|-----------|
| V-プライマー | 3mL | 461453 | 204610453 |

医療機器認証番号 20600BZZ00452000 管理

|              | 内容量   | 商品番号   |           |
|--------------|-------|--------|-----------|
| スーパーボンド筆洗い液Ⅱ | 100mL | 461334 | 204610334 |

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

# エムシーピーボンド／ドライフィールド

## エムシーピーボンド サンメディカル



- ①エッチング 30 秒
- ②リキッドとアクチベーター等量混和
- ③筆積法で接着

「エムシーピーボンド」は、「4-META」含有の化学重合型歯科矯正用接着材料でエナメル質と矯正用アタッチメント（メタル、セラミック、プラスチック）に対し高い接着力を発揮します。

パウダーにフィラーを含んでいないため「スーパーボンド」と同様にディボンディングも容易です。

| 内容量 / 入数                       | 商品番号               |            |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| エムシーピーボンド セット                  | MCPBSET            | 206350300  |
| 〈キット内容 / 単品〉                   |                    |            |
| エムシーピーボンド アクチベーター (キャップ: グリーン) | 7mL MCPBA          | 206350301  |
| エムシーピーボンド リキッド (キャップ: ブルー)     | 7mL MCPBL          | 206350302  |
| エムシーピーボンド パウダー (キャップ: オレンジ)    | 3g MCPBP           | 206350303  |
| 表面処理材 レッド                      | 5mL SBEN           | 204610460  |
| ダッペンディッシュ (陶器)                 | 1 個 SBD            | 204610217  |
| スポンジ (L・S)                     | S160 粒 / L80 粒 SBS | 204610218  |
| ディスク用筆柄 (直)                    | 1 本 SBD FS         | 204610463S |
| ディスク用筆柄 (曲)                    | 1 本 SBD FC         | C          |
| ディスクチップ筆積用 L (ピンク)             | 10 本 SBD TL        | 204610572  |
| ディスクチップ筆積用 S (緑)               | 10 本 SBD TS        | 204610571  |

医療機器認証番号 227AFBZX00052000 管理

## 表面処理材 レッド

サンメディカル



| 内容量       | 商品番号     |           |
|-----------|----------|-----------|
| 表面処理材 レッド | 5mL SBEN | 204610460 |

医療機器認証番号 21600BZZ00588000 管理

## 表面処理材 高粘度レッド

サンメディカル




| 内容量 / 入数      | 商品番号       |           |
|---------------|------------|-----------|
| 表面処理材 高粘度レッド  | 3mL SBES   | 204610566 |
| ニードルチップ (23G) | 50 個 SBEST | 204610575 |

※ニードルチップ (SBEST) にはニードルキャップ (赤) 2 個が付属しています。

医療機器認証番号 21200BZZ00294000 管理

## NOLAドライフィールドシステム グレートレイクス

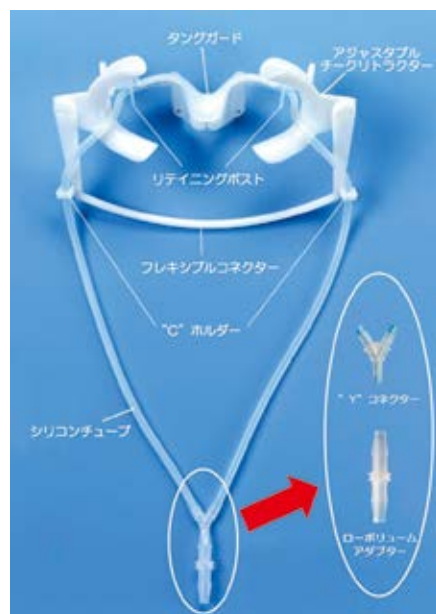

NOLA ドライフィールドシステムはプラスチック製パーツで構成された組み立て式の排唾機能付開口器で、口腔内をドライに保つ大変便利なシステムです。

※オートクレーブ滅菌可能 (推奨設定温度 121℃)

| サイズ  | カラー  | 包装 | 商品番号    |           |
|------|------|----|---------|-----------|
| スモール | レッド  | 1  | 300-400 | 206850470 |
| ラージ  | ホワイト | 1  | 300-401 | 206850471 |

| パーツ                         | 包装 | 商品番号    |           |
|-----------------------------|----|---------|-----------|
| タンクガード スモール                 | 2  | 300-413 | 206850477 |
| タンクガード ラージ                  | 2  | 300-403 | 206850472 |
| チークリトラクター スモール (赤)          | 1  | 300-414 | 206850478 |
| チークリトラクター ラージ (白)           | 1  | 300-406 | 206850473 |
| "Y" コネクターのみ                 | 4  | 300-408 | 206860658 |
| ローボリュームアダプター付き "Y" コネクター    | 4  | 300-409 | 206850474 |
| ハイボリュームアダプター付き "Y" コネクター    | 4  | 300-411 | 206850475 |
| シリコンチューブ (内径 2mm / 長さ 31cm) | 10 | 300-412 | 206850476 |
| コネクティングアームインサート             | 10 | 300-402 | 206860657 |

※一部メーカーの排唾管には接続部が適合しないことがあります。

※チークリトラクターにはフレキシブルコネクターが付属します。

医療機器届出番号 13B2X00107000A20 一般

※緑色の商品番号は取り寄せ商品です。




# LC オルソマイト

サンメディカル

LC Orthomite  
Light-Cure Orthodontic Adhesive

サンメディカル社製造の光重合型矯正用接着材

リン酸エステル系モノマー配合によって  
異なる口腔内環境でも安定した接着強さが得られます

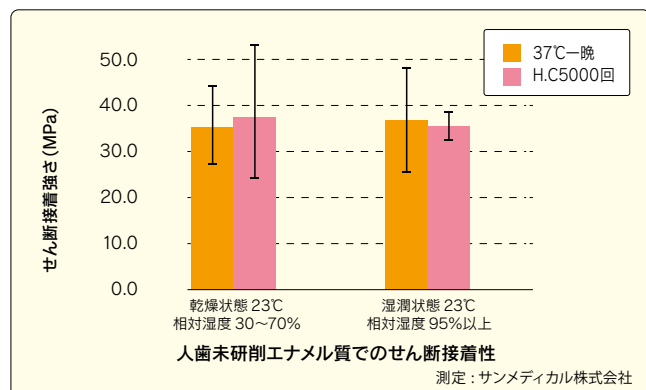

歯質の表面が乾燥・湿潤いずれの状態においても 30MPa を超えるせん断強さでしっかりと接着します。  
また、接着環境が高湿度であっても低湿度と同等の接着強さが得られます。

## 各種ブラケット、被着体にオールマイティーに対応

| ブラケットの接着試験 (MPa) |                    |                    |                   |                 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 材質<br>(ブラケット名)   | ステンレス<br>(FLI ツイン) | ジルコニア<br>(シンシアプレス) | アルミナ<br>(FLI クリア) | ポリウレタン<br>(アリス) |
| 37℃一晩水中浸漬        | 19.3±4.4           | 17.2±4.1           | 11.5±2.2          | 12.2±2.6        |

測定：サンメディカル株式会社

| 歯質及び各種被着体への接着試験 (MPa) |                               |                          |                            |                     |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 被着体<br>(前処理)          | 牛歯エナメル質<br>(LC オルソマイト エッチャント) | レジン<br>(スーパーボンドプライマー ※1) | ポーセレン<br>(スーパーボンドプライマー ※1) | 金バラ<br>(V-プライマー ※2) |
| 37℃一晩水中浸漬             | 12.5±2.5                      | 11.6±1.5                 | 18.0±1.3                   | 10.5±1.6            |

測定：サンメディカル株式会社

※1 医療機器認証番号 224AFBZX00102000 管理  
※2 医療機器認証番号 20600BZZ00452000 管理



## シリンジ用ノズル採用で操作性アップ！

| 内容量 / 入数                                | 商品番号           |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
| LC オルソマイト セット<br>(ノズルチップ 2個・キャップ 1個付)   | LCOSETN        | 206350325       |
| 〈キット内容 / 単品〉                            |                |                 |
| LC オルソマイト ペースト※<br>(ノズルチップ 2個・キャップ 1個付) | 4g             | LCOPN 206350324 |
| LC オルソマイト エッチャント                        | 5mL            | LCOE 206350314  |
| プラスチックダッペン                              | 30 枚           | LCOD 204610321  |
| スポンジ (L・S)                              | S160 粒 / L80 粒 | SBS 204610218   |

ノズルチップ / キャップの単品販売はございません。  
医療機器認証番号 226AFBZX00126000 管理


※お届け後は冷蔵庫での保管を推奨しております。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

BRACKETS  
TUBES  
BANDS  
WIRES  
EARLY TREATMENT  
INTRAORAL EXTRAORAL  
EXPANSION SCREWS  
I-station α  
SUPPLIES  
INSTRUMENTS  
BIOSTAR SYSTEM  
LABORATORY PRODUCTS  
EQUIPMENT  
SAM SYSTEM  
COA SOFTWARE  
BOOKS

# アングルワイダー／オーラルワイダー／各種口角鉤

## 口角鉤 アングルワイダー ワイド YDM

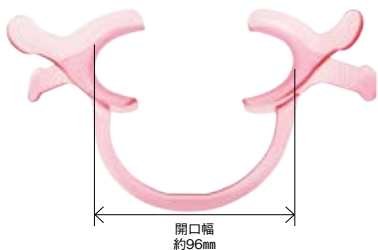


補助者なしで口角を排除すると同時に、頬粘膜を圧排することができます。

| 品名          | 材質  | 包装 | 商品番号      |
|-------------|-----|----|-----------|
| アングルワイダーワイド | TPX | 2  | 201510118 |

※オートクレープ滅菌可能（耐熱温度160℃）  
※乾熱滅菌・紫外線殺菌はお避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般

## オーラルワイダー ザイコアインターナショナル

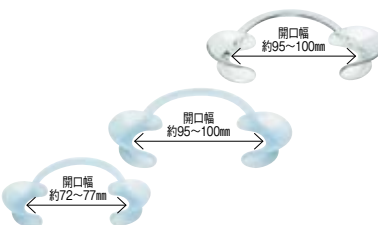

ロングセラーのシンプルな開口器です。  
頬が邪魔にならず、広い視野で口腔ケアができます。

| 規格・サイズ(色)   | 材質       | 包装 | 商品番号  |
|-------------|----------|----|-------|
| ハード(クリア)    | ポリカーボネート | 1  | OWH   |
|             |          | 2  | OWH2  |
| ソフト(ブルー)※   | ポリプロピレン  | 1  | OWS   |
|             |          | 2  | OWS2  |
| ミニソフト(ブルー)※ | ポリプロピレン  | 1  | OWMS  |
|             |          | 2  | OWMS2 |

※オートクレープ滅菌可能（推奨設定温度121℃）

## 口角鉤ピジョン YDM




口唇に接する部分がなめらかに彎曲しているため、明瞭に最深側部を露出させることができます。

| サイズ   | 材質  | 包装 | 商品番号     |
|-------|-----|----|----------|
| SSサイズ | TPX | 1  | 101915SS |
| Sサイズ  | TPX | 1  | 101915S  |
| Mサイズ  | TPX | 1  | 101915M  |

※オートクレープ滅菌可能（耐熱温度160℃）  
※乾熱滅菌・紫外線殺菌はお避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般

## 口角鉤 TASK (シオダ)

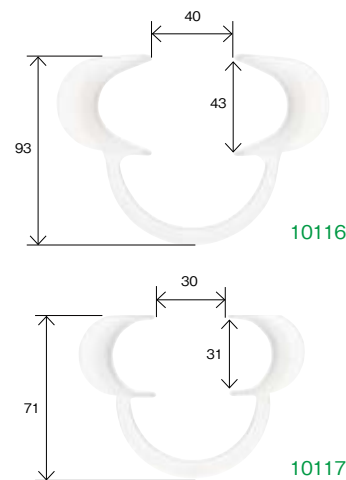

## リップワイダー

| サイズ | 材質      | 包装 | 商品番号  |
|-----|---------|----|-------|
| M-2 | ポリプロピレン | 2  | 10116 |
| S-2 | ポリプロピレン | 2  | 10117 |

医療機器届出番号 27B2X00268000008 一般


※乾熱滅菌、紫外線殺菌等はお避け下さい。  
※オートクレープ滅菌可能（115～118℃で30分、121℃で15分のいずれか）

## 片頭リトラクター

| サイズ | 材質      | 包装 | 商品番号  |
|-----|---------|----|-------|
| M   | ポリプロピレン | 2  | 10123 |
| S   | ポリプロピレン | 2  | 10124 |

医療機器届出番号 27B2X00268000008 一般

※乾熱滅菌、紫外線殺菌等はお避け下さい。  
※オートクレープ滅菌可能（115～118℃で30分、121℃で15分のいずれか）

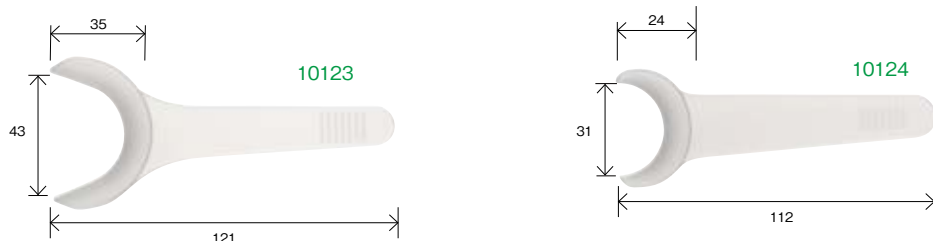

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



## リケッツテンプレート／オーソトレース／その他

### アーチマーカ―

G&H

ディスプレイで衛生的なアーチマーカ―です。  
赤と白をご用意しております。

※ディスプレイはご用意しておりません。



| カラー | 包装   | 商品番号    |            |
|-----|------|---------|------------|
| 赤   | 100本 | AMP020  | 206350671R |
| 白   | 100本 | AMP020W | W          |

### ブラケットケース

JM Ortho

ブラケットやチューブが上下顎 1～7番まで収納できるプラスチックケースで、10～20症例分の収納が可能です。  
コンパクトなデザインでチェアサイドでも場所をとらず、ブラケット類の収納に大変便利です。




| 寸法 (cm)        | 包装 | 商品番号 |           |
|----------------|----|------|-----------|
| W18.2×D13×H2.6 | 1  | BKC  | 206850193 |

### リケッツテンプレート

RMO Europe

Dr.リケッツ考案のセファロトレーシングに用いるテンプレートです。

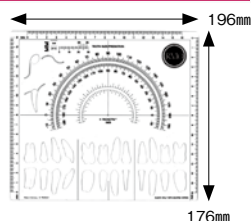


| 規格 (mm) | 包装 | 商品番号   |           |
|---------|----|--------|-----------|
| 196×176 | 1  | i00512 | 206350611 |

### ペンタモーフィックアーチフォームセレクト―

RMO

Dr.リケッツ考案の模型からアーチ形状を選択するテンプレートです。

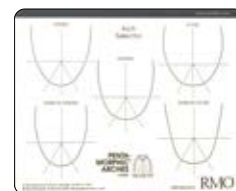

| 規格 (mm) | 包装 | 商品番号   |           |
|---------|----|--------|-----------|
| 254×203 | 1  | i00509 | 206350610 |

### オーソトレース

RMO

厚さ0.076mmのアセテート製のレポート用紙タイプのトレーシングペーパーです。表面はマット処理になっており細かい線もシャープに描けます。裏面は光沢仕上げで見えにくい箇所も鮮明に再現します。(8"×10")




| 規格 (mm) | 包装  | 商品番号   |           |
|---------|-----|--------|-----------|
| 203×254 | 100 | J00086 | 206350666 |

### YS-40 トレーシングプレート

YDM

プラスチック製の一般的なトレーシングプレートです。

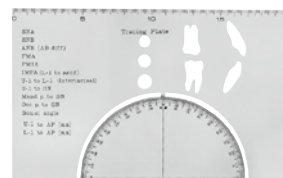


| 規格 (mm) | 包装 | 商品番号      |           |
|---------|----|-----------|-----------|
| 210×130 | 1  | 201010938 | 201010938 |

### ゴールドンディバイダー (黄金分割定規)

RMO Europe

Dr.リケッツは、顔貌の審美性について黄金分割 (Golden section) に着目し、バランスの良い顔貌にはこの法則がある程度適用するとしてゴールドンディバイダーの活用を推奨しています。バランスの良い正貌では、主に右図の部分の部分がほぼ一定の関係比率 (1:1.618) にあることが望ましいとされています。

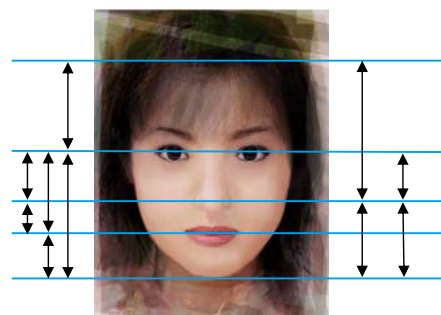

| 包装 | 商品番号    |           |
|----|---------|-----------|
| 1  | ECIO394 | 206860308 |

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

## タイポドント模型／スタディーモデル

### 全顎タイポドント模型

ニッシン

タイポドント実習に便利な全顎レジン模型を各種ご用意しています。3つの仕様から実習内容に合わせてお選びいただけます。納期については、規格によりお時間をいただきます。

| 規格       | 商品番号     |           |
|----------|----------|-----------|
| D1D-RM33 | D1D-RM33 | 206350741 |
| D1D-RM35 | D1D-RM35 | 206350742 |
| D1D-RM38 | D1D-RM38 | 206350743 |

D1D-RM33 混合歯列

D1D-RM35 混合歯列

D1D-RM38 永久歯列



#### 【仕様】

D1D-RM33 混合歯列 歯牙：A8-407H植立  
右側 2級、上顎前突  
C欠損

D1D-RM35 混合歯列 歯牙：A8-407H植立  
#11,12,21,22をFKO形態  
C欠損

D1D-RM38 永久歯列 歯牙：A1-26T.2植立  
正常咬合

### スタディーモデル D13PP-RM24 ニッシン



エポキシ歯牙を正常咬合に配列した1色レジン模型で、上下顎はPP咬合板によりネジ止めされております。患者説明用、あるいは実習用にご利用いただけます。

| 商品番号                  |
|-----------------------|
| D13PP-RM24A 206850659 |

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



# タイポドント咬合器／ワックスフォーム／メタルティース

## 重要なお知らせ

YDM社製タイポドント咬合器、ならびにニッシン社製のワックスフォームは、モリタデンタルプロダクツ社製のタイポドント、メタルティース各種、ワックスフォーム各種との互換性はありません。ご購入の際はご注意ください。

### タイポドント咬合器

YDM

顎外部にフック（維持部）を組み込み、顎外固定装置を牽引する位置をできるだけ生体に近づけました。前後、側方運動における微調整が可能です。また第二臼歯までの非抜歯症例の際、十分配列できるようトレイに余裕を持たせています。



商品番号

TYPO

206350734

### メタルティース

ニッシン

ボンディングに便利な維持孔として凹みが歯面に設けられており、安心してご利用いただけます。ホワイトクラウンは、メタルをベースに歯冠部をウレタン加工したメタルティースで、ブラケット等の接着性が良好です。



商品番号

|          |     |           |
|----------|-----|-----------|
| メタルティース  | MT  | 206350733 |
| ホワイトクラウン | MTW | 206350735 |

### ワックスフォーム

ニッシン

YDM社のタイポドント咬合器（TYPO）専用のワックスフォームです。タイポドントのトレイにぴったり装着でき調整が最小限で済みます。（ワックスブロック付）

\* 咬合関係の全体像は、弊社ウェブサイトの【製品情報＞サプライ＞タイポドント咬合器 関連器具】のページをご覧ください。



正常咬合

I 級

II 級 1 類



II 級 2 類

III 級



商品番号

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 正常咬合     | DN3-RM19 | 206350060 |
| I 級      | DN3-RM20 | 206350061 |
| II 級 1 類 | DN3-RM21 | 206350062 |
| II 級 2 類 | DN3-RM22 | 206350063 |
| III 級    | DN3-RM23 | 206350064 |

※軟化温度の目安 50～60℃

# ワックスフォーム／タイポドント／メタルティース モリタデンタルプロダクツ

## 重要なお知らせ

モリタデンタルプロダクツ社製のタイポドント、ワックスフォーム、メタルティースは、YDM社製タイポドント咬合器ならびにニッシン社製メタルティース各種およびワックスフォーム各種との互換性はありません。ご購入の際はご注意ください。

### タイポドント（矯正実習用咬合器）

ロック機構により、テーブルに平行に置くことができ、シンプルで使いやすい構造です。



タイポドントの上顎と下顎を取り外すことなく平らにすることができます。

| 商品番号             |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| タイポドントⅡ（調整用レンチ付） | TYP02 | 206880175 |

### ワックスフォーム（矯正実習用ワックスフォーム）

モリタデンタルプロダクツのタイポドント、メタルティースに適合します。形態の種類は5種類です。



| 商品番号     |           |      |            |
|----------|-----------|------|------------|
| ワックスフォーム | 正常咬合（N）   | WFN  | 206880176N |
| ワックスフォーム | 1級叢生（I）   | WF1  | 1          |
| ワックスフォーム | 2級1類（Ⅱ-1） | WF21 | 21         |
| ワックスフォーム | 2級2類（Ⅱ-2） | WF22 | 22         |
| ワックスフォーム | 3級（Ⅲ）     | WF3  | 3          |

※軟化温度の目安 37～40℃

### メタルティース（矯正実習用金属歯）

歯牙の形状は、日本人の平均的な形状を採用しました。



| 商品番号     |     |           |
|----------|-----|-----------|
| メタルティース2 | MT2 | 206880174 |

※歯牙単体での販売はございません。



# リテーナーシャイン／オーソフロス／オラプラ

## リテーナーシャイン

JM Ortho



リテーナーシャインは、歯科矯正用のリテーナーや床装置などのプラークコントロールのために開発された洗浄剤です。活性酸素やタンパク質分解酵素によるすぐれた洗浄・除菌力で、汚れや細菌、イヤな臭いを取り除きます。

矯正装置の金属部、特にロウ着部に対し、悪影響を及ぼすことが少なく、安心してご使用いただけます。

また、アクリル、ポリエステル、PET-G、シリコンなどの樹脂にもやさしく、TMJスプリント、ナイトガード、マウスガード、「ムーシールド」「マルチファミリー」などの歯列矯正用咬合誘導装置、矯正用マウスピース(アライナー)、義歯など、様々な装置の洗浄にも適しています。

### 【使用方法】

- ①付属のスプーンで1杯(軽く盛るくらい)をすくいコップに入れます。  
※1回分量目安：2.5g。
- ②コップにリテーナー類が完全に浸る量の水またはぬるま湯を入れます。  
※ぬるま湯は40℃ぐらい。水の量は約150ml。
- ③リテーナー類をすぐに入れ、溶液の色が青から薄い色に変わったら洗浄は終了です。(約30分)
- ④リテーナー類を取り出し、流水ですすぎ口腔内に装着します。
- ⑤使用後はボトルのフタを必ず閉めてください。

### 【成分表示】

- ・洗浄成分  
ペルオキシ硫酸水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、タンパク質分解酵素
- ・色素成分  
ブルーグロブール


ボトルキャップは別売りです。

内容量：150g (1回2.5g：60回分)

|                   | 包装 | 商品番号 |           |
|-------------------|----|------|-----------|
| リテーナーシャイン         | 24 | RSKN |           |
| リテーナーシャイン ボトルキャップ | 1  | RSC  | 206850800 |

### ボトルキャップ(別売)の使い方

- ①1回さかさに傾けると1回分の量が出てたまります。  
(最初の1回は計量のみで中身は出てきません。)
- ②1回分を出す度につぎの分量が計量キャップ部にたまります。

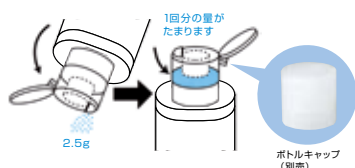


## オーソフロス

オーソケア



オーソフロスは矯正用に開発されたフロスで、先端に設けられたガイドにより矯正装置の隙間を容易に通すことができますので、手軽なフロッシングが可能になりました。

|                | 包装            | 商品番号 |           |
|----------------|---------------|------|-----------|
| オーソフロス ホルダータイプ | 1箱(50ホルダー)×24 | OCH  | 206350066 |

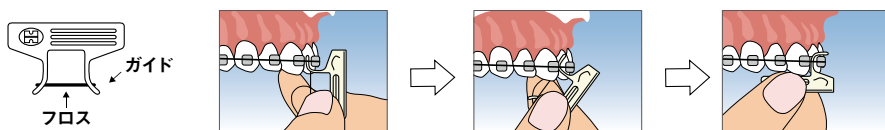

## オラプラ液体包帯口腔用 富士フィルム 富山化学




口腔内の水分と反応して傷口を保護する、軟膏タイプの口腔用液体包帯です。ステロイドを含まないため小児や多用途にご使用いただけます。

また、片手で簡単に折り曲げ開封できるカード型パウチ(イージースナップ)を採用し、衛生的です。

- ・軟膏タイプで、局所の傷口に使用できます。
- ・口腔粘膜に塗布すると、唾液などの水分と反応して保護膜をつくれます。

### 一口の様々な傷口ケアに

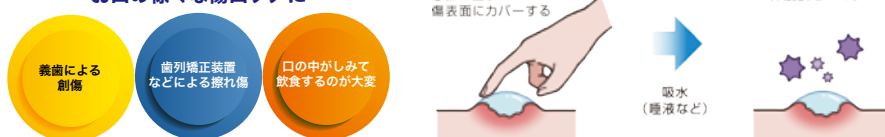

|             | 包装 | 商品番号      |           |
|-------------|----|-----------|-----------|
| オラプラ液体包帯口腔用 | 5  | 202080200 | 202080200 |

医療機器届出番号 13B2X00129000001 一般

## リテーナーケース／チューイングブラシ／IPR用ダイヤバー／その他

## リテーナーケース

RMO



開閉が容易で、使い易いヒンジ付きのデザインです。毎日の使用に耐え、衝撃にも強い設計です。4箇所の通気口で、リテーナーを清潔に保ちます。

内寸 (mm) : 76 × 60 × 24

| カラー           | 包装 | 商品番号    |                |
|---------------|----|---------|----------------|
| トロピカルピンク      | 20 | J01320N | 2068509261320N |
| メロン(サーモンオレンジ) | 20 | J01321N | 2068509261321N |
| メタリックブラック     | 20 | J01323N | 2068509261323N |

## チューイングブラシ

藤原歯科産業




日常の歯磨き効果に加え、繰り返し噛むことにより顎骨や口腔周囲の軟組織の新陳代謝を高め、咀嚼機能系の回復や正しい咬合トレーニングに効果的です。(シリコン製)

|       | 包装 | 商品番号   |           |
|-------|----|--------|-----------|
| 大人用柄付 | 1  | 104300 | 201040300 |
| 大人用   | 1  | 104301 | 201040301 |
| 子供用柄付 | 1  | 104302 | 201040302 |
| 子供用   | 1  | 104303 | 201040303 |

## IPR用ダイヤバー

マニー

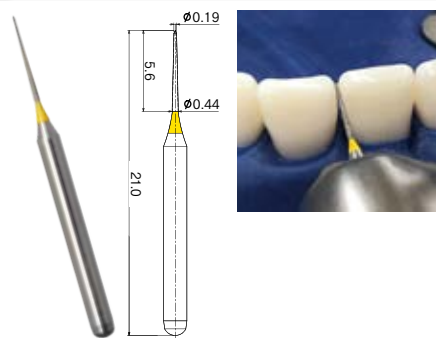

先端径はアライナー矯正時のIPR最小値である0.2mmより細い、0.19mmに設計。さらにテーパーを最小限にすることで、きれいな形成を可能にします。

- ・本製品はIPR用であるため、それ以外の目的では使用しないでください。
- ・5倍速コントラ、16万回転以下での使用をお願いいたします。
- ・作業部は細いため、無理な力を加えての削合は控えてください。
- ・ラバーダムを装着して、落下・誤飲に注意してください。

|           | 包装 | 商品番号      |           |
|-----------|----|-----------|-----------|
| IPR用ダイヤバー | 5本 | 202490686 | 202490686 |

医療機器届出番号 09B1X00006002010 一般

## NASOMETER (ナゾメーター)

Savarla-Dent



Dr. Carl F. Gugino が監修した、鼻呼吸の状態を確認できるミラーです。ミラーに鼻を近づけ、鼻からの呼気で曇った状態を見て、どれくらい鼻呼吸ができているか、左右差がないかなどの確認ができます。年齢に関係なく使用が可能で、鼻呼吸の状態が可視化できるため、患者さんのモチベーション向上も期待できます。

|                    | 商品番号      |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| NASOMETER (ナゾメーター) | NASOMETER | 206860538 |

## ミニ頭蓋モデル

医学モデル工業



患者説明用やセファロトレースの際にご活用いただける頭蓋モデルです。一部分解できる仕様になっています。

|         | 包装 | 商品番号      |  |
|---------|----|-----------|--|
| ミニ頭蓋モデル | 1  | ZSHIEN039 |  |

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。