

## ホルステリ 20RM 長期休暇前後のお手入れについて

ホルステリ 20RM について、年末年始の長期休暇前後など、しばらく使用しない場合のお手入れ方法についてご案内申し上げます。下記の手順を参考に、お手入れを行ってください。



### ◆長期休暇など「長期間使用しない場合のお手入れ」について

- ① 電源を入れてから、各液を空ボトル等にそれぞれ回収してください。残量が少ない・再利用を希望しない場合は廃棄でも構いません。
- ② タンク清掃の為、中和消臭タンクにぬるま湯を 500cc 程度入れ、浄化工程を行ってください。
- ③ 浄化工程完了後、中和消臭タンクからぬるま湯を廃液してください(寒冷地の場合は漬け置きすると凍る可能性有)。
- ④ 器械背面のブレーカーを切る、又は電源コンセントをぬいて主電源を落としてください。

### ◆「長期間使わずにいた後の使用再開時のお手入れ」について

- ① 再使用時は電源を入れ、長期休暇前に回収していた各液を再度タンクに注入してください。廃棄していた場合は、新しい各液を注入してください。
- ② 器具モードで、チェックカードを入れ・消毒物を入れずに試運転を行ってください。
- ③ チェックカードの色を確認し、正しく変色(イエローブラウン)していれば通常通りの使用を開始して問題ありません。

株式会社 JM Ortho

2024 年 12 月 20 日 作成