

筋機能矯正装置 Multi-P2 の新ラインナップ

Multi-DB®

For Deep Bite

2025. 11.21 (Fri.) New Release!

ディープバイト向けラインナップ新登場！

Multi-DB (マルチ -DB) は、Multi-P2 (マルチ -P2) の前歯部に PEEK を原材料としたコアが入ったラインナップです。前歯部補強用コアが入ったことで Deep Bite (ディープバイト) 症例でも噛みちぎりにくく、より幅広い症例の患者さんへマルチファミリーをご使用いただけるようになりました！

対象年齢：9～13歳

(混合歯列期：下顎犬歯もしくは上顎第一小臼歯が生えかわった頃)

使用目的：前歯部と小臼歯の萌出誘導

萌出ガイダンス：中切歯・側切歯・犬歯・小臼歯

保管しやすい
ケース付き！



NEW

前歯部補強用コア

ブレスホール

挙上された咬合平面

モノブロック
(一体形成)

口腔前庭シールド

For Deep Bite

前歯部補強用コア

Multi-DB は PEEK* 樹脂製の補強用コアが前歯部に組み込まれており、前歯部への過度な噛み込みが懸念されるディープバイト症例の患者さんでも噛みちぎりによる装置の破損を防ぐことに寄与します。

*ポリエーテルエーテルケトン




前歯部補強用コア

幅広い装置選択

Multi-DB では、臼歯部の長さを「Short」と「Long」の2種類、サイズを各8段階(合計16種類)で用意しており、患者さんの萌出状況などに合わせて幅広い装置選択が可能です。

※アーチ幅は「Narrow (ナロー)」、臼歯部の厚みは「Low Volume」のみのご用意となります。

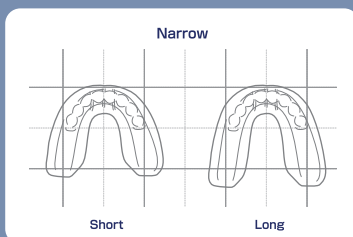

容易なサイズ選択

サイズ選択にはシリコン製の専用メジャリングデバイス(別売)を使用すると便利です。

上顎または下顎の側切歯遠心にメジャリングデバイスの凸部を合わせ反対側の側切歯遠心までの距離を目安にサイズ選択します。




LINEUP ラインナップ一覧

●Multi-DB は臼歯部の長さを「Short」と「Long」の2種類からお選びいただけます。

※アーチ幅は「Narrow (ナロー)」, 臼歯部の厚みは「Low Volume」のみのご用意となります。

●サイズ選択にはシリコン製の専用メジャリングデバイスをご使用ください。

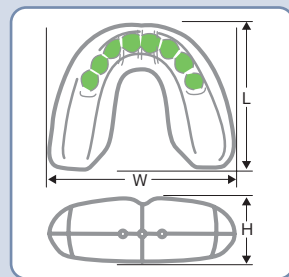

包装: 1 個

臼歯部の長さ	サイズ	(mm)			上顎側切歯 遠心間 (mm)	下顎側切歯 遠心間 (mm)	商品番号
		L	W	H			
Short タイプ	35	45	56	21	30.5-31.7	23.1-23.9	XPNLS35R 206860125S35R
	40	47	58	22	31.8-33.0	24.0-24.8	XPNLS40R 206860125S40R
	45	47	62	22	33.1-34.4	24.9-25.7	XPNLS45R 206860125S45R
	50	48	64	23	34.5-35.7	25.8-26.7	XPNLS50R 206860125S50R
	55	49	66	24	35.8-37.1	26.8-27.7	XPNLS55R 206860125S55R
	60	51	64	24	37.2-38.5	27.8-28.7	XPNLS60R 206860125S60R
	65	52	67	25	38.6-39.9	28.8-29.7	XPNLS65R 206860125S65R
	70	53	69	26	40.0-41.4	29.8-30.8	XPNLS70R 206860125S70R
Long タイプ	35	50	57	21	30.5-31.7	23.1-23.9	XPNLL35R 206860125L35R
	40	53	59	22	31.8-33.0	24.0-24.8	XPNLL40R 206860125L40R
	45	53	63	22	33.1-34.4	24.9-25.7	XPNLL45R 206860125L45R
	50	55	66	23	34.5-35.7	25.8-26.7	XPNLL50R 206860125L50R
	55	56	68	24	35.8-37.1	26.8-27.7	XPNLL55R 206860125L55R
	60	57	65	24	37.2-38.5	27.8-28.7	XPNLL60R 206860125L60R
	65	59	68	25	38.6-39.9	28.8-29.7	XPNLL65R 206860125L65R
	70	60	70	26	40.0-41.4	29.8-30.8	XPNLL70R 206860125L70R

販売名: マルチトレーナー 一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
医療機器認証番号: 223AKBZX00129000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)

RELATED PRODUCTS 関連商品

専用メジャリングデバイス

マルチ DB のサイズ選択で使用するメジャリングデバイスです (マルチ P2 と共用)。

上顎または下顎の側切歯遠心にメジャリングデバイスの凸部を合わせ反対側の側切歯遠心までの距離を目安にサイズを選択します。



リテーナーシャイン

矯正用リテーナー・マウスピース洗浄剤でマルチファミリーの装置の洗浄におすすめします。



グライディングキャップ / グライディングホルダー

シリコンなどの柔らかい素材のトリミングや粗研磨に使用します。



ウルトラトリム

シリコン素材の最終研磨に使用します。



商品名	商品番号
メジャリングデバイス	XPSIZER 206860119
専用ハンドル	ECXPMANCHE 206860110

※メジャリングデバイスは先端のシリコン製パーツを指します。

販売名: マルチトレーナー 一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
医療機器認証番号: 223AKBZX00129000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)

容量: 60 回分 (150g)

商品名	包装	商品番号
リテーナーシャイン 顆粒	24 RSKN	
リテーナーシャイン ボトルキャップ	1 RSC	206850800

商品名	サイズ	規格	包装	商品番号
グライディングキャップ	1	7.0mm	5	38230S1 206850852
グライディングキャップ	2	10.0mm	5	38230S2 206850853
グライディングキャップ	3	14.5mm	5	38230S3 206850854
グライディングホルダー	1	6.5mm	1	38230T1 206850855
グライディングホルダー	2	9.5mm	1	38230T2 206850856
グライディングホルダー	3	14.0mm	1	38230T3 206850857

商品名	包装	商品番号
ウルトラトリム ヘビー	6	43751M 206850366
ウルトラトリム ミディアム	12	43752M 206850367
ウルトラトリム ライト	12	43753M 206850368

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Europe (フランス)

*仕様・価格は2025年11月21日発売時点のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。