

# Polyamide Utility Hook

# Musashi

## ムサシ

### 汎用性の高いユーティリティフック

エラスティック、F.M. リングレットを同時に引っ掛けることができる「二刀流」の形状に設計しました。アライナー・リンガル・ラビアルを問わず、幅広い症例に適用できます。また、従来の審美アタッチメントでは掛けづらかったためのエラスティックも余裕をもってご使用いただくことが可能です。材質は透明度の高いポリアミド樹脂を採用し、審美的なユーティリティフックを目指しました。



2025.12.23  
Debut!!



リンガルブラケットとの併用例  
エラスティック (4oz 1/4) / F.M. リングレット (LXiIV) \*使用  
提供: GOSI 矯正歯科様

\*医療機器認証番号: 20500BZZ01136000 管理

### point1 引っ掛けやすい形状を追求


ベース面とフックの間に十分な空間を確保し、患者さんがエラスティックゴムを簡単に引っ掛けられるよう設計しました。さらに、頬粘膜への負担を軽減するため、フックには丸みを持たせ、長さや形状、角度にもこだわり、使いやすさを追求しました。



アライナーとの併用例  
提供: GOSI 矯正歯科様


### point2 クリスタブレース3と同様のスタッドベースを採用

ベースの潰し加工によりアンダーカットを作り、脱離しにくい形状を目指しました。また、歯面のカーブに沿うように内側のスタッドベースをゆるやかに湾曲させています。

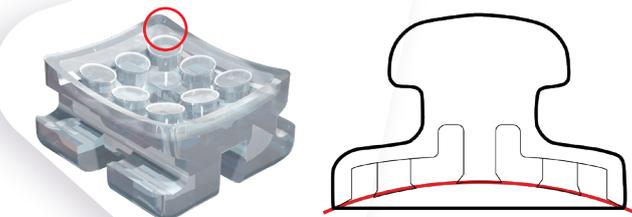

### point3 マーキングの付与

透明度が高いため、フックの向きが分かりやすいよう先端にマーキングを付与しました。これにより、エラスティックを掛ける方向に合わせたボンディングが可能になり、患者さんがエラスティックを掛けやすい仕様となっています。

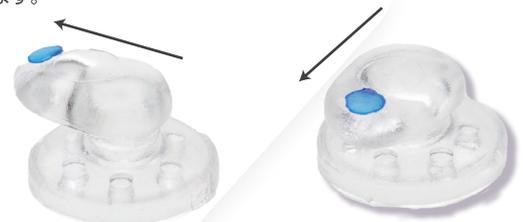

包装: 10個入

商品名	高さ	商品番号
ポリアミドユーティリティフック Musashi	2.38mm	PUM 206880197

販売名: クリスタブレース 一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
医療機器認証番号: 222AGBZX00149000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)

【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F  
TEL: 03-5281-4711 FAX: 03-5281-4716  
https://www.jmortho.co.jp/

【製造販売】株式会社モリタデンタルプロダクツ

〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11

\*仕様・価格は2025年12月23日発売時点のものです。\*消費税は含まれておりません。\*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。