


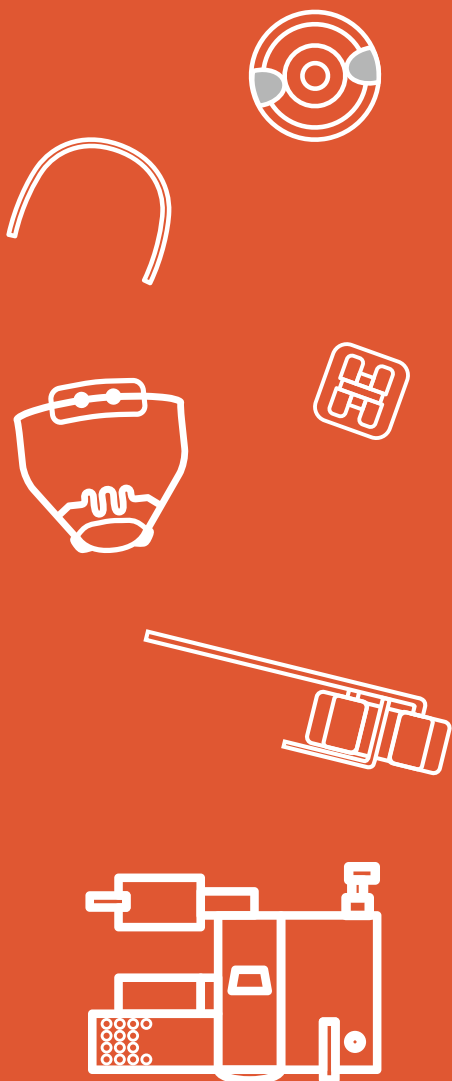

TUBES



02

チューブ

- チューブの選択におけるヒント 58
- バッカルチューブ（モリタデンタルプロダクツ） 59
- カンノ バッカルチューブ（スタンダード） 63
- カンノ バッカルチューブ（ロスタイプ） 64
- BSC チューブ／各種チューブ 65
- ユーティリティアタッチメント／
C-HOOK チューブ 66
- カンノ チューブ 67
- UCS ユーキャンシーチューブ 68
- FLI ミニチューブ 69
- FLI チューブ（ロスタイプ） 70

チューブの選択におけるヒント

①トルク・アンギュレーションの選択

予めトルクやアンギュレーションを入れたストレートワイヤー用のチューブは、開発者のコンセプトによりトルクやアンギュレーションの度数が少しずつ異なります。

どのコンセプトを採用するかはドクターの診断と治療方針によります。

主なコンセプトごとの度数についてはブラケットのページをご参照下さい。

② DBS 用、ウェルド用の選択

チューブには、歯牙に直接貼り付けて使用する DBS（ダイレクト・ボンディング・システム）用と、バンドに溶接して使用するウェルド用があります。

ヘッドギア用のスロットを持つチューブは、大きな力がかかるため、ウェルド用のチューブが多く用いられます。



DBS 用

接着材等を使用して歯牙に直接貼り付けるタイプのチューブです。

接着材等を塗布するためベース面が大きく、メッシュになっているのが一般的です。



ウェルド用

バンドに溶接して使用するチューブです。

ベース面が DBS 用に比べて小さく、スムーズになっているのが一般的です。

③スロットの数の選択

	シングルチューブ	スロットが1つのチューブ。主にアーチワイヤーを通して使用します。第2大臼歯はシングルチューブを使用することが一般的です。
	ダブルチューブ	スロットが2つあるタイプのチューブで、アーチワイヤーを通すスロットの他に、顎外装置向けに大きめのスロットがあります。
	ツインチューブ	スロットが2つあるタイプのチューブで、同じ大きさのスロットが並んでついています。 (例：.018"×.025"ならば同じ.018"×.025"のスロットがついている)
	トリプルチューブ	ツインチューブに、顎外装置向けの大きめのスロットがついた、3つスロットがあるタイプのチューブです。

④コンバーティブルタイプの必要性

チューブのスロット部分がキャップ式になっている「コンバーティブルチューブ」があります。

インスツルメントを使用し、キャップをはずすことで、ブラケットのように結紮して使用することができます。

また、主線を取り替える際、チューブの穴に通さずスロット部に正面から挿入することができます。

⑤フックの必要性

フック付のチューブとブラケットなどを併用することにより、エラスティックやモジュールを使用した治療を行うことができます。

フックは近心歯頸部に位置するようにポジショニングすることが基本的な使用方法です。

⑥テクニックからの選択(例)


- バイオプログレッシブでは、主線と同じ太さのセクショナルワイヤーを使うので、上顎第1大臼歯にトリプルチューブ、下顎第1大臼歯にダブルチューブが用いられます。
- アレキサンダーの手法では、上顎第1大臼歯がヘッドギアのインナーボウが入るダブルチューブ、下顎第1大臼歯はシングルチューブが用いられます。



バックルチューブ



モリタデンタルプロダクツ

小さくコンパクトな口腔粘膜にやさしいチューブ

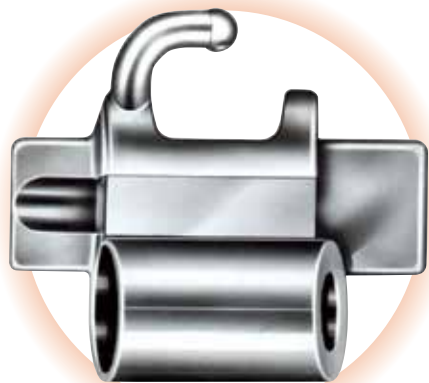

ワイヤー挿入口やフェイスボウの挿入口にはスロープをつけ、スムーズに入るようにしています。
また、チューブ自体をロープロファイルにし、患者さんの口腔内の違和感を軽減しています。

使いやすい設計

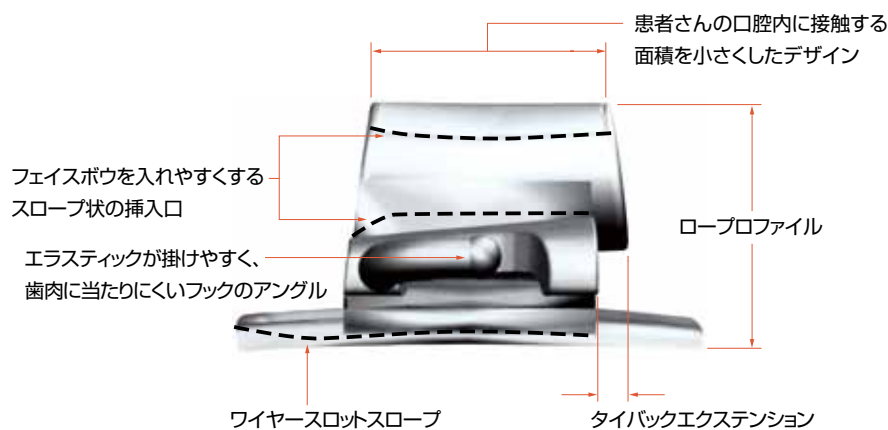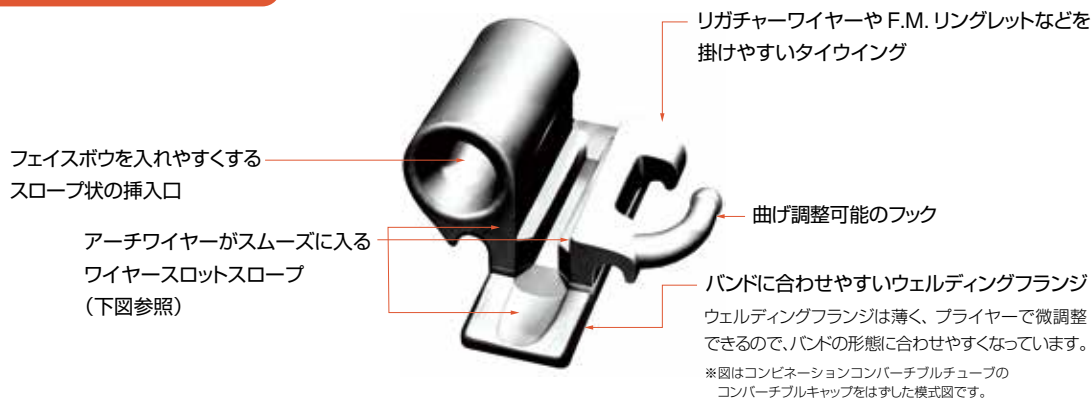

※図はコンビネーションコンバーチブルチューブを
歯肉側から見た模式図です。

バッカルチューブ

モリタデンタルプロダクツ

※ DBS・・・ダイレクトボンディング H.G.・・・ヘッドギアチューブ

トリプルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

	トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	H.G.	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット
	-10°	10°	3.5	.045"	ウェルド	R	BTT1003 2068801281003	BTT2003 2068801282003
						L	BTT1004 1004	BTT2004 2004

ダブルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

	トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット
	0°	0°	3.1	ウェルド	R	BTW1002 2068801241002	
					L	BTW1001 1001	
	-10°	10°	3.1	ウェルド	R	BTW1003 1003	BTW2003 2068801262003
					L	BTW1004 1004	BTW2004 2004
	0°	0°	3.1	DBS	R	BTW1008 2068801251008	
					L	BTW1007 1007	
	-10°	10°	3.1	DBS	R	BTW1009 1009	BTW2007 2068801272007
					L	BTW1010 1010	BTW2008 2008
	0°	0°	3.1	ウェルド	R	BTW1001 2068801241001	
					L	BTW1002 1002	
	-22°	0°	3.1	ウェルド	R	BTW1005 1005	BTW2005 2068801262005
					L	BTW1006 1006	BTW2006 2006
	0°	0°	3.1	DBS	R	BTW1007 2068801251007	
					L	BTW1008 1008	
	-22°	0°	3.1	DBS	R	BTW1011 1011	BTW2009 2068801272009
					L	BTW1012 1012	BTW2010 2010

コンビネーションコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

	トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	H.G.	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット
	0°	0°	4.0	.045"	ウェルド	R	BTCC1001 2068801231001	
						L	BTCC1002 1002	
	-10°	10°	4.0	.045"	ウェルド	R	BTCC1003 1003	BTCC2003 2068801232003
						L	BTCC1004 1004	BTCC2004 2004

医療機器認証番号 21000BZZ00657000 管理



バッカルチューブ

モリタデンタルプロダクツ

※ DBS・・・ダイレクトボンディング

シングルコンバーティブルチューブ フック付										包装：10個
		トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)		ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット	
6 6		0°	0°	3.1		ウェルド	R	BTC1002 2068801291002	BTC2002 2068801312002	
							L	BTC1001 1001	BTC2001 2001	
		0°	0°	4.1	ロング	ウェルド	R	BTC1006 1006		
							L	BTC1005 1005		
		-10°	10°	3.1		ウェルド	R	BTC1003 1003	BTC2003 2003	
							L	BTC1004 1004	BTC2004 2004	
		0°	0°	3.1		DBS	R	BTC1014 2068801301014	BTC2014 2068801322014	
							L	BTC1013 1013	BTC2013 2013	
		0°	0°	4.1	ロング	DBS	R	BTC1018 1018		
							L	BTC1017 1017		
		-10°	10°	3.1		DBS	R	BTC1015 1015	BTC2015 2015	
							L	BTC1016 1016	BTC2016 2016	
6 6		0°	0°	3.1		ウェルド	R	BTC1001 2068801291001	BTC2001 2068801312001	
							L	BTC1002 1002	BTC2002 2002	
		0°	0°	4.1	ロング	ウェルド	R	BTC1005 1005		
							L	BTC1006 1006		
		-10°	0°	3.1	ロートルク	ウェルド	R	BTC1009 1009	BTC2009 2009	
							L	BTC1010 1010	BTC2010 2010	
		-22°	0°	3.1		ウェルド	R	BTC1011 1011	BTC2011 2011	
							L	BTC1012 1012	BTC2012 2012	
		-22°	0°	4.1	ロング	ウェルド	R	BTC1007 1007		
							L	BTC1008 1008		
6 6		0°	0°	3.1		DBS	R	BTC1013 2068801301013	BTC2013 2068801322013	
							L	BTC1014 1014	BTC2014 2014	
		0°	0°	4.1	ロング	DBS	R	BTC1017 1017		
							L	BTC1018 1018		
		-10°	0°	3.1	ロートルク	DBS	R	BTC1021 1021	BTC2021 2021	
							L	BTC1022 1022	BTC2022 2022	
		-22°	0°	3.1		DBS	R	BTC1023 1023	BTC2023 2023	
							L	BTC1024 1024	BTC2024 2024	
		-22°	0°	4.1	ロング	DBS	R	BTC1019 1019		
							L	BTC1020 1020		

※ロングタイプは近遠心幅が通常品より約1.0mm長くなっており、よりローテーションコントロールがしやすくなっています。

バイカスピッドチューブ										包装：10個
		トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	フック	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット		
.54 .45		-10°	0°	2.2	フック付	DBS	R	BTB1006 2068801331006		
							L	BTB1005 1005		
4 4		-10°	0°	2.2	フック付	DBS	R	BTB1005 1005		
							L	BTB1006 1006		
5 5		-17°	0°	2.2	フック付	DBS	R	BTB1007 1007		
							L	BTB1008 1008		

医療機器認証番号 21000BZZ00657000 管理

バッカルチューブ

モリタデンタルプロダクツ

※ DBS…ダイレクトボンディング

セカンドモーラーチューブ

包装：10個

	トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	フック	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット
7 7	0°	0°	3.4	フック付	ウェルド	R	BTS1003 2068801341003	BTS2002 2068801362002
						L	BTS1002 1002	BTS2001 2001
	-10°	6°	3.4	フック付	ウェルド	R	BTS1004 1004	BTS2003 2003
						L	BTS1005 1005	BTS2004 2004
	0°	0°	3.4	フック付	DBS	R	BTS1011 2068801351011	BTS2010 2068801372010
						L	BTS1010 1010	BTS2009 2009
	-10°	6°	3.4	フック付	DBS	R	BTS1012 1012	BTS2011 2011
						L	BTS1013 1013	BTS2012 2012
7 7	0°	0°	3.4	フック付	ウェルド	R	BTS1002 2068801341002	BTS2001 2068801362001
						L	BTS1003 1003	BTS2002 2002
	-17°	0°	3.4	フック付	ウェルド	R	BTS1008 1008	BTS2007 2007
						L	BTS1009 1009	BTS2008 2008
	-27°	6°	3.4	フック付	ウェルド	R	BTS1006 1006	BTS2005 2005
						L	BTS1007 1007	BTS2006 2006
	0°	0°	3.4	フック付	DBS	R	BTS1010 2068801351010	BTS2009 2068801372009
						L	BTS1011 1011	BTS2010 2010
	-17°	0°	3.4	フック付	DBS	R	BTS1016 1016	BTS2015 2015
						L	BTS1017 1017	BTS2016 2016
	-27°	6°	3.4	フック付	DBS	R	BTS1014 1014	BTS2013 2013
						L	BTS1015 1015	BTS2014 2014

ミニベースチューブ

包装：10個

	トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	フック	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット
7 7	0°	0°	3.4	フック付	DBS	R	BTM1008 2068801391008	BTM2008 2068801392008
						L	BTM1007 1007	BTM2007 2007
	-10°	6°	3.4	フック付	DBS	R	BTM1011 1011	BTM2011 2011
						L	BTM1012 1012	BTM2012 2012
	0°	0°	3.4	フック付	DBS	R	BTM1007 2068801391007	BTM2007 2068801392007
						L	BTM1008 1008	BTM2008 2008
	-27°	6°	3.4	フック付	DBS	R	BTM1015 1015	BTM2015 2015
						L	BTM1016 1016	BTM2016 2016

メジアルベースチューブ フック付

包装：10個

	トルク	ディスタ ルオフ セット	スパン (mm)	ウェルド/ DBS	Right/Left	.018スロット	.022スロット
7 7	0°	0°	2.2	DBS	R	BTME1002 2068801381002	BTME2002 2068801382002
					L	BTME1001 1001	BTME2001 2001
	-10°	0°	2.2	DBS	R	BTME1003 1003	BTME2003 2003
					L	BTME1004 1004	BTME2004 2004
	0°	0°	2.2	DBS	R	BTME1001 2068801381001	BTME2001 2068801382001
					L	BTME1002 1002	BTME2002 2002
	-27°	0°	2.2	DBS	R	BTME1005 1005	BTME2005 2005
					L	BTME1006 1006	BTME2006 2006

医療機器認証番号 21000BZZ00657000 管理



バックルチューブ (スタンダード)

カンノ

※ DBS …ダイレクトボンディング H.G. …ヘッドギアチューブ

シングルチューブ

包装：10個

スパン (mm)		ウェルド / DBS		Right / Left	.018 スロット	.022 スロット
76 67 76 67	4.0	*1	ウェルド	UR / LL	SE-N6R 206860200N6R	ST-N6R 206860204N6R
				UL / LR	SE-N6L N6L	ST-N6L N6L
			フック付 ウェルド	UR / LL	SE-N6HR 206860202N6HR	ST-N6HR 206860206N6HR
				UL / LR	SE-N6HL N6HL	ST-N6HL N6HL
		*2	DBS	UR / LL	SE-N6BR 206860201N6BR	ST-N6BR 206860205N6BR
				UL / LR	SE-N6BL N6BL	ST-N6BL N6BL
			フック付 DBS	UR / LL	SE-N6BHR 206860203N6BHR	ST-N6BHR 206860207N6BHR
				UL / LR	SE-N6BHL N6BHL	ST-N6BHL N6BHL

*1 医療機器認証番号 15700BZZ01789000 管理
*2 医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

ワンピースシングルチューブ

包装：10個

スパン (mm)		ウェルド / DBS		Right / Left	.018 スロット
6 6 6 6	3.2	*1	ボールフック付 ウェルド	UR / LL	SE-600HR 206860177HR
				UL / LR	SE-600HL HL
6 6 6 6	3.2	*2	DBS	UR / LL	SE-600BR 206850709
				UL / LR	SE-600BL 206850708
			ボールフック付 DBS	UR / LL	SE-600BHR 206850707
				UL / LR	SE-600BHL 206850706
7 7 7 7	2.7	*2	DBS	UR / LL	SE-700BR 206850713
				UL / LR	SE-700BL 206850712
			ボールフック付 DBS	UR / LL	SE-700BHR 206850711
				UL / LR	SE-700BHL 206850710

*1 医療機器認証番号 15700BZZ01789000 管理
*2 医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

ダブルチューブ

包装：10個

スパン (mm) H.G.		ウェルド / DBS		Right / Left	.018 スロット
6 6 6 6	4.3	.045" 咬合側	フック付 ウェルド	UR / LL	DE-N6HR 206860216N6HR
				UL / LR	DE-N6HL N6HL

在庫限りで販売終了

医療機器認証番号 15700BZZ01789000 管理

コンバーティブルチューブ

包装：10個

スパン (mm)		ウェルド / DBS		Right / Left	.018 スロット	.022 スロット
6 6 6 6	4.5	フック付	ウェルド	UR / LL	CE-06R 20635093406R	CT-06R 20635093506R
				UL / LR	CE-06L 06L	CT-06L 06L
		ボールフック付	ウェルド	UR / LL	CE-600R 206850662	
				UL / LR	CE-600L 206850661	
※ロングベースタイプ (ベース幅 7.0mm)		ボールフック付	DBS	UR / LL	CE-600BR 206850558	
				UL / LR	CE-600BL 206850557	

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

ダブルコンバーティブルチューブ

包装：10個

スパン (mm) H.G.		ウェルド / DBS		Right / Left	.018 スロット
6 6 6 6	4.5	.045" 咬合側	ボールフック付 ウェルド	UR / LL	DCE-600HR 206850665
				UL / LR	DCE-600HL 206850664

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

バッカルチューブ (ロスタイプ)

カンノ

※ DBS …ダイレクトボンディング H.G. …ヘッドギアチューブ

ダブルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

トルク	アンギュレーション	ディスタルオフセット	スパン(mm)	H.G.	ウェルド/DBS	Right / Left	.018 スロット	.022 スロット
6 6	-14°	0°	14°	3.2	.045" 咬合側	ウェルド	R KE-1R 206860223U6R	KT-1R 206860224U6R
						L KE-1L	U6L KT-1L	U6L
	-14°	0°	14°	4.0	.045" 咬合側	DBS	R KE-1BR 206860225U6R	KT-1BR 206860226U6R
						L KE-1BL	U6L KT-1BL	U6L
6 6	-25°	0°	4°	3.2		ウェルド	R KE-2R 206860223L6R	KT-2R 206860224L6R
						L KE-2L	L6L KT-2L	L6L
	-25°	0°	4°	4.0		DBS	R KE-2BR 206860225L6R	KT-2BR 206860226L6R
						L KE-2BL	L6L KT-2BL	L6L

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

トリプルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

		トルク	アンギュレーション	ディスタルオフセット	スパン(mm)	H.G.	ウェルド/DBS	Right / Left	.018 スロット	.022 スロット	
6 6			-14°	0°	14°	3.2	.045" 咬合側	ウェルド	R	KE-3R 206860227U6R	KT-3R 206860228U6R
								L	KE-3L	U6L	KT-3L U6L
			-14°	0°	14°	4.0	.045" 咬合側	DBS	R	KE-3BR 206860229U6R	
								L	KE-3BL	U6L	

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

シングルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

トルク アンギュレーション ディスタルオフセット スパン(mm)					ウェルド / DBS	Right / Left	.018 スロット		.022 スロット		
	6 6	-14°	0°	14°	3.2	ウェルド	R	KE-4R	206860231U6R	KT-4R	206860232U6R
							L	KE-4L	U6L	KT-4L	U6L
		-14°	0°	14°	3.2	DBS	R	KE-4BR	206860233U6R	KT-4BR	206860234U6R
							L	KE-4BL	U6L	KT-4BL	U6L
		-14°	0°	7°	3.2	DBS	R	KEL-4BR	2068603274BR		
		※ロングベースタイプ (ベース幅 7.0mm)					L	KEL-4BL	4BL		
	6 6	-25°	0°	4°	3.2	ウェルド	R	KE-7R	206860231L6R	KT-7R	206860232L6R
							L	KE-7L	L6L	KT-7L	L6L
		-25°	0°	4°	3.2	DBS	R	KE-7BR	206860233L6R	KT-7BR	206860234L6R
							L	KE-7BL	L6L	KT-7BL	L6L
		-25°	0°	4°	3.2	DBS	R	KEL-7BR	2068603277BR		
		※ロングベースタイプ (ベース幅 7.0mm)					L	KEL-7BL	7BL		

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

シングルチューブ フック付

包装：10個

	トルク	アンギュレーション	ディスタルオフセット	スパン(mm)		ウェルド/DBS	Right / Left	.018 スロット	.022 スロット	
	7 7	-14°	0°	14°	2.8	*1	ウェルド	R	KE-6R 206860235U7R	KT-6R 206860236U7R
								L	KE-6L U7L	KT-6L U7L
	7 7	-14°	0°	14°	3.2	*2	DBS	R	KE-6BR 206860237U7R	KT-6BR 206860238U7R
								L	KE-6BL U7L	KT-6BL U7L
	7 7	-25°	0°	4°	2.8	*1	ウェルド	R	KE-5R 206860235L7R	KT-5R 206860236L7R
								L	KE-5L L7L	KT-5L L7L
		-25°	0°	4°	3.2	*2	DBS	R	KE-5BR 206860237L7R	KT-5BR 206860238L7R
								L	KE-5BL L7L	KT-5BL L7L

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

*1 医療機器認証番号 15700BZZ01789000 管理

*2 医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理



BSC チューブ／各種チューブ

カンノ／RMO

※ DBS …ダイレクトボンディング H.G. …ヘッドギアチューブ

BSC チューブ

ツインチューブ フック付		包装：10個				
スパン (mm)	ウェルド /DBS	Right/Left	.018 スロット			
 7 7	4.0	ウェルド *1	UR	BSC-700R1	206850647	
			UL	BSC-700L1	206850645	
			LR	BSC-701R1	206850651	
			LL	BSC-701L1	206850649	
 4.0	DBS *2		UR	BSC-700R2	206850648	
			UL	BSC-700L2	206850646	
			LR	BSC-701R2	206850652	
			LL	BSC-701L2	206850650	

*1 医療機器認証番号 15700BZZ01789000 管理
*2 医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

コンバーティブルトリプルチューブ フック付		包装：10個				
スパン (mm)	H.G.	ウェルド /DBS	Right/Left	.018 スロット		
 6 6	4.3	.045" 咬合側	R	BSC-N60R	206860217	
			L	BSC-N60L	206860218	
3.2	.045" 咬合側	ウェルド	R	BSC-610R	206850642	
			L	BSC-610L	206850641	

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

コンバーティブルツインチューブ フック付		包装：10個				
スパン (mm)	ウェルド /DBS	Right/Left	.018 スロット			
 6 6	4.3	ウェルド	R	BSC-N61R1	206860219	
			L	BSC-N61L1	206860220	
		DBS	R	BSC-N61R2	206860221	
			L	BSC-N61L2	206860222	
3.2	ウェルド	R	BSC-611R	206850644		
		L	BSC-611L	206850643		

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

リンガルシース		包装：10個				
		ウェルド / DBS				
 6 6	 水平可撤式クワッドヘリックス用チューブ .036 (0.914mm)	ウェルド	A00148	206350143		
 6 6						
		ウェルド	A00186	206350157		


医療機器承認番号 16000BZY00356000 管理

ユーティリティーアタッチメント /C-HOOK チューブ カンノ


頬側・舌側どちらにも接着でき、MTM やリングリテーナーなどにも使用できるアタッチメントです。

ユーティリティーアタッチメント

包装：10個

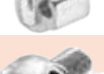	トルク	スロット	スロット幅	ウェルド / DBS	商品番号	
	0°	.018" × .025"	1.7mm	DBS	UA018B	206860244
 ショートスパン	0°	.018" × .025"	1.0mm	DBS	UA018SB	206860296
	0°	.022" × .028"	1.7mm	DBS	UA022B	206860297
	0°	.022" ラウンド	1.5mm	DBS	UA022RB	206860245
 ショートスパン	0°	.022" ラウンド	1.0mm	DBS	UA022RSB	206860294
 ショートスパン	0°	.028" ラウンド	1.0mm	DBS	UA028RSB	206860299
 ショートスパン	0°	.028" ラウンド	0.7mm	DBS	UA028RSBI	206850945
 フック&チューブタイプ	0°	.018" × .025" スロット	1.7mm	DBS	UA018HB	206860412
 フック付	0°	.023" ラウンド	1.5mm	DBS	UA023RBH	206860199

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

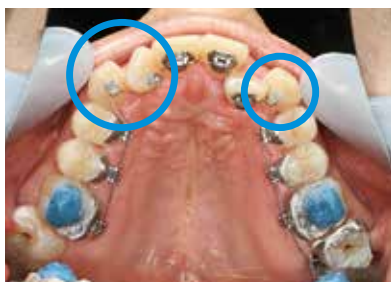

2017/4/8

UA022RB、UA022RSB 使用



2017/8/19

※臨床写真提供：松野 功 先生

縦長のベース面に対しチューブスロットが下方に位置しているため、ディープバイト症例において対合歯が接触しづらくなります。



UA022B を使用

※臨床写真提供：田中 聡 先生

C-HOOK チューブ


アンカースクリューやアライナーと併用が可能です。
フックの向きは2種類あり、上下左右を問わず、部位に合わせたボンディングが可能です。

		長さ	包装	商品番号	
C-HOOK チューブ (.022" × .028" スロット)	DBS 用	1	6.5mm	10	DBSHT1
	DBS 用	2	6.5mm	10	DBSHT2

2068601721

2

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

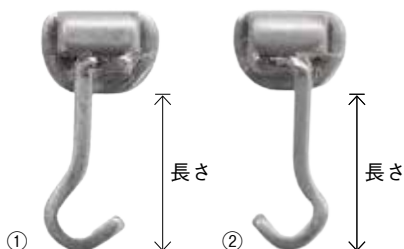



カンノチューブ

カンノ

※ DBS ...ダイレクトボンディング

シングルコンバーティブルチューブ ロングベースタイプ (ベース幅7.0mm)

スタンダードタイプ / ロスタイプ		包装：10個				
	トルク	ディスタルオフセット	ウェルド / DBS	Right / Left	.018 スロット	
	0°	0°	DBS	UR / LL	CE-600BR	206850558
				UL / LR	CE-600BL	206850557
	-14°	7°	DBS	R	KEL-4BR	2068603274BR
				L	KEL-4BL	4BL
	-25°	4°	DBS	R	KEL-7BR	2068603277BR
				L	KEL-7BL	7BL

キャップリムーバブルインスツルメントは186ページをご参照ください。

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

シングルチューブ 左右兼用フック付

スタンダードタイプ		包装：10個				
	トルク	スロット	スロット幅	ウェルド / DBS	商品番号	
	0°	.018" × .025"	3.2mm	DBS	SE1825BH	206860694

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

シングルチューブフック付き (リング用リボンワイズ)

スロットの縦横比が通常のタイプと逆になっています。

リボンワイズシングルチューブ 左右兼用フック付		包装：10個				
	トルク	スロット	スロット幅	ウェルド / DBS	商品番号	
	0°	.025" × .018"	3.2mm	DBS	SE2518BH	206860548

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

チューブラ (シングルブラケット&チューブ)

チューブとしてもブラケットとしても使用できます。

チューブは .018" × .018" サイズ、ブラケットスロットは .018" × .025" です。

チューブラ		包装：10個				
	トルク	スロット	スパン	ウェルド / DBS	商品番号	
	0°	.018" × .018" (チューブ) .018" × .025" (ブラケット)	0.8mm	DBS	KSBT018	206860424

在庫限りで販売終了

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

BUT バイトアップチューブ

舌側面にボンディングして、咬合挙上を補助します。.022" スロットを活用することで、チューブの役割を担います。

本体をツイン構造にしたことで、ディボンディングも容易になりました。

BUT バイトアップチューブ (ツインスロット)		包装：10個				
	トルク	ウェルド / DBS	.022 スロット			
	0°	DBS	BUT022B	206860295		

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理

UCS ユーキャンシーチューブ

カンノ

咬合面側から挿入しやすいように切れ込みを入れています。



バックルチューブにワイヤーを挿入する時…



(弊社従来品)
咬合面側から挿入口は見えません。



(UCS チューブ)
咬合面側から挿入口が見えます。

舌側転位している歯牙へのワイヤー挿入も容易にできます。



拡大
→



ワイヤーを白色に
画像処理しています。

大臼歯部が舌側転位している症例において挿入口が咬合面側から見えるので、ワイヤーの挿入が容易です。

スタンダードタイプ フック付

包装：10個

	トルク	ウェルド / DBS	Right / Left	.018 スロット	
	0°	DBS	UR / LL	UCS67BHR	206860247
	0°	DBS	UL / LR	UCS67BHL	206860246

ロスタイプ フック付

包装：10個

	トルク	オフセット	ウェルド / DBS	Right / Left	.018 スロット	
	-14°	7°	DBS	UR	UCSR7BHUR	206860326UR
				UL	UCSR7BHUL	UL
	-25°	6°	DBS	LR	UCSR7BHLR	LR
				LL	UCSR7BHLL	LL

MBT タイプ フック付

包装：10個

	トルク	オフセット	ウェルド / DBS	Right / Left	.022 スロット	
	-14°	10°	DBS	UR	UCSM67BHUR	206860173UR
	-14°	10°	DBS	UL	UCSM67BHUL	UL
	-20°	0°	DBS	LR	UCSM6BHLR	206860174LR
	-20°	0°	DBS	LL	UCSM6BHLL	LL
	-10°	5°	DBS	LR	UCSM7BHLR	206860175LR
	-10°	5°	DBS	LL	UCSM7BHLL	LL

リンガルタイプ フック付

包装：10個

	トルク	ウェルド / DBS	Right / Left	.018 スロット	
	9°	DBS	UR	UCSL09BHR	206860546
	9°	DBS	UL	UCSL09BHL	206860547

在庫限りで販売終了

医療機器認証番号 20100BZZ00700000 管理


※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



FLI ミニチューブ

RMO

RMO 社製「FLI シリーズ」の第2大臼歯用ミニチューブです。
従来の FLI チューブよりも小さく、ロープロファイルになったことで患者さんの快適性も向上しました。

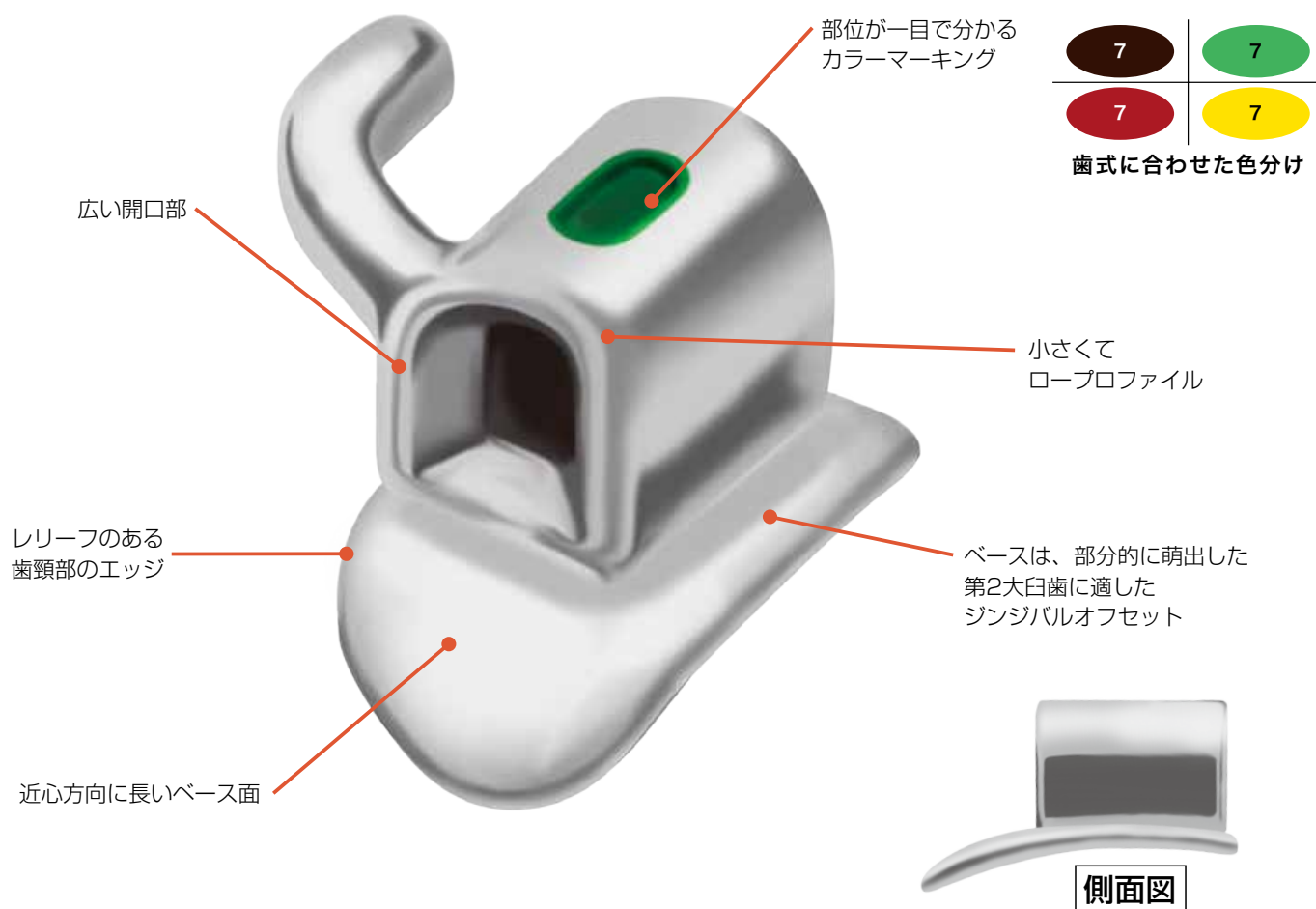

FLI ミニチューブ シングル 上顎用 DBS フック付										包装：10個
	トルク	アンギュレーション	スパン (mm)	Right/Left	.018スロット		.022スロット			
	7 7	0°	0°	2.5	R	A08800	2068604828800	A08806	2068604828806	
		0°	0°	2.5	L	A08801	8801	A08807	8807	
		-10°	0°	2.5	R	A08802	8802	A08808	8808	
		-10°	0°	2.5	L	A08803	8803	A08809	8809	
		-14°	0°	2.5	R	A08804	8804	A08810	8810	
		-14°	0°	2.5	L	A08805	8805	A08811	8811	

FLI ミニチューブ シングル 下顎用 DBS フック付										包装：10個
	トルク	アンギュレーション	スパン (mm)	Right/Left	.018スロット		.022スロット			
	7 7	0°	0°	2.5	R	A08812	2068604828812	A08818	2068604828818	
		0°	0°	2.5	L	A08813	8813	A08819	8819	
		-14°	0°	2.5	R	A08814	8814	A08820	8820	
		-14°	0°	2.5	L	A08815	8815	A08821	8821	
		-25°	0°	2.5	R	A08816	8816	A08822	8822	
		-25°	0°	2.5	L	A08817	8817	A08823	8823	

医療機器認証番号 223AKBZX00131000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

FLI チューブ

RMO

FLI[®] Flared Lead In T U B E

部位が一目で分かるマーカー




歯式に合わせた色分け


把持しやすいノッチ

摩擦を抑える
広い出口

解剖学的形態

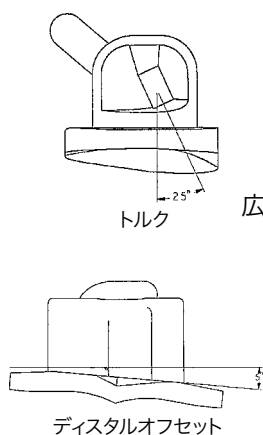

広い開口部

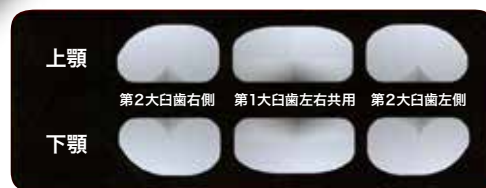

FLI チューブ シングルロス上顎用 DBS フック付

包装：10個

	トルク	アンギュレーション	ディスタルオフセット	スパン(mm)	Right/Left	.018スロット	.022スロット
6 6	-10°	0°	0°	4.6	R	A08730 2068604808730	A08734 2068604808734
	-10°	0°	0°	4.6	L	A08731 8731	A08735 8735
ディスタルオフセット付-10°	-10°	0°	10°	4.6	R	A18750 2068604818750	A18754 2068604818754
	-10°	0°	10°	4.6	L	A18751 8751	A18755 8755
7 7	-10°	0°	0°	3.6	R	A08732 2068604808732	A08736 2068604808736
	-10°	0°	0°	3.6	L	A08733 8733	A08737 8737
ディスタルオフセット付-10°	-10°	0°	10°	3.6	R	A18752 2068604818752	A18756 2068604818756
	-10°	0°	10°	3.6	L	A18753 8753	A18757 8757

FLI チューブ シングルロス下顎用 DBS フック付

包装：10個

	トルク	アンギュレーション	ディスタルオフセット	スパン(mm)	Right/Left	.018スロット	.022スロット
6 6	-25°	0°	0°	4.6	R	A08740 2068604808740	A08744 2068604808744
	-25°	0°	0°	4.6	L	A08741 8741	A08745 8745
ディスタルオフセット付-25°	-25°	0°	5°	4.6	R	A18758 2068604818758	A18762 2068604818762
	-25°	0°	5°	4.6	L	A18759 8759	A18763 8763
7 7	-25°	0°	0°	3.6	R	A08742 2068604808742	A08746 2068604808746
	-25°	0°	0°	3.6	L	A08743 8743	A08747 8747
ディスタルオフセット付-25°	-25°	0°	5°	3.6	R	A18760 2068604818760	A18764 2068604818764
	-25°	0°	5°	3.6	L	A18761 8761	A18765 8765

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 223AKBZX00131000 管理