



JM ORTHO

2025 → 2027
CONTENTS



BIOSTAR
SYSTEM



11

バイオスターシステム

- バイオスター 194
- バイオスターシステム 196
- ブラックスチェッカー 197
- デュランプラス（アルミバッグ）／デュラン 198
- CA Pro + 199
- ニューデュラソフト PD／ハードキャスト
コピープラス／バイオクリル C 200
- ニューインプレロンS PD／OSAMU ボンド 201
- バイオプラス XTREME 202
- バイオプラス 203
- その他 204
- アプライアンス製作事例 206

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY
TREATMENT

INTRAORAL
EXTRAORAL

EXPANSION
SCREWS

I-station C

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR
SYSTEM

LABORATORY
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM
SYSTEM

COA
SOFTWARE

BOOKS

バイオスター VII

ショイデンタル

BIOSTAR

加圧成型器バイオスターはバーコードスキャンによるコード入力によりコンピュータが加熱温度、加熱時間、冷却時間をコントロールします。圧接面を加熱する方式のため精密な成型が可能です。

即熱ヒーター採用

数秒でヒーターが作業温度に達します。

6気圧採用

適合性の良い高精度な成型が可能です。

深いプレッシャーチャンバー

高さのある模型の成型も可能です。

infoメニュー

infoメニューでは使用方法、安全情報、技作業のヒントなどの照会ができます。(表示言語は英文です)

カラー液晶ディスプレイ

コード、現在温度、設定時間、設定温度、残り時間、設定圧力等の情報を、フルカラーで見やすく表示します。また、技作業のヒント、操作方法や動画マニュアルを表示できます。

深いモデルカップ

ステンレスペレットで埋めさせることにより、マウンティングプレートが付いたままの模型を使用できます。


使いやすいドロワー

シャッターと連動しておりステンレスペレットの回収が容易な引き出しです。

バーコードリーダー

プレートに印刷されているバーコードをこの下の半円形の板の上に置くと、プレート情報を読み取り、自動的に加熱時間、冷却時間が入力されます。

設置スペースの目安 (mm)

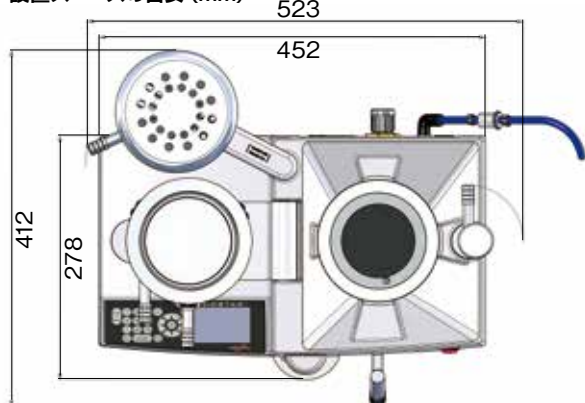

※設置には背面に100mm以上、左右に50mm以上、接地面に500mm以上のスペースをおとり下さい。

仕様

商品番号	3021	206850619
電源	AC100V	50/60Hz
消費電力	750W	
圧力	5~6bar	
寸法	452 (W) × 278 (D) × 248 (H) mm	
重量	14.5kg	
付属品	ステンレスペレット (1.7kg)、電源コード、フィルター付ホース 2m	

※奥行278mmは、ヒーターをセットポジションにした時の寸法です。

※チャンバーをオープン時は、高さが380mmになります。

医療機器届出番号 13B2X00107000040 一般



バイオスター

ショイデンタル

使用法

STEP1 メインスイッチ

メインスイッチを入れ画面が変わるのを待ちます。



STEP2 模型のセット

模型をモデルプラットフォーム、またはモデルカップにセットします。



STEP3 コード入力

"code/scan" ボタンを押すとバーコードリーダーが発光しますので、使用するプレートに印刷されたバーコードを半円形の板の上に置き、そのプレートの加熱時間、冷却時間を読み取ります。
また、従来のようにマニュアルで、コード入力することもできます。マニュアル入力につきましては、取扱説明書をご確認ください。
コード入力が完了しましたら、プレートをバイオスターにセットします。



STEP4 加熱

ヒーターを矢印の方向に動かすと加熱時間がカウントダウンされ、加熱終了5秒前からカウントと共にアラームが鳴ります。加熱時間終了とともに5秒間アラームが鳴りますので、この間に次の加圧工程に移ります。



STEP5 加圧

ヒーターをレストポジションに戻し、プレッシャーチャンバーを模型にかぶせチャンバーロックを閉じると加圧されます。同時に冷却モードになり、冷却時間のカウントダウンを始めます。



STEP6 完成

冷却時間が終了したら"air" ボタンを押して排気を行います。排気終了後3秒待ってからロックハンドルを開け、ロッキングリングを動かしてからプレッシャーチャンバーを開きます。



使用方法／操作方法はこちら➡



ステンレスペレット／ペレットカバー



いずれもバイオスターⅦ購入時付属品です。
※ステンレスペレットならびにペレットカバーは付属品と単品購入時で容量・入数が異なります。

バイオスターで模型を埋没してプレスする時に使用します。

商品名	容量	商品番号
ステンレスペレット	1kg	3222 206360126

シリコン樹脂製で、ペレットが成型されたシートに入り込まないようにカバーします。

商品名	包装	商品番号
ペレットカバー ラージ	5枚入	3006 206360137
ペレットカバー スモール	5枚入	3007 206360138



ペレットカバーを使用すると、成型されたシートにペレットが入り込みにくくなります。
また、ペレットの飛散等による消費を軽減します。

ヒーティングサポート



バイオプラストの表面を加熱により軟化させる際に使います。スポーツマウスガードの圧痕付けや、ポジションナーの上下の合着時に使用します。

商品名	包装	商品番号
ヒーティングサポート	1個	3452 206360302

バイオスターシステム

主なバイオスター用各種プレートの特性

※厚み0.2mm以下のプレートは除く

軟らかい

硬い

バイオ
プラスト

バイオ
プラスト
XTREME

コピー
プラスト

コピー
プラストC

ハード
キャスト

UNI
Q+pd

CA
Pro+

ニュー
デュラソフトPD

ニュー
インプレ
ロンS PD

デュラン/
デュラン+

イン
プレ
ロン

バイ
オクリ
ルC

※詳細は各プレート掲載ページを参照ください

商品名	材質	レジン 接着性	使用目的	掲載 ページ
デュラン/デュラン+	PET-G	○	スプリント、ナイトガード、クリアリテーナー、サージカルスプリント	198ページ
CA Pro+	PET-G/TPU/PET-G	×	歯科咬合用スプリント	199ページ
ニューインプレロンS PD	Copolyester	△ ^(※1)	スプリント、OSAMUリテーナー、クリアリテーナー	201ページ
ニューデュラソフトPD	PET-G/TPU	○	スプリント、クリアリテーナー	200ページ
バイオプラスト	EVA	×	マウスガード、ポジショナー、模型複製印象(石膏)、チンカップ	202～ 203ページ
バイオプラスト XTREME	EVA	×	スポーツ用マウスガード	202ページ
コピープラスト	PE	×	模型複製印象(レジン)、ホワイトニングトレー	200ページ
コピープラストC	PP	×	クリアリテーナー	200ページ
ハードキャスト	PP	×	コーピング、ホワイトニングトレーのスペーサー	200ページ
バイオクリルC	PMMA	○	ホーレタイプリテーナー、ベッグタイプリテーナー、拡大床	200ページ
インプレロン	PS	○	個人トレー、チンカップ、咬合床	205ページ
イソフォランフィルム	PE	×	分離用シート、スペーサー	204ページ
スペースメインテナーフィルム	PVC	×	コーピングのスペーサー	204ページ
ブラックスチェッカー	PVC	×	咬合接触評価	197ページ
ポリプロピレンシート	PP	×	トランスファーマスク、スペーサー	205ページ
アライナーシート UNIQ+ pd	Copolyester	△ ^(※1)	アライナー、リテーナー	3ページ

※1 即時重合レジンには接着しますが、材質の特性上、即時重合レジンを使用することで材料が脆くなる可能性があります。そのため、即時重合レジンを用いた調整は推奨していません。

プレートの吸湿性と加熱時に発生する気泡について

デュラン各種、ニューインプレロンS PD、ニューデュラソフトPDならびにCA Pro+は、吸湿性の高い樹脂のため、保管環境によってはプレートが吸湿し、バイオスターでの加熱時に気泡が発生する可能性があります（右写真）。

乾燥した環境下で保管いただくことで吸湿を遅らせることができますが、プレートの材質上、完全に吸湿を防ぐことは難しいため、購入後はお早めの使用を推奨いたします。





ブラックスチェッカー

ショイデンタル

ブラックスチェッカーは睡眠ブラキシズムを評価する装置です。


ブラキシズムは歯の咬合性外傷を起こし、歯周組織が不健康な場合は高度な歯周炎に発展することがあります。また歯周組織が健康な場合は、異常咬耗や破折などを引き起こします。さらには咀嚼筋の異常緊張による疲労性疼痛、偏頭痛、肩こりが生じ、顎関節の疼痛や機能障害が生じることもあります。



ブラックスチェッカーを使用することで前歯・犬歯型は歯の負担の少ない良いブラキシズムで、前歯・犬歯・小臼歯・大臼歯型は負担の大きい生体に良くないブラキシズムということが評価できます。

睡眠時ブラキシズム 歯の接触部位による分類


作業側

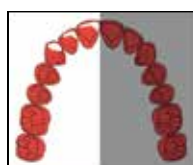

前歯・犬歯型




前歯・犬歯・小臼歯型

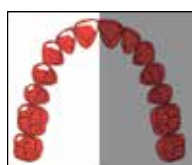


前歯・犬歯・小臼歯・大臼歯型

非作業側

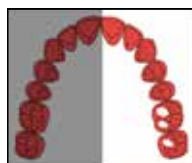

面状接触型

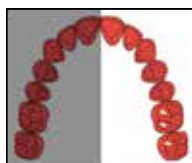

点状接触型

広義の歯ぎしり(Bruxism)

- 【1】「グライディング」タイプ
…ギリギリと上下の歯をこすり合わせる歯ぎしり
- 【2】「タッピング」タイプ
…カチカチと上下の歯を連続的にかみ合わせる歯ぎしり
- 【3】「クレンチング」タイプ
…ただ歯を強くかみしめる歯ぎしり

〈関連書籍〉



ブラキシズムの臨床

その発生要因と臨床的対応

著者 佐藤貞雄 玉置勝司 榎原功二

商品番号 805311 208050311

出版 クインテッセンス出版

治療法は犬歯にレジンを添加する、矯正する、補綴を行い、患者さんの負担の少ないグライディングパターンに変えることなどがあげられます。

詳しくは、弊社ウェブサイトの【文献・製品動画＞ブラックスチェッカー】をご確認ください。



学術レポートはこちら➡

簡易咬合接触解析装置

ブラックスチェッカー



ブラックスチェッカーシートは、0.1mmのPVCシートに食用赤色色素・熱硬化性樹脂があらかじめ塗布されているため、バイオスターやミニスターで加熱・加圧成型するだけでブラックスチェッカーを製作することができます。

商品名	包装	商品番号
ブラックスチェッカー	10枚	3209 206360119

医療機器届出番号 13B2X00107000A10 一般

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

デュランプラス（アルミバッグ）／デュラン

ショイデンタル

注意 デュランの吸湿について

出荷元のドイツは湿度が低いため問題は起きませんが、湿度の高い日本では、季節によって素材が吸湿することで、加熱中に気泡が発生することがあります。

弊社ではデシケーターを用いて保管時の吸湿を防ぐことをお勧めいたします。

デシケーター、シリカゲル等はお客様にてお求め下さい。アルミバッグは使用時以外、チャックを閉めて下さい。

吸湿時の対処法につきましては、弊社Webサイトをご参照下さい。

デュランは、バイオスターで使用するプレートの中で硬いものに属しますが、弾力性に富んだ透明度の高いプレートです。即時重合レジンと接着しますのでスプリントやナイトガードを製作するのに適しています。また、薄いサイズのものはインビジブルリテーナーにも使用できます。

デュランシリーズ ラインナップ

	サイズ展開 (mm)	入数	包装	スペーサー／保護フィルム
デュランプラス シリーズ	0.4～2.0	10枚 or 100枚	箱	片面にスペーサーとしても使用可能な保護フィルム付
デュラン	3.0のみ	10枚 or 100枚	箱	プレート本体のみ。スペーサーの「イソフォランフィルム」は別売

デュランプラス アルミバッグ



デュランプラスがアルミバッグ入りになりました！

「デュランプラス 10枚入 アルミバッグ」は「デュランプラス 10枚入」*が箱のままチャック付きアルミバッグに入っており、保管時の吸湿を防ぐことで、加熱による気泡発生リスクを最小限にとどめる仕様になっています。

*「デュランプラス 10枚入」は0.4mmを除き、販売終了いたしました。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
デュランプラス アルミバッグ	クリアー ○	0.5×125	10枚	3426V 206360253
		0.625×125		3428V 206360254
		0.75×125		3430V 206360255
		1.0×125		3432V 206360256
		1.5×125		3434V 206360257
		2.0×125		3436V 206360258

※デュランの四角プレートにつきましては、210ページをご覧ください。

※100枚入りのアルミバッグはございません。

医療機器認証番号 222AKBZX00102000 管理

デュランプラス



デュランプラスはデュランの片面に予め0.05mmのPEフィルムが貼り付けられています。PEフィルムが不要な場合、PEフィルムを爪などで引っ掻いて剥がしてからご使用ください。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
デュランプラス	クリアー ○	0.4×125	10枚	3472 206360252
		0.5×125		34262 206360213
		0.625×125	100枚	34282 206360214
		0.75×125		34302 206360215
		1.0×125		34322 206360216
		1.5×125		34342 206360217
		2.0×125		34362 206360218

医療機器認証番号 222AKBZX00102000 管理

デュラン



デュランは、紙箱にパッケージングされた10枚入りのパッケージです。3.0mmのみ取り扱いしております。PEフィルムは貼り付けられていません。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
デュラン	クリアー ○	3.0×125	10枚	3421 206360015
		3.0×125	100枚	34212 206360212

医療機器認証番号 222AKBZX00102000 管理

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



CA Pro+

ショイデンタル

CA Pro+



CA Pro+は歯科咬合用スプリントを作製する3層構造のプレートです。
外側の硬質層には共重合ポリエステル (PET-G) を使用し、内側の軟質層には熱可塑性ポリウレタン (TPU) を使用しております。



商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
CA Pro +	クリアー ○	0.5×125	10枚	3644 206360112
		0.625×125		3645 206360113
		0.75×125		3646 206360114

医療機器届出番号 13B2X00107000048 一般

※ CA Pro+は、片面に保護用として PE フィルムが貼付されています。
保護フィルム (PE フィルム) の使い方につきましては下記をご覧ください。

PEフィルムについて



デュランプラスならびにCA Pro+は片面にスペーサーとしても使用可能な0.05mmのPEフィルムが貼り付けられています。

3Dプリンターなどで製作された模型などを使用して装置を成型する場合は、保護フィルムを成型後にはがすことで模型上のニオイや残留物が装置側へ転移することを防ぐことが期待できます。


※成型前後、いずれのタイミングではがしてもかまいませんが、成型後はややがしにくくなります。

〈関連商品〉

商品カテゴリ	説明	掲載ページ
リテーナーシャイン	アライナーやマウスピースなど、バイオスターシステムで製作した装置を洗浄する際に使用可能な洗浄剤です。	P167
リテーナーケース	アライナーやマウスピースなど、バイオスターシステムで製作した装置を保管する際に使用可能なケースです。サイズ等については、右記ページにてご確認ください。	P168
IPR 用ダイヤバー	アライナー矯正向けにデザインされた IPR 用のバーです。	P168
アライナー矯正向けブライヤー	アライナー本体にホールを開けたり、突起物を成形したりすることができるブライヤーです。目的に合わせて、形状やデザインをお選びいただけます。	P174~176
オートストリッピングバー	ストリッピング専用のバーです。ブレード部分の厚みが複数あり、症例に合わせてお選びいただけます。	P190
フィニッシングバー各種	バイオスターシステムで製作した装置の切削や研磨などに使用可能なバーです。目的に合わせてお選びいただけます。	P211~212
ブロックアウト用材料 セットアップワックス	ブロックアウト用のレジンや可塑性シリコン、セットアップ模型作製時に使用可能なユーティリティワックスなど、複数種類取り揃えています。	P213
フィグゼーター	矯正装置を製作するのに便利な構成咬合器です。マウスガード作製時における対合歯の圧痕付与にもご使用いただけます。	P213
Musashi	エラスティック、F.M. リングレットを同時に引っ掛けることができる「二刀流」形状に設計し、アライナー・リングル・ラビアルを問わず、幅広い症例に適応可能です。	P5
エナジーパック	顎間ゴムです。色とアルファベットの組み合わせで張力とサイズがより分かりやすくなりました。ライト・ミディアムは 1 袋 (100 個入) からご用意しております。	P136
エラスティックプレーサー	患者さんが口腔内でエラスティックを装着する際の負担を軽減するサポートツールです。	P136

ニューデュラソフトPD／ハードキャスト／コピープラスト／バイオクリルC

ニューデュラソフトPD ショイデンタル

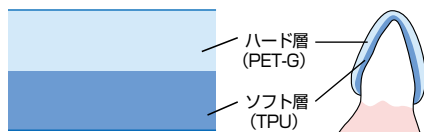

ニューデュラソフトPDは、PET-GとTPU（熱可塑性ポリウレタン）の2層構造です。患者さんの歯肉に軟らかい面（TPU）が接するため、アプライアンスを装着した際に痛がる患者さんにおすすめです。

プレートは乾燥された状態で真空パックされていますが、完全に吸湿を防ぐものではありません。保管時は高温多湿を避け、吸湿しないよう保管してください。

商品名	サイズ (mm)	軟/硬 (mm)	包装	商品番号
ニューデュラソフトPD (クリアー ○)	1.2×125	0.5/0.7	10枚	33421 206360227
	1.8×125	0.9/0.9		33881 206360230
	2.5×125	0.9/1.6		33871 206360231
	3.0×125	0.9/2.1		33411 206360228
	4.0×125	0.9/3.1		33451 206360229

医療機器届出番号 13B2X00107000036 一般

ハードキャスト ショイデンタル



ハードキャストは、バイオスターで使用するプレートの中で軟らかいものに属しますが、その中では硬いタイプです。非接着性樹脂ですので即時重合レジンにつきます。コーピング、ホワイトニングトレーのスペーサー等に使用できます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
ハードキャスト	ナチュラル ○	0.4×125	10枚	3194 206360100
		0.6×125		3195 206360101
		0.8×125		3200 206360102

医療機器承認番号 20600BZY00548000 管理

コピープラスト ショイデンタル



コピープラストは、非接着性の軟らかいプレートです。接着材や即時重合レジンがつかないという特性を生かして、ホワイトニングトレーやテンポラリークラウンの複印象、又はプラスチック模型用の複印象として使用できます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
コピープラスト	ナチュラル ○	0.5×125	10枚	3177 206360090
		0.75×125		3169 206360089
		1.0×125		3179 206360091
		1.5×125		3175 206360092
		2.0×125		3181 206360093

医療機器承認番号 20600BZY00561000 管理

コピープラストC ショイデンタル



ハードキャストとコピープラストの中間の硬さを有するプレートです。素材は摩擦しにくく弾力性にも富んでいますのでインビジブルリテーナー（クリアリテーナー）に適しています。クリアー色ですが若干乳白色に近いプレートです。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
コピープラストC	クリアー ○	1.0×125	10枚	3403 206360094

医療機器認証番号 304AKBZX00021000 管理

バイオクリルC ショイデンタル



バイオクリルCは、バイオスターで使用するプレートの中で硬いものに属します。PMMAで作られていますので、即時重合レジンと組み合わせた多様な用途に使用できます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
バイオクリルC	クリアー ○	2.0×125	10枚	3147 206360021
		3.0×125		3153 206360022
	クリアーピンク ○	2.0×125		3152 206360023

医療機器承認番号 20600BZY00417000 管理

※四角のプレートにつきましては、210ページをご覧ください。

ニューデュラソフトPD、ハードキャスト、バイオクリルCにつきましては四角のプレートはございません。



ニューインプレロンS PD / OSAMUボンド

ショイデンタル

ニューインプレロンS PD



ニューインプレロンS PDは、バイオスターで使用するプレートの中で硬いものに属しますが、超弾性プラスチックで、壊れにくい矯正装置を作ることができます。プレートは乾燥された状態で真空パックされていますが、完全に吸湿を防ぐものではありません。保管時は高温多湿を避け、吸湿しないよう保管してください。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
ニューインプレロンS PD	クリアー ○	0.5×125	10枚	33201 206360232
		0.75×125		33221 206360233
		1.0×125		33241 206360234
		1.5×125		33261 206360235
		2.0×125		33281 206360236
		3.0×125		33301 206360237

医療機器認証番号 228AKBZX00103000 管理

OSAMUボンド



OSAMUボンドは、ソフトリテーナー製作において2次プレスの際にバイオプラストとニューインプレロンS PDを合着させるためのプライマーです。バイオプラストの表面の分子を緩ませる効果があるため、次にプレスするプレートと強力に合着させることができます。

商品名	容量	商品番号
OSAMUボンド	10mL	3246 206360246

医療機器届出番号 13B2X00107000043 一般

ソフトリテーナー製作手順



1. 石膏模型上にソフトリテーナーの外形線を記入する



2. バイオプラスト1.5mmのプレスをする



3. 石膏模型の基底部に沿ってバイオプラストを切り取る



4. バイオプラストの咬合面を切り取る



5. 咬合面を切り取ったバイオプラスト



6. 筆でバイオプラストにOSAMUボンドを塗布する



7. ニューインプレロンS PD 0.75mmのプレスをする



8. 外形線に沿って辺縁の仕上げをする



9. 完成

出典: 吉井修先生「ソフトリテーナーボンドEXIによるソフトリテーナーの改良」より

バイオプラスト XTREME

バイオプラストシリーズに**新**たなスポーツマウスガード用プレート

バイオプラスト XTREME (エクストリーム)

BIOPLAST®

XTREME



EVA樹脂製の2層構造のプレートで、ハード部分とソフト部分とで構成されています。

ハード部分で前歯部を覆うようにプレスすることで、正面からの衝撃に対する防御性能の高いスポーツ用マウスガードが作製できます。

注: 本品の成型には以下のSCHEU-DENTAL製純正機器が必要です。

ミニスター: 全ての型で使用可能 バイオスター: 4型以降で使用可能

プレート構造

V字型の部分は、従来のバイオプラストよりも硬さを有しており、前歯部をより保護することができます。
また、ハード部分がV字型をしていることにより、模型の位置を変えることで、個々のユーザーの前歯部の幅に合わせてプレスすることが可能です。


V字型の外側は、従来のバイオプラストと同様の硬さを有しています。



2層構造で圧痕の付与や補強材の挿入も可能に!

従来のバイオプラスト クリアー(軟質)の層とV字型を有する(硬・軟質)層の2層構造です。従来バイオプラスト側を外側にして成型することで、ヒーティングサポートとフィグセーター等の構成咬合器を用いて、対合歯の圧痕を付与することが可能です。また、デュランプラス(0.75mm・別売)で作製した補強材を本品で成型したスポーツ用マウスガードの前歯部に乗せ、2層目のバイオプラストクリアー(2.0mm・別売)をプレスし熱圧着することで、さらに前歯部の防御性能を高めたスポーツ用マウスガードを作製することができます。

*補強材を使用したスポーツ用マウスガードは、4.0mmのバイオプラスト XTREMEで適用可能です。
5.0mmはスポーツ用マウスガードが厚くなりすぎるため、推奨できません。

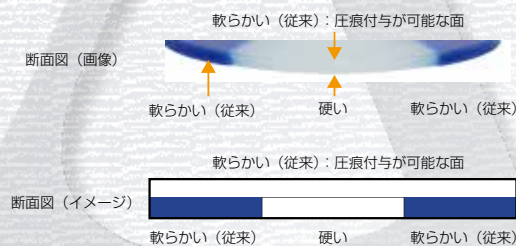

バイオプラスト XTREME ショイデンタル



サイズ (mm)	色	包装	商品番号	
4.0×125	レッド	1枚	3295S	206360109R
	ブルー		3296S	206360109BL
	ブラック		3297S	206360109BLK
	クリアー		3298S	206360109C
5.0×125	レッド		3286S	206360107R
	ブルー		3287S	206360107BL
	ブラック		3288S	206360107BLK
	クリアー		3289S	206360107C
4.0×125	レッド	10枚	3295	206360108R
	ブルー		3296	206360108BL
	ブラック		3297	206360108BLK
	クリアー		3298	206360108C
5.0×125	レッド		3286	206360106R
	ブルー		3287	206360106BL
	ブラック		3288	206360106BLK
	クリアー		3289	206360106C


※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



バイオプラスト

バイオプラスト

ショイデンタル

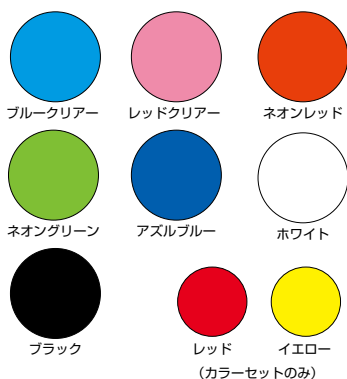

バイオプラスト用分離材

ショイデンタル



フィニッシングリキッド

リンカイ



バイオプラストは、バイオスターで使用するプレートの中で軟らかいものに属します。材質はEVAで、マウスガードやポジションナーのような弾性を必要とする装置に使用できます。カラーやパターンが豊富ですが、ラミネートタイプ（多層構造）にして色やパターンを組み合わせることにより、更にバリエーションを増やすことができます。バイオプラストは即時重合レジンと接着できませんが、バイオプラスト同士を加熱軟化して圧着することができます。（バイオプラスト同士の圧着にはプライマー等は不要です。）

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
バイオプラスト	クリアー ○	1.0×125	10枚	3270
		1.5×125		3183
		2.0×125		3185
		3.0×125		3187
		4.0×125		3188
		5.0×125		3374

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
バイオプラスト カラー	ブルークリアー ○	3.0×125	10枚	3356
	レッドクリアー ○			3355
	ネオンレッド ○			3352
	ネオングリーン ○			3353
	アズルブルー ○			3354
	ホワイト ○			3445
	ブラック ○			3448
	カラーセット ○			3271

カラーセット：クリアーと各色1枚入

※レッドとイエロー（3.0mm）の単品の取扱いはしていません

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
バイオプラスト マルチカラー	ドイツ ○	3.0×125	10枚	3390
	フランス ○			3391
	イタリア ○			3392
	スペイン ○			3393
	スウェーデン ○			3394
	アトランティス ○			3397
	マルチカラーセット ○			3400

マルチカラーセット 各色1枚入

※ブラジル、トランシルバニア、ホワイトドット、グリーンドットの単品の取扱いはしていません
医療機器承認番号 20500BZY00731000 管理

バイオプラストをプレスする直前に模型に塗布しておく、模型表面に薄い膜をつくり、滑沢で透明度の高い製作物を作ることができます。模型全体ではなく、必要箇所のみ筆等で塗布し、エアーで軽く吹き飛ばしてください。

商品名	容量	商品番号
バイオプラスト用分離材	500mL	3189

マウスガードなどバイオプラストシリーズで製作した装置の辺縁を仕上げるためのものです。綿棒等に含ませて艶を出したい所を強く擦るようにして磨きます。人体に有害な成分は含んでおりません。（主成分：ユーカリオイル）

商品名	容量	商品番号
フィニッシングリキッド	250mL	4466

※バイオプラストの四角のプレート（クリアーのみ）につきましては、210ページをご覧ください。

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

その他

ショイデンタル

イソフォランfoil



レジン分離材の代わりに分離用シートとして使用できるほか、スペーサーとしても使用できます。石膏とプレートが直接触れないため、成型物の透明度がアップします。

併用可能なプレートは、ニューインプレロンS PD、ニューデュラソフトPD、バイオクリルCです。

デュランプラス、CA Pro+は、すでにスペーサーとしても使用可能な保護フィルムがついているため、不要です。ただし、保護フィルムをはがしてプレートをご使用いただく場合には、併用が可能です。

バイオプラストにはご使用いただけませんので、ご注意ください。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
イソフォランfoil	ナチュラル ○	0.1 × 125	100枚	3207

206360123

イソフォランfoilの使い方

イソフォランfoilは、厚さ0.1mmの非常に薄いポリエチレンfoilで、レジンや各種ハードプレートと着かない性質を持つプレートです。

※バイオプラストは貼り付いてしまうため併用不可

- 薄いスペーサーとして使用できます。
- 石膏がプレートに直接触れないため、プレートの透明度を保つことができます。
- レジン分離材の代わりとなる分離用シートとして使用することができます。
- イソフォランfoilの滑りによって模型からプレートが外しやすくなります。



イソフォランfoilを模型にプレスします



基底面に沿ってカットします



2枚目のプレートとの間に空気が溜まらないように歯間部や鼓形空隙などに切り込みを入れます



イソフォランfoilをつけたまま、他種のプレートをプレスします。成型後、イソフォランfoilは剥がしてください

スペースメインテナーfoil



スペースメインテナーfoilを使用することで、模型からプレートを外しやすくなるほか、スペーサーとしても使用できます。

また、模型とプレートが直接触れないため、成型物の表面がより滑らかになります。

併用可能なプレートは、コピープラスト、コピープラストC、ハードキャストです。

バイオプラストにはご使用いただけませんので、ご注意ください。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
スペースメインテナーfoil	クリアー ○	0.1 × 125	100枚	3202


206360120



その他

インプレロン

ショイデンタル

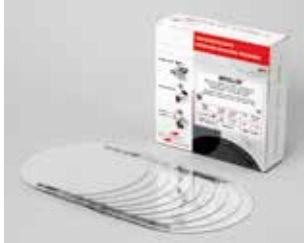

インプレロンは、バイオスターで使用するプレートの中で硬いものに属します。即時重合レジンとの接着性もあり、個人トレー、蟬義歯のベースプレート、チンカップ等の製作に適しています。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
インプレロン	クリアー ○	2.0×125	10枚	3164 206360030
	クリアー ○	3.0×125		3168 206360031

医療機器承認番号 20600BZY00464000 管理

インプレッショントレーハンドル

ショイデンタル



プラスチック製の個人トレー用ハンドルです。インプレロン等をプレスして製作したトレーに即時重合レジンで接着します。

商品名	包装	商品番号
インプレッショントレーハンドル	10個入	3216 206360127

カットスポンジ

ショイデンタル



個人トレーを製作する時のスペーサーとして、予め直径103mmにカットしたスポンジです。濡らしたカットスポンジを3枚重ねて模型の上に置き、バイオスターで加熱したインプレロンを上から圧接してください。

商品名	包装	商品番号
カットスポンジ	10枚入	3444 206360131

ブルーロッカー

ショイデンタル



ブルーロッカーは、光重合タイプのブロックアウト用レジンで、アンダーカットのブロックアウトやセットアップ模型のセパレート部の隙間への充填、ドラッグリテーナーを製作する際のリリース、弾力性があるワイヤーの仮着など、さまざまな目的に使用することができます。380～470nmの光照射器で10～30秒照射することにより硬化します。先端のカニューレはマイクロとミニの2種類があります。

商品名	包装	商品番号
ブルーロッカー	1.5g×4本+カニューレマイクロ2本/ミニ8本	5276 206360304

ポリプロピレンシート

吉美産業



厚さ0.2mmのポリプロピレンシートで、インダイレクトボンディングのトランスファーマスクや分離用シート、スペーサーとして使用することができます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
ポリプロピレンシート	ナチュラル ○	0.2×125	100枚	PP002 206360179

アプライアンス製作事例

マウスガード

カスタムメイドのマウスガードはフィット感がよく、スポーツ中も外れることなく使用できます。カラフルなプレート様を取り揃えておりますので、患者さんのお好みに合わせてプレートをお選びください。


- ★オススメのプレート：バイオプラスト 3.0 ～ 5.0mm、カラーバイオプラスト 3.0mm
 ★形態修正用のバー：バイオバームトリマー(トリミング)、ディモプロ(中研磨)、OSAMU ポリッシャー(艶出し研磨)



バイオプラスト分離材を模型に塗布し、バイオプラストをプレスします。



大まかな形にカットिंगし、2次プレス時に咬合面や歯間に空気が溜まらないよう穴を開けた後、クリアーのバイオプラストをプレスします。

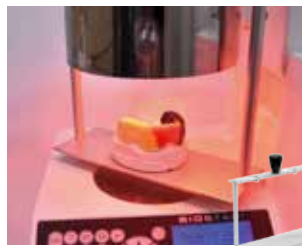

対合歯の圧痕を付与するため、ヒーティングサポートを用いて咬合面を加熱します。



咬合器に戻して対合歯の圧痕を付与します。最後に形態修正を行い、フィニッシングリキッドで艶出しをして完成です。

ホワイトニングトレー

適合のよいホワイトニング用のトレーを製作することで、不必要な部分への薬液の流出を防ぎます。

- ★オススメのプレート：コピープラスト 1.0 ～ 1.5mm、
 バイオプラスト 1.0 ～ 2.0mm
 ★形態修正用の器具：金冠バサミ、フィニッシングバーセット



ブルーロッカーを使用してリリーフを行い、模型を設置します。ペレットカバーを使用すると、シートにペレットが入り込みにくくなります。



プレートを加圧します。



歯頸部に沿ってトリミングをして完成です。

拡大装置

加圧成型の特徴である艶のある表面をそのまま活かして、審美的な装置が作製可能です。プレートの厚みを利用することで均一な床を作製することができます。

- ★オススメのプレート：バイオクリル C(クリアー) 2.0 ～ 3.0mm、
 バイオクリル C(クリアーピンク) 2.0mm
 ★形態修正用のバー：フィニッシングバーセット

詳しい製作方法はこちら➡



分離材の代わりとしてイソフォランオイルを圧接し、その上にペンディングしたワイヤーをスティッキーワックスで留めます。



レジンに埋まらないようタグの中央部を残し、余剰部をカットしたエキスパンションスクリューを即時重合レジン(オーソクリスタルなど)で仮留めします。
 ＊模型に穴を開ける方法も可能です。



バイオクリルCを加熱している間に即時重合レジンとエキスパンションスクリューとクラスプワイヤーの脚部に盛り付け、プレスします。



即時重合レジンが硬化するまで圧力をかけ続けておき、硬化したら外してトリミングをして完成です。