




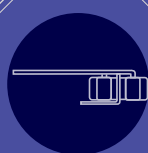

2025 → 2027
CONTENTS

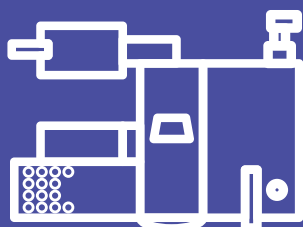

LABORATORY
PRODUCTS

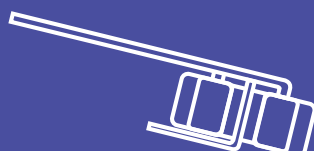

12

技工関連製品

- オーソクリスタル／オーソソープ／オーソマックス 208
- IMPRIMO® モデルセパレーター／オドントシル／
グラインディングキャップ／ウルトラトリム …… 209
- バキュームフォーマー／角型プレート（コピープラスト／
コピープラストC／バイオプラスト／デュラン）… 210
- フィニッシングバーセット …… 211
- デイモ／その他 …… 212
- ブロックアウト用材料／セットアップワックス／
フィグゼーター …… 213
- ジョージゲージ …… 214
- TAP-T / TAP-T Reverse / myTAP …… 215
- IST 関連器材／OPM キット …… 216
- オーソフレーム／SW フラックス／オーソソルダーII／
ニュー ST ロック …… 217
- モデルボックス／スタディーモデルゴム枠 …… 218

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY
TREATMENT

INTRAORAL
EXTRAORAL

EXPANSION
SCREWS

I-station α

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR
SYSTEM

LABORATORY
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM
SYSTEM

COA
SOFTWARE

BOOKS

オーソクリスタル／オーソソープ／オーソマックス

オーソクリスタル

ニッシン



普通セット クリアー



粉 100g 液 クリアー 100mL

※セットや粉100gに付属されているノズルキャップの先端は、お好みの位置でカットしてお使いください。(粉の吐出量を任意で調整するため)



オーソクリスタルは矯正用即時重合レジンでフリカケ法、混和法、筆積法に使用できます。特にフリカケ法に用いたとき広い面積を迅速に処理できる仕様としています。硬化時間は21℃で6分です。硬化後の透明度が高く変色が少ないため、粘膜面、歯牙、ワイヤー装置などの状態がよくわかります。

セット	カラー	内容量	包装	商品番号
普通セット	ピンク	100g+100mL	1	OCSETPN 206350084P
	クリアー	100g+100mL	1	OCSETCN C
単品	カラー	内容量	包装	商品番号
液	ピンク	100mL	1	OC100P 206350079P
	クリアー	100mL	1	OC100C C
	ピンク	250mL	1	OC250P 206350083P
	クリアー	250mL	1	OC250C C
粉		100g	1	OC100 206350080
		500g	1	OC500 206350081

医療機器認証番号 21700BZZ00271000 管理



液 250mL ピンク



粉 500g

オーソソープ

下村石膏



オーソソープは模型を約5分原液に浸すだけでソーピング処理ができます。オーソマックスのような白い石膏の白さを引き立て、黄色くありません。またソーピング液特有の臭いをなくし、さわやかな青りんごの香りで快適にご使用いただけます。

- ①乾燥させた模型を原液に5分浸す。
- ②模型を取り出し柔らかなブラシやガーゼで泡立つように磨く。
- ③40℃の温水で泡とともに模型表面のオーソソープを洗い流し再度磨く。
- ④再度乾燥させる。

	内容量	包装	商品番号
オーソソープ	4L	1	OS 206350068

オーソマックス

下村石膏



オーソマックスは矯正用に開発された硬石膏です。

1. 矯正模型で発生する歯列部と台付け部との境界部のラインや色調の差をなくしました。
2. 高度な純白さを追求した白色硬石膏でソーピングによる艶出し効果が良好です。
3. 適度な強度を与えたことによりトリミングが容易で、模型のエッジ出しがシャープに、ペーパー等での切削面もきれいに仕上がります。

	内容量	商品番号
エコボックス	10kg 1箱	OM10 206850691
アルミパック	18kg 1箱 (3kg×6袋)	OM18
エコボックス徳用	18kg 1箱	OM18E 206850693

医療機器届出番号 12B3X10030000004 一般

オーソマックスⅡ

下村石膏



オーソマックスより硬さのある矯正用白色硬石膏です。

1. 流し込み、盛り付け時に適度のチキソトロピー性があり操作性が良好です。
2. 高度の純白性があり、歯列部と台付け部の色調の差が出ません。
3. 模型の表面がシャープで精度のある模型ができます。

	内容量	商品番号
エコボックス	10kg 1箱	OM210 206850149
アルミパック	18kg 1箱 (3kg×6袋)	OM218
エコボックス徳用	18kg 1箱	OM218E 206850151

医療機器届出番号 12B3X10030000027 一般

※オーソソープ、オーソマックス各種についてはメーカーより直送のため、返品はお受けいたしかねます。お届けまでにお時間をいただくことがございます。



IMPRIMO® モデルセパレーター／オドントシル／グライディングキャップ／ウルトラトリム

IMPRIMO® モデルセパレーター ショイデンタル



3Dプリンターで作られたレジン模型を用いて可撤式矯正装置を製作するための、水性レジン分離材です。付属のブラシで薄く塗布し、室温もしくは模型乾燥器などでしっかり乾燥させてから即時重合レジンを築盛してください。(室温の場合は45分以上)

※フィラメントプリンターで作成したレジン模型には適しません。



使用方法是こちら →

	内容量	包装	商品番号	
IMPRIMO® モデルセパレーター	100ml	1	6551	206860466

※筆が1本付属します。

オドントシル

リンカイ



オドントシルは常温重合型シリコン材で収縮が少なく、透明性、耐摩耗性、靱性などが高いことから矯正用ポジションナー、マウスガード、インダイレクトボンディングなどの用途にご利用いただけます。

重合後の硬度がショア硬度で比較的軟らかい50と硬い60の2種類あり、目的により使い分けることが可能です。

	内容量	包装	商品番号	
オドントシル 50 クリアー	50mL	2	5038150	206850486C
	50mL	8	5038229	206860594
オドントシル 60 クリアー	50mL	2	5038160	206850487
	50mL	8	5038227	206860593
ミキシングチップ*1		60	641521L	206410521L
カートリッジディスペンシングガン*2		1	641522	206410522

※2本入りにはミキシングチップが10本付属します。
※8本入りにはミキシングチップは付属しません。

医療機器認証番号 228AGBZX00015000 管理

*1 医療機器届出番号 27B1X00109000201 一般 (JMA)

*2 医療機器届出番号 27B1X00109000202 一般 (JMA)

グライディングキャップ／グライディングホルダー リンカイ

はさみ等では落としきれないバリを落とす時、きれいな研削が可能です。



	サイズ	規格	包装	商品番号	
グライディングキャップ 1	7.0mm	5	38230S1		206850852
グライディングキャップ 2	10.0mm	5	38230S2		206850853
グライディングキャップ 3	14.5mm	5	38230S3		206850854
グライディングホルダー 1	6.5mm	1	38230T1		206850855
グライディングホルダー 2	9.5mm	1	38230T2		206850856
グライディングホルダー 3	14.0mm	1	38230T3		206850857

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

ウルトラトリム (マンドレール付) リンカイ

リンカイ

オドントシルの最終研磨に使用します。



	包装	商品番号	
ヘビー	6	43751M	206850366
ミディアム	12	43752M	206850367
ライト	12	43753M	206850368

バキュームフォーマー／コピープラスト／コピープラストC／バイオプラスト／デュラン

このページでは四角いプレートを使用した器材を紹介しています。丸いプレートは第11章をご覧ください。

熱可塑性樹脂吸引成型器

バキュームフォーマー EV2 3A×ディスプレイ



簡単な操作でマウスガードなどを吸引成型する歯科技工用ヒータープレスです。シート of 過熱、ヒーターの切り忘れなどを防ぐために、過熱防止タイマーを設けています。ボディは軽量で強度・耐蝕性を有したアルミニウムキャストを採用したコンパクトな設計です。

仕様	
商品番号	649030
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ヒーター：550VA モーター：1400VA
寸法	180 (W)×240 (D)×310 (H)mm
重量	約8.0kg
	206490030

医療機器届出番号 27B1X00109000207 一般

コピープラスト ショイデンタル



コピープラストは、非接着性の軟らかいプレートです。接着材やレジンが着かないという特性を生かして、ホワイトニングトレイやテンポラリークラウンの複印象、またはプラスチック模型用の複印象として使用できます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
コピープラスト	ナチュラル□	0.5×125	10枚	3176 206360097
		1.0×125		3178 206360098
		1.5×125		3174 206360096

医療機器承認番号 20600BZY00561000 管理

コピープラストC ショイデンタル



ハードキャストとコピープラストの中間の硬さを有するプレートです。素材は摩耗しにくく、弾力性にも富んでいますので、インビジブルリテーナー（クリアリテーナー）に適しています。クリアー色ですが若干乳白色に近いプレートです。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
コピープラストC	ナチュラル□	1.0×125	10枚	3404 206360095

医療機器認証番号 304AKBZX00021000 管理

バイオプラスト ショイデンタル



バイオプラストは、軟らかいEVAプレートでマウスガードやポジションナーのような弾性を必要とする装置に使用できます。

バイオプラストはレジンと接着できませんが、バイオプラスト同士を加熱軟化して圧着することができます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
バイオプラスト	クリアー□	1.0×125	10枚	3269 206360057
		1.5×125		3182 206360054
		2.0×125		3184 206360055
		3.0×125		3186 206360056

医療機器承認番号 20500BZY00731000 管理

デュラン ショイデンタル



デュランは、吸引成型用のプレートの中で硬いものに属し、弾力性に富んだ透明度の高いプレートです。

即時重合レジンと接着しますのでスプリントやナイトガードを製作するのに適しています。また、薄いサイズのものはインビジブルリテーナーにも使用できます。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
デュラン	クリアー□	0.5×125	10枚	3410 206360005
		0.75×125		3412 206360006
		1.0×125		3414 206360007
		1.5×125		3416 206360008

医療機器認証番号 222AKBZX00102000 管理



※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。



フィニッシングバーセット

ショイデンタル

フィニッシングバーセット

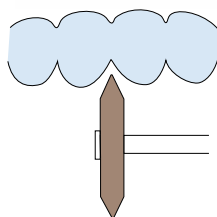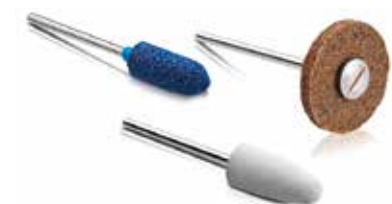

ポリフィックス：ドレッサー
を使用しホイールの端に
エッジを付与したとき

フィニッシングバーセットは、バイオスターでプレスしたプレートをカットして仕上げるためのバー及びホイール8種類が1本ずつセットになっています。それぞれの単品もご用意しています。

商品名	包装	商品番号	
フィニッシングバーセット	8種類各1本入	33781	206360136

内容：カッティングバー、HM-カーバイドカッター、HM-トライカッターファイン、フィニッシングバー、バイオパームトリマー、ポリフィックス、OSAMUポリッシャー、ディモプロスリム、ドレッサー

カッティングバー

硬いプレートをカットするためのバーです。先端がスパイラル形状になっており、下記の三角錐のバーより滑らかに研削できます。

HM-カーバイドカッター（イエロー）

三角錐の形状をした鋭いエッジの刃が付いており、硬いプレートのカッティング（おおまかな切り出し）に適しています。スパイラル形状に比べて、硬いプレートの溶解片がバーに絡みついても外しやすくなっています。

HM-トライカッターファイン（グリーン）

三角錐の形状をした鋭いエッジの刃が付いており、イエローより細かいカッティングをするのに適しています。歯間部の狭いエリアをカットする時におすすめです。

フィニッシングバー（レッド）

四角錐の形状をしたバーで、比較的軟らかめの金属で作られています。金属の硬度を下げることで、カッティングの際にクラスプやワイヤーに接触しても傷が付きにくくなっています。

商品名	包装	商品番号	
カッティングバー		3214	206360129
HMカーバイドカッター（イエロー）	6本入	3369	206860572
HMトライカッターファイン（グリーン）		3370	206860669
フィニッシングバー（レッド）		3377	206860576

バイオパームトリマー（ブルー）

バイオプラスチックやニューデュラソフトPDの軟質面など、軟らかい材質の形態修正に適しています。軟らかい素材でもしっかり削ることができる表面性状を持っています。

ポリフィックス（ブラウン）

バイオパームトリマーと同じ用途のホイールバーです。ドレッサーを用いて、ホイールの端が面ではなく点接触になるようなエッジを作って使用することで、バイオパームトリマーの入りにくい歯間部など狭い部分の形態修正やバリ取りをすることが可能です。（左図）

OSAMUポリッシャー（グレー）

バイオプラスチックなど軟らかいプレートの艶出し研磨に使用します。

商品名	包装	商品番号	
バイオパームトリマー（ブルー）	2本入	3226	206860571
ポリフィックス（ブラウン）	1本入 マンドレル付き	3371	206860573
OSAMUポリッシャー（グレー）	2本入	3247	206860570

医療機器届出番号 13B2X00107000A24 一般


研磨時の表面性状



プレート：バイオプラスチック



ディモプロ

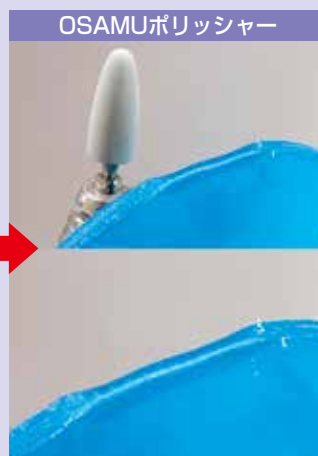

OSAMUポリッシャー

※ご注意※

電子添文や、同梱されている説明文に記載の回転数を必ずお守りください。強い摩擦熱によりプレートが研磨できないなど、意図した結果が出ない場合があります。

ディモ／その他

ショイデンタル

ディモ



バイオスター用各種プレートのスミージングや、研磨用のスポンジホイールです。特殊な構造で研磨時に発熱しにくいため、ハード系のプレートだけでなく従来研磨することが難しかったEVAやポリウレタン・シリコーン等の軟質素材にも使用できます。

ディモ プロ(左)

エラストマーコンパウンドと繊維構造の組み合わせにより発熱しにくく、素材を選ばないオールラウンドなホイールバーです。バイオプラストなどの軟らかい素材だけでなく、デュランなどのハードプレートのバリ取り、2層・3層構造のプレートの辺縁研磨にも使用可能です。

ディモ プロ スリム (右)

ディモプロの厚みが薄いタイプです。狭い箇所研磨に適しています。

ディモ マンドレール (10本入)

ディモ専用のマンドレールで、スポンジ状のホイールをしっかりとホールドできるようにネジ頭部の径が大きくなっています。

商品名	包装	商品番号	
ディモ プロ	10個入(マンドレール1本付)	3381	206860574
ディモ プロ スリム		3376	206860578
ディモ マンドレール	10本入	3380	206860579

ディモ コース (ブラウン)

粗研磨用ホイール。軟質素材の研磨に適しています。

ディモ ミディアム (グリーン)

中研磨用ホイール。軟質素材の研磨に適しています。

ディモ ファイン (パープル)

細研磨用ホイール。軟質素材の研磨に適しています。

商品名	包装	商品番号	
ディモ コース	10個入(マンドレール1本付)	3382	206860670
ディモ ミディアム		3383	206860577
ディモ ファイン		3384	206860575
ディモ マンドレール	10本入	3380	206860579

その他



セットアップ模型を製作するためのバーならびにディスクです。

セットアップモデルトリマー (左)

模型の穴開けや、垂直切断用のカーバイドバーです。

ダイヤモンドセパレーティングディスク (右)

セットアップ模型の分割等に使用できます。両面にダイヤモンドコーティングを施しており、ホイールの厚さは0.28mmです。

商品名	包装	商品番号	
セットアップモデルトリマー	1本入	5371	206860685
ダイヤモンドセパレーティングディスク	1本入 (マンドレール付き)	5288	686



※ご注意※ 電子添文や、同梱されている説明書に記載の回転数を必ずお守りください。強い摩擦熱によりプレートが研磨できないなど、意図した結果が出ない場合があります。


※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器届出番号 13B2X00107000A24 一般



ブロックアウト用材料／セットアップワックス／フィグゼーター ショイデンタル

ブルーロッカー

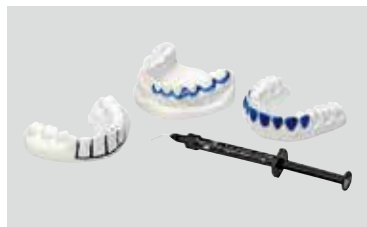

ブルーロッカーは、光重合タイプのブロックアウト用レジンで、アンダーカットのブロックアウトやセットアップ模型のセパレート部の隙間への充填、ドラッグリテーナーを製作する際のリリース、弾力性があるワイヤーの仮着など、さまざまな目的に使用することができます。380nm～470nmの光照射器で10～30秒照射することにより硬化します。先端のカニューレはマイクロとミニの2種類があります。

商品名	包装	商品番号
ブルーロッカー	1.5g×4本+カニューレマイクロ2本/ミニ8本	5276

※ノズル径：マイクロ=0.6mm ミニ=0.9mm

206360304

シルキット/ブロッキングアウトパテ



シルキット



ブロッキングアウトパテ

シルキットは可塑性シリコンで、バイオスターでプレートをプレスする前に、模型のアンダーカット部をブロックアウトするために使用します。カラーは半透明のクリアと模型上で視認しやすいレッドをご用意しています。

ブロッキングアウトパテは合成ゴムで、練り消しゴムのようなテクスチャーです。シルキットと同じ用法ですが、広範囲のカバーに適しています。

※シルキット、ブロッキングアウトパテはバイオプラストには使用できません。

商品名	容量	商品番号
シルキットクリア	150g	3443
シルキットレッド	150g	3442
ブロッキングアウトパテ	250g	3220

206360135

206360193

206360130

セットアップワックス



ベタつきの少ないユーティリティワックスです。操作性もよく、セットアップ模型作製時の使用等に適しています。

商品名	包装	商品番号
セットアップワックス	25本入り	5268

医療機器届出番号 13B2X00107000044 一般

206360247

フィグゼーター



フィグゼーターは矯正装置を製作するのに便利な構成咬合器です。マウント部に付いているネジを外すことにより、模型を着脱することができます。

商品名	包装	商品番号
フィグゼーター	1個入	5380

206860602

ジョージゲージ

グレートレイクス

正確な咬合採得は、効果的な機能的矯正装置の製作において最も重要なことですが、患者によって適切な咬合位は異なり、術者の推測や目測での採得は理想的な位置とは異なっていることもあります。

ジョージゲージはそういった問題を解決し、咬合採得の正確性と一貫性を向上させるために役立つ補助器具です。



使用方法例



下顎クランプ(写真青色部分)の正中線を下顎の正中に合わせてネジで固定します。下顎前歯の正中が顎骨に対してずれている場合は上下顎骨の正中に合わせます。



適切なバイトフォークを本体に取り付けます。上下顎を軽く閉じ、上顎前歯がV字部の溝に入っていることを確認します。
※下顎クランプは約1mmの厚みがあります。バイトフォーク選択の際はご注意ください。



下顎を患者の習慣的な閉口時の顎位をもっていきます。その位置でバイトフォークを固定し、スケール上に示された値を記録します。



次に、下顎を複数回、最前方位に移動するトレーニングをしてから、最も前方に移動した時の値を記録します。これによって可動域が数値化されます。



一度口腔内から取り出し、装置製作に適切と思われる位置で上ネジを締めてバイトフォークを固定します。



バイトフォークにワックスやシリコンバイトなどを付着させ、5.で決定された位置のバイトを採得します。



採得したバイトで模型を固定し、咬合器にマウントします。



マウント完成。

咬合位採得用バイトフォーク



※ゲージ部分の色(ホワイト、グレー)は、入荷時期により異なります。

商品名	包装	商品番号
ジョージゲージキット	1セット	056-050

206850559

キット内容：ゲージ本体1個、バイトフォーク2mm、5mm 各1本
バイトフォーク2mm L、5mm L 各1本

※2mmと5mmという数値はバイトフォークの厚みではなく、開口量の目安です。

また製造の都合上、V字カット部の厚みにはバラつきがございます。

※下顎クランプは約1mmの厚みがあります。バイトフォーク選択の際はご注意ください。

商品名	包装	商品番号
バイトフォーク2mm	25本入	056-023
バイトフォーク5mm	25本入	056-024
バイトフォーク2mm L	25本入	056-032
バイトフォーク5mm L	25本入	056-033

206850498

206850499

206860597

206860598

※バイトフォークは単回使用です。

※ゲージ本体はオートクレーブが可能です。(推奨条件：121℃、30分間)

医療機器届出番号 13B2X00107000042 一般



TAP-T / TAP-T Reverse / myTAP

ショイデンタル



夜中のいびき



日中の眠気

いびき防止装置用器具とは

下顎と舌を前突位に位置付けることにより夜間就寝中の気道を確保し、いびきを軽減する装置です。

いびき防止装置用器具

TAP-T



TAP-T



正面

咬合面

TAP-T Reverse



正面

咬合面

myTAP



TAP-Tは、Dr. Thornton の開発したニッケルフリーのチタン製デバイスです。この装置によって下顎を前方で保持することにより、就寝中に軟組織によって閉塞される気道を広げて確保し、いびきを軽減します。専用の調整用六角レンチを用いてフックの位置を前（後）に調節できますので、必要に応じて最も効果の現れる位置に調節することが可能です。

商品名	色・形	サイズ (mm)	包装	商品番号
TAP-T単品				
TAP-T上顎用デバイス			1個	9033 206860673
TAP-T下顎用デバイス			1個	9032 206860672
TAP-T六角レンチ			1個	9035 206860674
TAP-Tマウンティングデバイス			5個	9039 206860676
TAP-Tトレーナー			10個	54701 206860671
TAP-Tマトリックス			2個	9037 206860675
TAP-T Reverse 上顎用デバイス			1個	9053 206860677
バイオスター（加圧成型器）専用シート				
ニューデュラソフトPD (2.5mm) *1	クリアー○	2.5×125	10枚	33871 206360231
イソフォランフォイル (0.1mm)	ナチュラル	0.1×125	100枚	3207 206360123

*1 医療機器届出番号 13B2X00107000036 一般

睡眠時のいびきを軽減するために使用する、ボイル&バイトタイプの口腔内装置です。上下顎トレーのフィッティング後に位置調節して使用します。


商品名	包装	商品番号
myTAP	1 セット	9070 206860616

IST関連器材／OPMキット


ショイデンタル

いびき防止装置用器具

IST関連器材

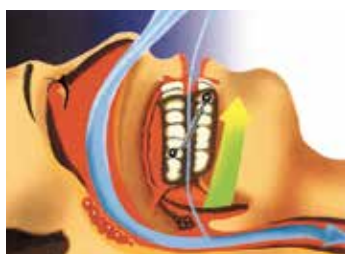

テレスコープ

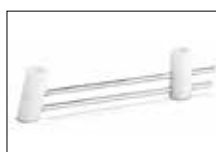

ISTフィキシングパーツポジショニングサポート (上)
 ISTフィキシングパーツ O-リングタイプ (下左)
 ISTフィキシングパーツ スクリュータイプ (下右)

OPMキット



※包装変更中につき、写真と異なる場合がございます。

ISTとは、Intraoral Snoring-Therapy-Applianceの略で、オーラルスクリーンで有名なHinz教授が考案した「いびき防止装置」です。

ショイデンタル社では、この装置を製作する為の部品及び補助装置を揃えました。

Hinz教授によって開発されたISTアプライアンスは、下顎を前方に位置づけることにより、咽頭のエリアを圧迫することを軽減し、いびきを防止することができます。

ISTアプライアンスの上下の連結には、HERNERガイディングテレスコープと呼ばれる装置を使用しますが、これにより下顎が後方に落ち込むことを防ぎ、かつ口を開けたり、前に出したり、左右に動かしたりできるというユニークな構造を持っています。

テレスコープ

商品名	長さ	ストローク	包装	商品番号
テレスコープ	20~28mm	5mm	2本	5449
	25~39mm	9mm		5454
	31~51mm	15mm		5444

206860648
 206860649
 206860647

ISTフィキシングパーツ O-リングタイプ (O-リング付)

商品名	包装	商品番号
ISTフィキシングパーツ O-リングタイプ	4セット	5468

206850502

ISTフィキシングパーツスクリュータイプ

商品名	包装	商品番号
ISTフィキシングパーツ (スクリュータイプ)	4セット	5457

206850500

IST O-リング

商品名	包装	商品番号
IST O-リング	10個入	5466

206850501

ISTフィキシングパーツポジショニングサポート

商品名	包装	商品番号
ISTフィキシングパーツ ポジショニングサポート	1個	5469

206850503

OPMは、ISTを簡単にした「いびき防止装置」で、この装置がすぐ作れるようにキットにしました。ISTのテレスコープ部が25~30mm、6種類のプラスチックパーツになっています。

商品名	包装	商品番号
OPMキット	1セット	5495

206860603

内容：プラスチックバー (25~30mm) 各1組、O-リング付フィキシングパーツ 4個
 プロテクションチューブ 1本、オクルージョントレーナー 1個





オーソフレイム／SWフラックス／オーソソルダーII／ニューSTロック

オーソフレイム (ガスボンベ付) センジョー



デンタルバーナーで、取扱いが便利なボタンガスを使用しています。
内炎が鋭利になるよう設計されているので、自在鑑着時に必要な部分に熱を加えられ効率的に作業が行えます。
付属のスクリーンにより炎の確認が容易です。
また、専用スタンドにより角度を自由に選択できます。

! 工場出荷時にガスは充填されています。
ガスの過剰充填は着火不良の原因となりますのでご注意ください。

	内容量	商品番号	
オーソフレイムセット	本体、ガスボンベ、スタンド、スクリーン	OF	206350090
〈単品〉ガスボンベ	130g	OFG	206350089

【仕様】

ボディーグリップ：φ36mm
連続使用時間：約70分（最大炎）
寸法：85 (L)×143 (H)×46 (W)mm
容量：26g
重量：214g
ガスボンベ：130g

SWフラックス YAMAKIN



ペーストタイプのフラックスで、鑑着時の濡れ性の向上と、金属表面の酸化膜や汚れを除去し、銀ろうの流れをスムーズにします。活性温度は、400-900℃です。

	内容量	商品番号	
SW フラックス	40g	SWF	206350655

オーソソルダーII モリタデンタルプロダクツ



流ろう性が高く、操作性の良い歯科用銀ろうです。
液相点：650℃

ワイヤーサイズ (mm)	内容量	長さ (m)	商品番号	
0.5	10g 1巻	5.44	SDR05	20688018205
0.6	10g 1巻	3.78	SDR06	06

※長さは目安です

医療機器認証番号 304AGBZX00066000 管理

ニューSTロック モリタデンタルプロダクツ



リングアタッチメントの定番装置です。維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損が起こりにくい構造です。
遠心方向のコントロールも可能な「エクステンションタイプ」や、維持部を交換せず装置のみを取り替えたいときなどに使用可能な「脚部のみ」もご用意しております。

仕様	包装	商品番号	
レギュラー	1組	STLR	206880163LR
	5組	STLR5	206880164LR5
ミニ	1組	STLM	206880163LM
	5組	STLM5	206880164LM5
エクステンション	1組	STLE	206880165
脚部のみ(レギュラー・ミニ共用)	10本	STLF	206880179

医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

モデルボックス／スタディーモデルゴム枠

ANDYモデルボックス

JM Ortho




サイズ（外寸）W230×D164×H70(mm)

包装	商品番号
50	ANDY050 206860680

※返品はお受けいたしかねます。

SAMモデルボックス

JM Ortho

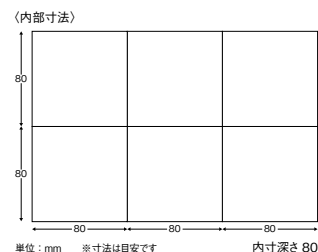SAM咬合器にマウントした
模型がそのまま入ります。

インデックスラベル20枚付

サイズ（外寸）W240×D160×H85(mm)

包装	商品番号
20	SMB20 206850719

※メーカーより直送のため、返品はお受けいたしかねます。
お届けまでにお時間をいただくことがございます。

スタディーモデルゴム枠〈石膏模型の外形、形成用ゴム枠〉 ニッシン

【形態】

H12-A 永久歯顎用 角大型

H12-B 乳歯顎用 角小型

H12-C 永久歯顎用 丸型

【包装】


1組（上下入り）

【材質】

シリコーン製

【色調】

ブルー

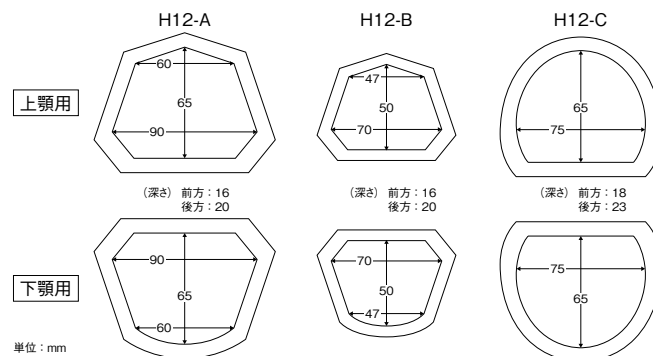

商品番号
H12-A 204520523A
H12-B B
H12-C C

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。